

SORBACT® REDUSERER MENGDEN MIKROORGANISMER I SÅR PÅ EN SIKKER MÅTE

Sorbact®-metoden er en nyskapende tilnærming for å redusere bio-belastningen i sår uten bruk av kjemisk aktive midler. I stedet brukes et fysisk prinsipp til å binde bakterier og sopp tilbandasjen ved nærvær av fuktighet. Disse fjernes fra såret hver gang bandasjen skiftes.²

Sorbact® mikrobielt bindende bandasje forebygger og behandler sårinfeksjoner ved å redusere mengden mikroorganismer. Mikroorganismer binder til bandasjens overflate og kasseres når bandasjen byttes. Sorbact® tilrettelegger for sårtilheling ved å redusere mengden mikroorganismer uten å avgi noen aktive stoffer til såret.

Tilrettelegger for sårtilheling


Forhøyede nivåer av mikroorganismer fører til infeksjonsrisiko og forsinket sårtilheling. Sorbact® reduserer mengden mikroorganismer på en sikker måte og forbedrer dermed forutsetningene for sårtilheling.

Binder både vanlige mikroorganismer som finnes i såret, og multiresistente bakterier

Vanlige mikroorganismer i sår, f.eks. *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus species*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* og *Candida albicans*, binder til Sorbacts unike overflate. Sorbact® binder også MRSA (meticillinresistent *Staphylococcus aureus*).¹

Sorbact®-metoden er en svensk innovasjon. Den er basert på kunnskapen om at tohydrofobe partikler bindes sammen når miljøet er fuktig. Gjennom våre partnere og distributører brukes på en lang rekke sårtypen i over 65 land på alle kontinenter.

1. Ronner AC, et al. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care 2014; 23(10):484-488.
2. Ljungh Å, et al. Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria. J Wound Care 2006; 15(4):175-180.

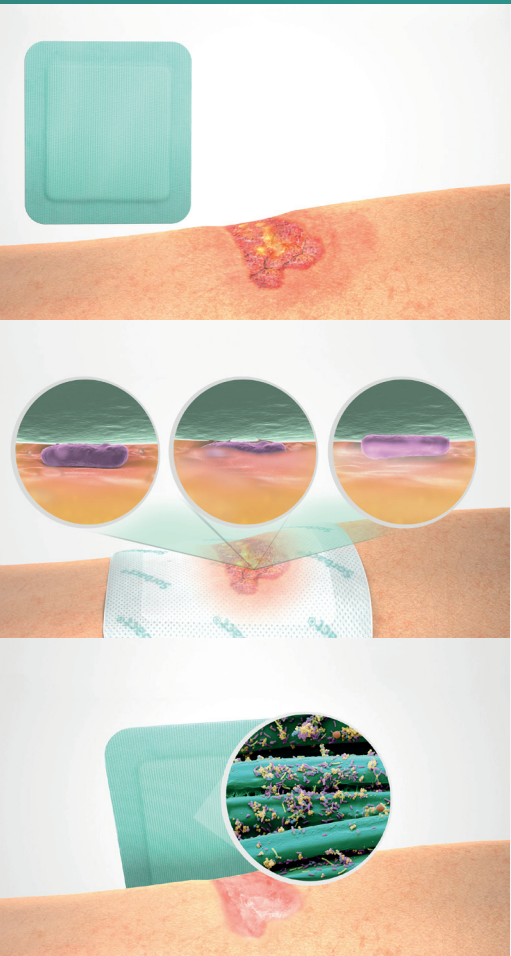

Påføres

Sorbact® påføres slik at den grønne overflaten er i direkte kontakt med sårsengen.

Bindes

Mikroorganismer bindes til bandasjen i nærvær av fukt.

Fjernes

Bundne mikroorganismer fjernes ved bytte av bandasje.

SORBACT® PRODUKTSERIE

SORBACT® GEL DRESSING GELKOMPRESS					
Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke	Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke
98139	3x15 cm	10	98180	15x20 cm	5
98136	7,5x7,5 cm	10	98181	20x25 cm	5
98137	7,5x15 cm	10			

SORBACT® COMPRESS KOMPRESS					
Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke	Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke
98128	4x6 cm	40	98125	7x9 cm	40

SORBACT® SURGICAL DRESSING KIRURGISK BANDASJE					
Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke	Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke
98140	5x7,2 cm	100	98144	10x25 cm	20
98141	8x10 cm	20	98145	10x30 cm	20
98142	8x15 cm	20	98146	10x35 cm	20
98143	10x20 cm	20			

SORBACT® FOAM GENTLE BORDER SKUMBANDASJE MED SILIKONKLEBER					
Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke	Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke
98531	7,5x7,5 cm	10	98533	15x15 cm	10
98532	10x10 cm	10			

SORBACT® RIBBON GAUZE SÅRFYLLER					
Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke	Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke
98118	1x50 cm	20	98120	5x200 cm	10
98121	2x50 cm	20	98119	10x200 cm	10

SORBACT® ROUND SWAB TUPFERE					
Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke			
98126	Ø 3 cm	70 (5 x 14)			

SORBACT® FOAM DRESSING SKUMBANDASJE					
Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke	Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke
98310	10x10 cm	10	98320	10x20 cm	10
98315	15x15 cm	10			

SORBACT® ABSORPTION DRESSING ABSORBSJONSBANDASJE					
Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke	Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke
98224	7x9 cm	20	98223	10 x 20 cm	10
98222	10x10 cm	20			

SORBACT® SUPERABSORBENT SUPERABSORBERENDE SÅRBANDASJE					
Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke	Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke
98501	10x10 cm	10	98503	20x20 cm	10
98502	10x20 cm	10	98504	20x30 cm	10

SORBACT® NPWT WOUND FILLER NPWT SÅRFYLLINGSMATERIALE					
Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke	Ref.nr.	Størrelse	stk./pakke
98425	17x28 cm	40	98410	10x100 cm	10



ABIGO Medical AS · Eidsbergveien 43 · 1811 ASKIM
Tel: 91 13 63 32/92 23 53 64 · abigo.no



SORBACT®

HINDRER OG BEHANDLER
SÅRINFEKSJONER



2018-134

BRUKERVEILEDNING

SORBACT® FOR
ALLE TYPER SÅR
I ALLE STADIER

Det finnes Sorbact® bandasje for mange forskjellige typer sår. Siden Sorbact® bandasje ikke avgir noen aktive stoffer til såret, kan den brukes allerede fra starten av til alle pasienter for å forhindre infeksjon. Bandasjen kan også brukes for å redusere mengden mikroorganismer ved korttids- eller langtidsbehandling av allerede infiserte sår.

POSTOPERATIVT		
RENT		
KOLONISERT / INFISERT		
NEKROTISK / TØRT FIBRIN		
OVERFLADISK		
SÅRLOMMER		
FISTLER		
NPWT		
SOPPINFEKSJON I HUDFOLDER		

- Tørt

Lite

Moderat

Kraftig
- Overfladisk

Grunn

Grunn + dyp
- Infeksjonsforebyggende

Fibrin

Infisert

Nekrotisk

SORBACT® GEL DRESSING	SORBACT® COMPRESS	SORBACT® SURGICAL DRESSING	SORBACT® RIBBON GAUZE	SORBACT® ROUND SWAB	SORBACT® FOAM DRESSING	SORBACT® FOAM GENTLE BORDER	SORBACT® ABSORPTION DRESSING	SORBACT® SUPER- ABSORBENT	SORBACT® NPWT WOUND FILLER
Bruksområde For sår og brannskader som er tørre eller med lite sårsekresjon. Tilfører fuktighet.	Bruksområde For overfladiske sår og sårlokker.	Bruksområde For infeksjonskontroll i postoperative og traumatiske sår. Semi-permeabel polyuretanfilm som slipper ut overflødig fuktighet.	Bruksområde For fistler og soppinfeksjon i hudfolder.	Bruksområde For sårlokker og rengjøring.	Bruksområde For sår med lite til moderat sårsekresjon. Semipermeabel polyuretanfilm som slipper ut overflødig fuktighet.	Bruksområde For sår med moderat sekresjon. Semi-permeabel polyuretanfilm som slipper ut overflødig fuktighet. Fiksering med silikontkant.	Bruksområde For sår med moderat til kraftig sekresjon.	Bruksområde For sår med kraftig eller svært kraftig sekresjon.	Bruksområde For negativ trykktterapi på sår.
Bruksanvisning Bruk hydrogelbandasjen rett på sårområdet (ikke på omkringliggende hud). Dekk med en fuktighetsbevarende sekundærbandasje.	Bruksanvisning Påfør rett på såroverflaten. For sårlokker: Fluff den opp og plasser den rett i sårfordypningen (unngå tett pakking). Dekk med sekundærbandasje.	Bruksanvisning Fjern beskyttelsesfolien. Påfør bandasjen på såret og fjern stabiliseringsfilmen forsiktig ved å dra i den blå markeringen.	Bruksanvisning For fistler: plasseres i fistelen med én ende utenfor fistelen. Obs! La alltid avkuttende ender være utenfor såret. For sopp: Påfør ett lag i direkte kontakt med det infiserte området. Skader ikke frisk hud.	Bruksanvisning Plasser den runde tupferen i hulrommet. Dekk med en egnet sekundærbandasje. For rengjøring, følg lokale rutiner.	Bruksanvisning Påfør den grønne siden rett på såroverflaten. Fest bandasjen.	Bruksanvisning Fjern beskyttelsesfolien. Påfør bandasjen på såret. Velg en størrelse som gjør det mulig å ha kanten på tørr, ikke-fuktig hud. Trykk forsiktig rundt kantene.	Bruksanvisning Påfør den grønne siden rett på såroverflaten. Fest bandasjen.	Bruksanvisning Påfør den grønne siden rett på såroverflaten. Fest bandasjen.	Bruksanvisning Fyll hele sårkaviteten løst (unngå tettpakking). Fortsett som angitt for det aktuelle NPWT-systemet.