

Askina[®] Transorbent[®]

Skumbandasje med et tørt hydrogellag

B. Braun Wound Care. Right. From the start.



Askina® Transorbent®


Skumbandasje med et tørt hydrogellag



Transorbentteknologien med tørt hydrogel er et patentert design som sørger for en unik absorpsjonsprosess. Den kan føre væske vekk fra såret, holde på væsken, og eliminere overflødig fuktighet.

- ▶ Utmerket absorpsjonskapasitet
- ▶ Kleber ikke til sårflaten
- ▶ Døpende effekt pga. polyuretanskummet
- ▶ Ingen maserasjon eller sårrester
- ▶ Kan kuttes til individuelt tilpassede størrelser og fasonger


Strukturen på Askina® Transorbent®

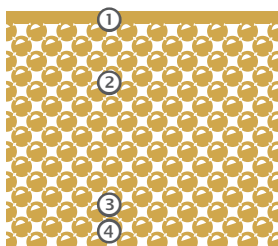

- 1. Tynt polyuretanlag**
Ugjennomtrengelig for væsker og bakterier, men dampgjennomtrengelig
- 2. Skumlag**
Gir væskedamp muligheten til å unnslipe og gjøre bandasjen komfortabel og lett å forme
- 3. Tørt hydrogellag**
Absorberer såreksudat og bevarer et fuktig, helende miljø. Overflødig eksudat fordampes gjennom skummet og de øvre lagene.
- 4. Klebeflate**
Kleber til intakt og tørr omkringliggende hud, men ikke til sårflaten.

Indikasjoner

- ▶ Trykksår
- ▶ Venøse leggsår
- ▶ Arterielle leggsår
- ▶ Diabetiske fotsår
- ▶ Traumatiske sår
- ▶ Kirurgiske sår
- ▶ Første- og andregradsforbrenninger
- ▶ Bidrar til å hindre skader på huden

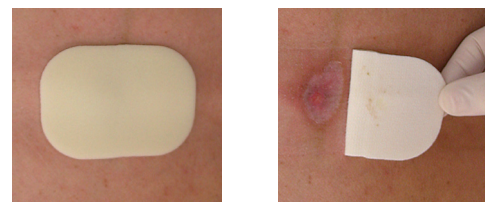

Eksempel på bruk av Askina® Transorbent®

- ① ② Andregrads trykksår på ryggvirvel hos pasient

Askina® Transorbent®	Størrelse	Pakn.str./stk.	Art.nr.	NE vnr.
	5 cm x 7 cm	10	0072786R	229298
	10 cm x 10 cm	5	0072789U	
	15 cm x 15 cm	5	0072790V	
	20 cm x 20 cm	5	0072791W	
	10 cm x 10 cm	10	0072788T	229299
	15 cm x 15 cm	10	0072794V	229301
	20 cm x 20 cm	10	0072796W	229303



Askina® Transorbent® Border | Sacrum | Askina® Touch

Skumbandasjer med tørt hydrogellag og klebende eller ikke-klebende kant



Transorbent® Border og Sacrum har de samme bandasjelagene og fordelene som Askina® Transorbent®. Den klebende polyuretankanten forsterker feste- evnen slik at lang tids bruk blir sikrere.

Askina® Transorbent® Border

Spesielt tilpasset områder som er vanskelige å bandasjere.

Askina® Transorbent® Sacrum

Formet som en trekant og passer godt til sacrumområdet.

Askina® Touch

Askina Touch har den samme strukturen som Askina Transorbent, men er ikke- klebende. Den er spesielt tilpasset sår hvor området rundt såret er skjørt.

Askina® Transorbent®	Størrelse komplett bandasje skumlag	Pakn.str./stk.	Art.nr.	NE vnr
Border	9 cm x 14 cm 5 cm x 10 cm	5	0072705B	229294
	9 cm x 14 cm 5 cm x 10 cm	10	0072706B	
	14 cm x 14 cm 10 cm x 10 cm	5	0072710C	229295
	17 cm x 17 cm 13 cm x 13 cm	5	0072715D	229296
	24 cm x 24 cm 20 cm x 20 cm	5	0072720E	96848
Sacrum	16 cm x 18 cm 12 cm x 14 cm	3	0072795Z	229302
	18 cm x 20 cm 15 cm x 16,5 cm	5	0072792X	229300
	18 cm x 20 cm 15 cm x 16,5 cm	10	0072799X	
Askina® Touch	10 cm x 10 cm	10	7261002	
	10 cm x 15 cm	5	7261501	
	15 cm x 15 cm	5	7262252	
	15 cm x 15 cm	10	7262253	
	20 cm x 20 cm	5	7264001	
	15 cm x 20 cm	10	7263001	



Tips

Askina® Transorbent® Border kan dusjes med

Askina® Transorbent® Sacrum



- › Klebekanten sikrer beskyttelse av huden mot kroppsvæsker
- › Dempende effekt fra skumlaget bidrar til å hindre trykksår



