



SÅRBEHANDLING

ASKINA® HEEL
SKUMBANDASJE

ASKINA® HEEL

ANATOMISK FORMET SKUMBANDASJE

Klar til bruk

Ingen ekstra fiksering

Dekker også ankelbenet

Trykkavlastende skum


God beskyttelse mot friksjon, og avlaster mot strekk mot huden

Askina® Heel er en anatomisk formet tolags skumbandasje uten klebelag. Det medfølger festebånd og to borrelåser, som gjør at bandasjen sitter godt på ved bevegelse. Borrelåsene gjør det også mulig å endre stilling på festebåndet.

Indikasjon:

Egnet for overflatiske og dype sår, og for moderat til svært væskende sår

- ▶ Trykksår grad 1-4
- ▶ Diabetiske fotsår
- ▶ Kirurgiske sår
- ▶ Første- og andregradsforbrenning

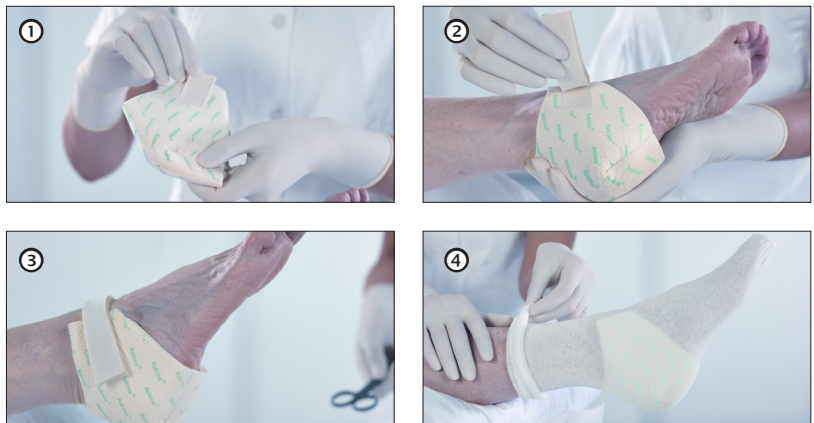

Hvordan feste Askina® Heel

- ① Fest borrelåsene på hver side av Askina® Heel
- ② Legg Askina® Heel rundt pasientens hæl og fest med båndet
- ③ Fest Askina® Heel slik at ankelen og hælen er dekket
- ④ Kan også festes med kompresjonsstrømpe

Tips

- ▶ Festebåndet kan åpnes og lukkes flere ganger. Borrelåsene kan også tas av og på.
- ▶ Såret kan lett inspiseres med Askina® Heel

	Størrelse	Pakn. str.	Art. nr.	NE vnr.
Askina® Heel	Overflate = 225 cm ²	10	7240110	229320