


Antimikrobiell myk silikon skumbandasje

- Rask og vedvarende antimikrobiell virkning
- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud. Absorberer effektivt
- God væskehåndtering

- Absorberer eksudat
- Former seg etter kroppen

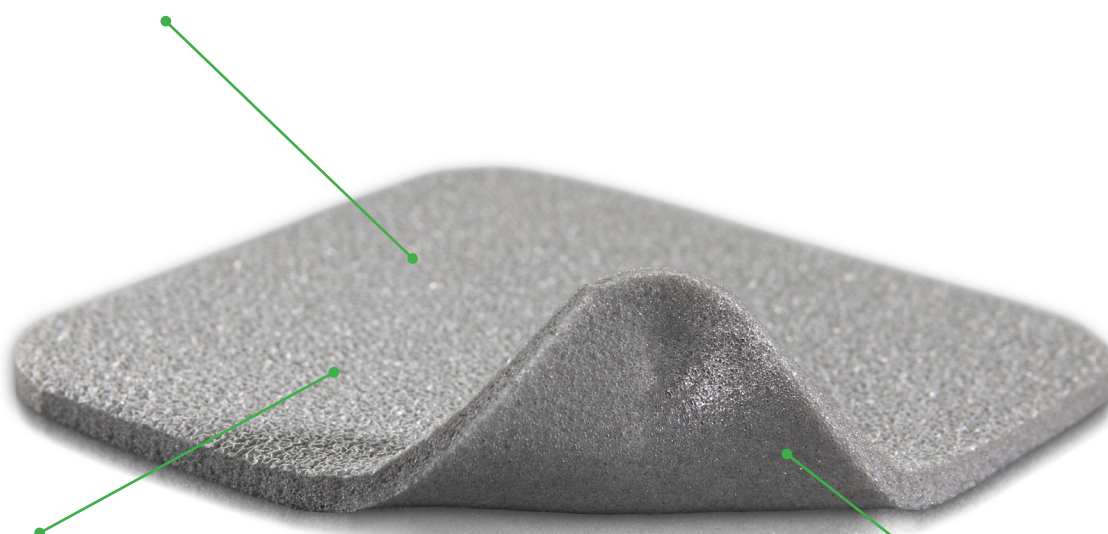

- Antimikrobiell virkning innen 30 minutter og opptil 7 dager


- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud
- Minimerer risikoen for maserasjon

* mikrober større enn 25 nm


Safetac® teknologi

Safetac er en unik og patentert hefteteknologi som minimerer smerte for pasienten og skade på såret. Safetac finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, slik som Mepilex Border Post-Op, Mepilex- familien, Mepitel, Mepiform og Mepitac.

For mer informasjon, se www.molnlycke.no

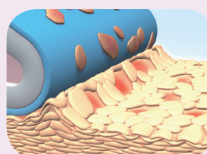


Tradisjonelle heftemidler hefter kun på toppen av porene og må derfor hefte hardere

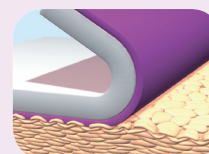


Safetac føyer seg etter hudens porer og forseglar sårkantene


Hvordan bruke Mepilex® Ag

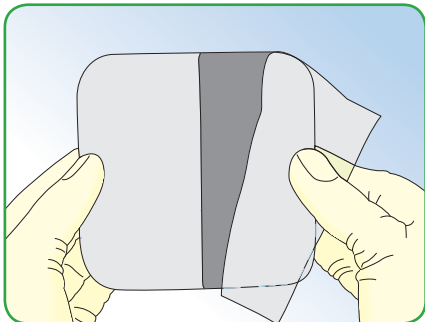

Rens sårområdet med saltvann eller vann avhengig av standard kliniske prosedyrer. Tørk huden rundt ordentlig.

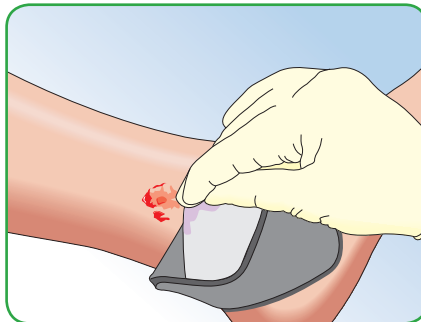

Fjern releasefilmen og appliser den heftende siden mot såret. Ikke strekk. Mepilex Ag bør overlape omkringliggende hud med minst 2 cm. Om nødvendig kan Mepilex Ag klippes og tilpasses ulike sårformer og plasseringer.

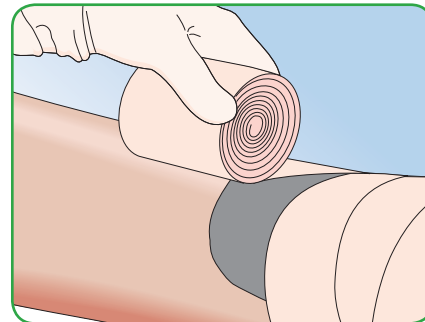

Fikser Mepilex Ag med en bandasje eller annen fiksering, som for eksempel Tubifast.

Slik fungerer Mepilex Ag

Mepilex Ag er en antimikrobiell myk silikon skumbandasje som absorberer eksudat og opprettholder et fuktig sårmiljø. Mepilex Ag inaktiverer sårrelaterte patogener innen 30 minutter med vedvarende effekt opptil 7 dager. Ved å redusere antall mikroorganismer kan Mepilex Ag også redusere odør.

Bruksområder

Mepilex Ag egner seg til en rekke lite til moderat væskende sår, som for eksempel legg- og fotsår, trykksår og delhud brannskader. Mepilex Ag kan brukes under kompresjonsbehandling.

Når bruke Mepilex Ag

Dersom såret er kritisk kolonisert eller infisert påvirkes sårhelingen. Mepilex Ag anbefales i den hensikt å raskt redusere bakteriefloraen. Bruk Mepilex Ag på sår som ikke heler normalt og viser tegn til infeksjon eller kritisk kolonisering.

Forbehold

- Må ikke brukes på pasienter som reagerer på sølv.
- Bruk ikke Mepilex Ag i løpet av strålebehandling eller utredninger som for eksempel, røntgen, ultralyd, diatermi eller MR.
- Bruk ikke Mepilex Ag i kombinasjon med oksiderende midler som hypokloride løsninger eller hydrogenperoxid.

Mepilex Ag sortiment

(er pakket i sterile enhetspakninger)

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
287110	10 × 10	5	70
287210	10 × 20	5	45
287310	15 × 15	5	35
287410	20 × 20	5	25
Mepilex Heel Ag			
388100	13 × 20	5	25
388300	15 × 22	5	30



For mer informasjon, se www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care
Postboks 6229, Etterstad
0603 Oslo
Telefon: 22 70 63 70
www.molnlycke.no
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac®, and Mepilex® are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

