




Selvheftende absorberende bandasje

Mepore er en luftgjennomslippelig, selvheftende bandasje ideell for lite- til moderat væskende sår. Det hudvennlige, vannbaserte og løsemiddelfrie polyakrylatlimet gir en skånsom og sikker fiksering.

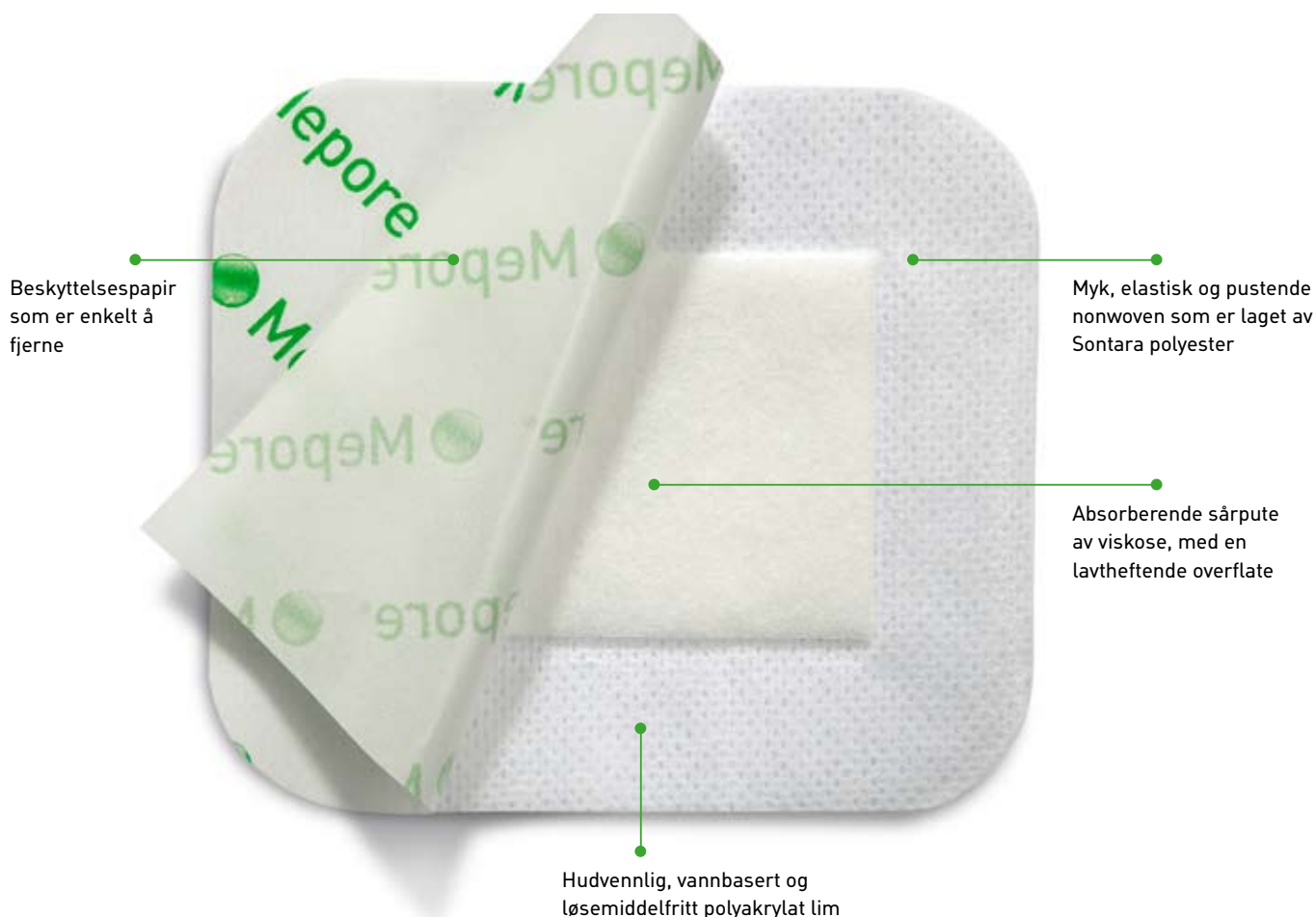

Slik fungerer Mepore

Den porøse strukturen i Sontara nonwovenmaterialet er luft- og vanddampgjennomslippelig. Materialet er føyeleg og former seg etter kroppen. Overflaten er ikke-absorberende og gir en barriere mot blod – og væskegjennomtrenging. Polyakrylatlimet er skånsomt mot huden, men gir likevel sikker fiksering. Sårputen absorberer moderate mengder med sårsekret og den lavheftende overflaten reduserer risikoen for at bandasjen sitter fast i såret. Beskyttelsespapiret gjør det enkelt å applisere sterilt.

Bruksområder

Mepore kan brukes på en rekke lite- til moderat væskende sår som for eksempel postoperative sår, kutt eller skrubbsår.

Hvordan bruke Mepore



Åpne pakningen. Ta ut bandasjen.



Ta tak i beskyttelsespapiret ved overlappingen. Dra de litt fra hverandre.



Legg bandasjen på huden uten å strekke og fjern resten av beskyttelsespapiret. Ikke strekk bandasjen ved applisering!

Skiftefrekvens

Skiftefrekvensen bestemmes av sårets tilstand. Når bandasjen skal fjernes, løsnes den i et hjørne og bandasjen rives av i hårvekstretningen.

Fordeler med Mepore

- Hudvennlig, vannbasert lim
- Lavheftende sårkontaktlag minimerer risikoen for at den sitter fast i såret
- Væskeavvisende bakside
- Beskyttelsespapir som er enkelt å fjerne ved applisering
- Luftgjennomslippelig, forebygger maserasjon og gir bedre komfort
- Runde hjørner for sikker fiksering (alle størrelser opp til 9 x 15 cm)

NB!

Mepore må ikke strekkes ved påføring, da dette kan gi mekaniske skader på frisk hud. Dette er ekstra viktig når bandasjen brukes over ledd.



Mepore er pakket i sterile enhetspakninger

Art. nr.	Str. i cm	Str. sårpute i cm	Antall i eske	Antall i kartong
670800	6 x 7	3 x 4	60	480
670870	6 x 7	3 x 4	10	140
670900	9 x 10	4,5 x 6	50	400
670970	9 x 10	4,5 x 6	5	10
671000	9 x 15	4,5 x 10	50	400
671070	9 x 15	4,5 x 10	5	70
671100	9 x 20	4,5 x 15	30	180
671170	9 x 20	4,5 x 15	5	70
671200	9 x 25	4,5 x 20	30	180
671300	9 x 30	4,5 x 25	30	270
671400	9 x 35	4,5 x 30	30	180

Mepore finnes også i sterile 2 og 5 meters ruller i dispenserresker

Art. nr.	Bredde i cm	Bredde sårpute i cm	Esker i kartong
5-meters ruller			
331980	4	1,5	24
332080	7	3	18
2-meters ruller			
331900	4	1,5	30
332000	7	3	21

Mölnlycke Health Care AS
Postboks 6229, Etterstad
0603 Oslo
Telefon: 22 70 63 70
www.molnlycke.com

