

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M Health Care

# Kun 2 trinn til en sikker, effektiv og behagelig kompresjon

3M™ Coban™  
2- lags kompresjonssystem



# 3M™ Coban™ 2

## 2- lags kompresjonssystem

3M Coban™ 2 kompresjonsbehandling er designet for å yte en sikker og dynamisk kompresjon ved behandling av venøs insuffisiens og venøse bensår.

Coban 2 består av to latexfrie bind. Bindene hefter til hverandre, hvilket minsker risikoen for at den sklir/forskyver seg, samtidig som den gir en tynn, lett, effektiv og vedvarende kompresjonsbehandling over tid, som kan sitte på i opptil 7 dager.

### Effektiv og vedvarende kompresjon

- Gir en effektiv og vedvarende kompresjon i opp til 7 dager, reduserer ødem og fremmer sårheling
- Danner en vedvarende uelastisk og rigid kompresjonsbandasje med høy "stiffness"
- Studier viser at kompresjonsbindet sklir/forskyver seg minimalt også etter 7 dagers behandling<sup>1</sup>

### Lett å legge

- Komfortlaget legges med minimalt overlapp og uten strekk.
- Kompresjonsbindet legges med full strekk teknikk og med 50% overlapp, hvilket minimerer risikoen for at kompresjonen legges ulikt.
- De to kohesive lagene hefter til hverandre og danner en vedvarende uelastisk og rigid kompresjonsbandasje med høy "stiffnes".
- Ikke behov for ekstra fiksering

### Tynn og behagelig kompresjon

- Kompresjonen blir sikker, effektiv og behagelig.
- Gir pasienten mulighet for å opprettholde sitt daglige aktivitetsnivå
- Minsker risikoen for at den sklir ned eller forskyver seg.



### Lag 1: Komfortlag

- Polyuretanskum med kohesivt lag
- Legges med skumsiden inn mot huden
- Absorberende, mykt og behagelig
- Holder kompresjonsbindet på plass
- Erstatte annen polstring/vatt
- Fordeler trykket jevnt

### Lag 2: Kompresjonslag

- Komplette kompresjonsbehandling
- Gir en effektiv, vedvarende kompresjon opptil 7 dager
- Hefter til det innerste komfortlaget og gir en tynn og lett profil

| 3M Varenr.: | Produkt                                       | Stk./eske | Eske/kartong |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|
| 2092        | Coban 2<br>2-lags kompresjonssystem, 2,5 cm   | 1 kit     | 8 kit        |
| 2094        | Coban 2<br>2-lags, kompresjonssystem 10 cm    | 1 kit     | 8 kit        |
| 2094XL      | Coban 2 XL<br>2-lags kompresjonssystem, 10 cm | 1 kit     | 8 kit        |
| 20096       | Coban 2<br>2-lags kompresjonssystem, 15 cm    | 1 kit     | 8 kit        |

### Indikasjon

Brukes til behandling av venøs insuffisiens og venøse bensår.

1. Hampton S., et al. Summary of five case studies on the treatment of venous leg ulcers with a new two layer compression system in a community setting. Data on File. 3M Health Care, May 2006. 2 Schnobrich E., et al. 7-Day In-use Assessment Of a Unique, Innovative Compression System. Poster presented at The 19th Annual Symposium on Advanced Wound Care & Medical Research, San Antonio, USA May 2006.



3M Norge AS  
Avd. Health Care  
Tærudgata 16, 2001 Lillestrøm,  
Postboks 300, 2004 Lillestrøm  
Tel: 0 63 84  
www.3M.no/helse

3M, "3M Science. Applied to Life.", og Coban er varemerker som tilhører 3M. Vennligst resirkuler. © 3M 2020. Alle rettigheter. 15605547\_NO20200612.