


Attends® Flex



Brukerveiledning


Forberedelse

1

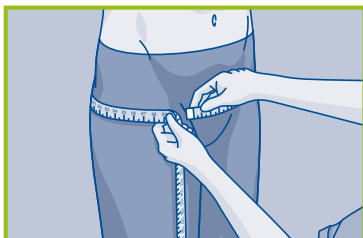


Mål hofte og livvidde, og velg det største målet for å finne riktig produktstørrelse.

2

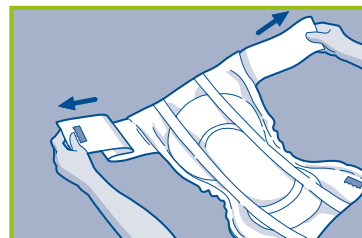

Brett bleien helt ut, brett ut beltene slik at du finner borrelåsene. Plasser delen med midjebeltet mot ryggen og pass på at beltene er brettet helt ut før bleien fikseres. Pass på at den hvite, myke delen av bleien vender inn mot huden.

3

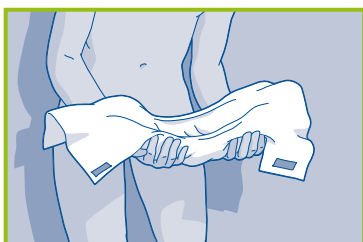

Brett og skålform bleien i lengderetningen for å sikre at lekkasjesperrene står opp.

Fiksering

4



Fest beltet rundt midjen med den blå borrelåsen for å holde bleien på plass.

5



Pass på at bleien er skålformet. Trekk bleien ned og fram mellom bena. Dra den godt opp i skrittet slik at det blir tett rundt bena og baken.

6



Glatt ut bleien og dra den ut og opp, og fest den så med den blå borrelåsen mot midjebeltet.

Tips og råd

Utvalg

- Velg riktig størrelse på Attends Flex ut fra hofte- og livviddemålet - velg det største målet.
- Velg absorpsjonsnivå ut fra mengden urin. For best mulig komfort og diskresjon bør du starte med et lavere nummer på absorpsjonsskalaen, f.eks. nivå 8, før du bytter til et produkt med høyere absorpsjonsnivå.
- Attends Flex kan være et godt alternativ for brukere som enkelt drar av seg en kroppsformet bleie.

Skifte

- Sjekk våtindikatoren. Dersom våtindikatoren har forsvunnet til mer enn halvparten (60%) av bleiens lengde bør man bytte. Hvis ikke kan produktet brukes lenger.
- Rene og tørre bleier kan brukes videre etter toalettbesøk.
- Ta av brukte bleier bakfra, hvis mulig.
- Rengjør huden i henhold til lokale rutiner. Rengjør forfra og bakover.
- Unngå oljebaserte kremer hvis mulig. Pudder bør heller ikke brukes, da dette kan påvirke bleiens absorpsjonssevne, og hindre at væsken blir absorbert. Huden kan da bli påvirket.

Fiksering

- Brett og skålform bleien i lengderetningen.
- Hold midjebeltet mot ryggen når bleien fikseres, da vet du at den er korrekt plassert.
- Bruk våtindikatoren for å sentrere bleien.
- Hvis bleien fikseres når brukeren ligger, følg samme prosedyre som for stående fiksering.

Lekkasje

- Sjekk at fiksering og vurdering av væskemengde er gjort riktig.
- Sjekk at du bruker riktig størrelse.
- Skift til høyere absorpsjon på bleien kun når du er sikker på at det ikke er problemer med fikseringen / størrelsen som fører til lekkasje.

Avfallshåndtering

- Rull sammen bleien og kast i henhold til lokal avfallshåndtering.
- Ikke kast bleien i toalettet.

Attends Flex



Attends Flex er testet og godkjent av proDERM, institutt for dermatologisk forskning.

For mer informasjon, besøk www.attends.no