

APO WIPE SURFACE CLEANING

ApoWIPE®

Det grønne alternativet

En prefuktet engangsklut av høy kvalitet til generell rengjøring av alle overflater som tåler vann. Løfter opp og fjerner bakterier, sopp og urenheter.

Effekt

Meget høy kvalitet på kluten, rengjør og tar opp bakterier effektivt. Test viser at ApoWIPE Surface Cleaning reduserer antall organismer testet med log 3-4, ca. 10 ganger mer enn klut, vann og såpe. ApoWipe Surface Cleaning inneholder kationisk detergent, som er effektive mot fett og støv. Kationisk betyr positivt ladet, som tiltrekker negativt ladede partikler, slik som mikroorganismer.

Enkel og effektiv rengjøring

ApoWipe Surface Cleaning klar til bruk. Engangsklut impregnert med ferdigblandet væske, som gjør det lett og effektivt å utføre rengjøring. Økt tilgjengelighet, enkel i bruk og tidsbesparende. pH 7, inneholder ikke alkohol eller andre desinfeksjonsmidler.



Unngå spredning av bakterier

Hygiene kan ha livsviktig betydning. Selv nyvaskede flergangskluter kan inneholde millioner av mikroorganismer. Disse kan i løpet av få minutter formere seg ytterligere. Dette problemet oppstår ikke med ApoWipe Surface Cleaning da det er et engangsprodukt som ikke skal gjenbrukes. ApoWipe Surface Cleaning samler effektivt urenheter og bakterier og hindrer spredning.

Enkel i bruk - 3 trinn

1. Åpne pakken og ta ut en ApoWipe Surface Cleaning. Hver pose er sikret med barrierelukk som sikrer fukttap
2. Rengjør overflaten med engangskluten. Hver klut er dosert med ferdigblandet vann og detergent
3. Engangskluten kastes etter bruk. Kan kastes i vanlig avfall

 PARTNERMED

Adresse: Tomteveien 33, 1618 Fredrikstad | Tlf.: +47 94 00 04 74 | E-post: info@partnermed.no

www.partnermed.no

APO WIPE SURFACE CLEANING

ApoWIPE®

Reduksjon av mikroorganismer

Tester viser at ApoWipe Surface Cleaning effektivt reduserer mikroorganismer og hindrer spredning.

Challenge Test

ApoWIPE Surface Cleaning 31.08.2011 Prepared by Elisabeth Marsing Danish Technological Institute , Wood Technology

Wipe	Organism	Applied CFU/15 cm2*	Surviving Reduction CFU/15 cm2 (mean of 9)	Reduction
ApoWIP E Surface Cleaning	E. coli	2.43 × 10 ⁴	22	1,22 × 10 ⁴
	Staph. aureus	9.90 × 10 ³	12	4,95 × 10 ³
	Candida albicans	5.40 × 10 ²	2	2,70 × 10 ²
Wipe wrung up in water	E. coli	2.43 × 10 ⁴	43	5.61 × 10 ²
	Staph. aureus	9.90 × 10 ³	76	1.30 × 10 ²
	Candida albicans	5.40 × 10 ²	11	5.12 × 10 ¹

*The surface area of each contact agar plate is 15 cm². The results demonstrate a reduction of the tested bacteria of 3-4 log-units by wiping with ApoWIP E Surface Cleaning.

Produktinformasjon

Innhold ApoWipe Surface Cleaning:

Løsning: Aqua (vann), Detergent (såpe), Diglycol 0,2%, Glycerin 0,1%

Materiale: Viskose 70%, Polyester 30%

Bestillingsinformasjon

APOWIPE SURFACE CLEANING Det grønne alternativet			
Art.nr.	Produkt beskrivelse	Antall pr. pakke	Antall pk pr kartong
021821	ApoWipe Surface Cleaning Regulær - Størrelse 30 x 22 cm	32 stk	12 pk
021826	ApoWipe Surface Cleaning Large - Størrelse 42 x 30 cm	24 stk	6 pk
021830	Stativ till ApoWipe Surface Cleaning Regulær + Large		

OBSERVER: Kast ikke brukte kluter i toalettet. Er ikke egnet til personlig hygiene.

 PARTNERMED

Adresse: Tomteveien 33, 1618 Fredrikstad | Tlf.: +47 94 00 04 74 | E-post: info@partnermed.no

www.partnermed.no