



ASKINA[®] DRESSIL

SKUMBANDASJER MED KLEBELAG AV SILIKON

Askina® DresSil | Askina® DresSil® Border | Askina® DresSil Sacrum

Skumbandasjer med klebelag av silikon



Behagelig og sikkert feste

Minimal traume ved bytte av bandasje

Høy absorpsjonskapasitet

Enkel å bruke

Enkel å tilpasse på områder som er vanskelige å bandasjere og på ujevne sår


Kan tas av og på igjen, kan kuttes til ønsket fasong

God pasientkomfort

Hypoallergen

Askina® DresSil er en selvklebende skumbandasje med et mykt klebelag av silikon på den ene siden og en dampgjennomtrengelig, vanntett film på den andre siden. Den kombinerer absorpsjonskapasiteten til skummet med den myke festeevnen til kontaktlaget av silikon.

Askina® DresSil struktur

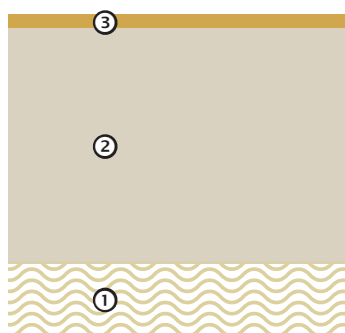

1. Beskyttende polyuretanfilm

Puster svært godt
Bakteriebarriere, vanntett

2. Hydrofilt skumlag


Mykt og formbart
Høy absorpsjonskapasitet

3. Klebelag av silikon

Sikkert feste til omkringliggende hud. Skånsom fjerning. Silikonlaget er perforert slik at sårveske passerer gjennom til skumlaget

Tips

- Askina® DresSil kan brukes under kompresjonsbandasjer
- Askina® DresSil kan også brukes som et hjelpemiddel til å forebygge hudskader
- Ved bruk av Askina® DresSil Border, kan pasienten dusje

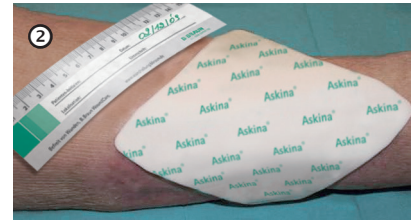

Indikasjoner

- Trykksår
- Venøse leggsår
- Arterielle leggsår
- Diabetiske fotsår
- Traumatiske sår
- Kirurgiske sår
- Første- og andregradsforbrenninger
- Donorsteder
- Hudflenger

① Sår i epitelialiseringsfasen

Formål: beskyttelse av nydannet vev og skånsom fjerning av bandasjer


② Optimal absorpsjon av eksudat

③ Såret er fullstendig epitelialisert etter 2 dager

④ Sår tilhelt med meget tilfredsstillende kosmetisk resultat

Askina® DresSil Border har den samme strukturen som Askina® DresSil, med en 1,5 cm bred klebekant i tillegg for ekstra sikkerhet ved bruk. Den er spesielt tilpasset områder som er vanskelig å bandasjere eller bevegelige områder (knær, albuer, hudfolder).

Askina® DresSil Border i bruk:

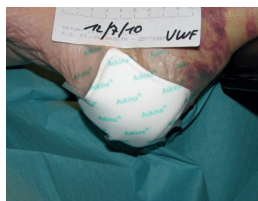

Askina® DresSil Border er også tilgjengelig i en utgave spesielt tilpasset sakrumområdet, Askina® DresSil Sacrum.

Tips

- Ideell for bruk med Askina® Calgitrol Paste på infiserte diabetiske fotsår



Askina® DresSil Border

Spesielt utviklet for diabetiske fotsår: Bandasje med en stor silikon klebekant og et sirkelrunt skumlag, som passer utmerket til små, vanskelige sår. Egnert til å dekke dype sår.



ASKINA® DRESSIL HEEL

Anatomisk formet skumbandasje med klebelag av silikon



Askina® DresSil Heel er en skumbandasje med klebelag av silikon, spesielt utformet for sår på hælen. Den er enkel å sette på og er selvklebende slik at det er unødvendig med ekstra fiksering.

Skumlaget har høy absorpsjons- og retensjonskapasitet. Mykt, formbart og trykkavlastende skum, som gir høy beskyttelse og avlaster trykk.

Indikasjoner

Moderat væskende kroniske og akutte sår på hælen:

- Trykksår
- Diabetiske fotsår
- Traumatiske sår
- Postoperative sår
- Hudrifter

Mykt klebelag av silikon

- Skånsom fjerning av bandasjen
- Kan tas av og settes på igjen, slik at sårinspeksjon kan foretas
- Dekker hele skumlaget

Skumlag

- Høy absorpsjonskapasitet
- Mykt og formbart
- Form som kan tilpasses

Stor klebekant

- Sikkerhet for økt pasientkomfort
- Vannavstøtende, kan dusjes med

Tips

- Askina® DresSil Heel kan også brukes forebyggende mot trykksår
- Beskytter hælen og ankelen
- Ikke behov for ytterligere fiksering



Hvordan feste Askina® DresSil Heel

- ① Fjern den øvre, transparente folien som beskytter de to "ørene".
- ② Legg foten på bandasjen
- ③ Dekk ankelen med "ørene" på bandasjen. Fjern den nedre, transparente folien.
- ④ Pakk inn og dekk hælen med den nedre delen av bandasjen.



Askina® DresSil	Størrelse komplett bandasje skumlag	Pakn.str./stk.	Art.nr.
	5 cm x 7 cm	10	5295710
	10 cm x 10 cm	10	5291010
	15 cm x 15 cm	10	5291510
	10 cm x 20 cm	10	5291210
	20 cm x 20 cm	5	5292005
Border	6 cm x 6 cm 3 cm Ø	10	5396610
	7,5 cm x 7,5 cm 4,5 cm x 4,5 cm	10	5397510
	10 cm x 10 cm 7 cm x 7 cm	10	5391010
	10 cm x 20 cm 7 cm x 17 cm	10	5391210
	15 cm x 15 cm 12 cm x 12 cm	10	5391510
	15 cm x 20 cm 12 cm x 17 cm	10	5395210
	20 cm x 20 cm 17 cm x 17 cm	5	5392005
Sacrum	16 cm x 17,5 cm 13 cm x 14,5 cm	5	5491605
	21 cm x 22 cm 18 cm x 19 cm	10	5492110
Heel	22 cm x 21,6 cm 18,9 x 18,5 cm	5	5592205

