



SÅRBEHANDLING

ASKINA® FOAM SORTIMENT

SKUMBANDASJER

ASKINA® FOAM | ASKINA® FOAM CAVITY | ASKINA® CAVITY STRIPS

SKUMBANDASJER



Utmerket absorpsjonskapasitet

Kostnadseffektivt: ingen behov for hyppige sårskift

Fremmer et fuktig sårmiljø

Kleber ikke til såret;
skånsomt bytte av bandasje

Visuell inspeksjon av væskeabsorpsjon

Etterlater ikke trykkmerker når det brukes ved
kompresjonsbehandlinger

Askina® Foam er svært sterk: enkel å fjerne uten å
etterlate partikler

Askina® Foam


er en tolags, klebefri skumbandasje som består av

- et mykt, hydrofilt lag av polyuretanskum, som puster, og som har en høy absorpsjonskapasitet (199 g / 100 cm²)
- en tynn, gjennomsiktig og beskyttende polyuretanfilm, som er ugjennomtrengelig for vann og er bakterieresistent.

Askina® Foam Cavity og Askina® Cavity Strips

er laget av det samme skummaterialet som Askina® Foam, uten polyuretanfilmen. Den spesielle formen, høye absorpsjonskapasiteten og styrke gjør at produktene er ideelle til å bandasjere dype, sterkt væskende sår, samt små, hule og dype sår (Askina® Cavity Strips).

Innovativ produktutforming

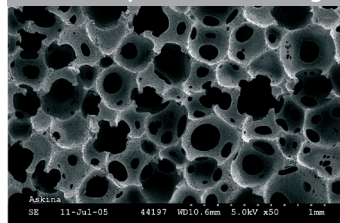

Den spesielle åpne cellestrukturen til Askina® Foam tillater rask og vertikal absorpsjon av væske, uten risiko for innvekst av i nydannet granulasjonsvev.

Indikasjoner Askina® Foam

Moderat til sterkt væskende sår


- Grad I-IV trykksår
- Venøse og arterielle leggsår
- Diabetiske fotsår
- Første- og andregradsforbrenninger
- Traumatiske sår

Indikasjoner Askina® Foam Cavity

- dype kavitetsår med store mengder eksudat

Indikasjoner Askina® Cavity Strips

- små kavitetsår, med moderate til store mengder eksudat
- sår sinus

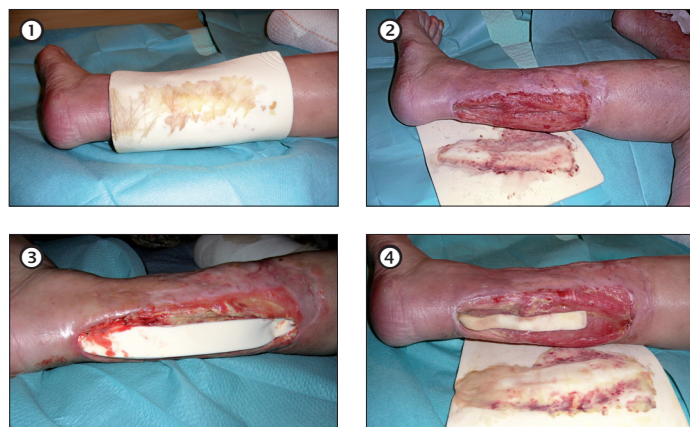

- ① Askina® Foam brukt på et sterkt væskende, flatt sår: visuell inspeksjon av væskeabsorpsjon
- ② Store mengder eksudat er absorbert: vertikal absorpsjon, uten maserasjon av sårkantene.
- ③ ④ Kombinert bruk av Askina® Foam Cavity, brukt til å fylle et dypt, sterkt væskende sår, og Askina® Foam, brukt som en absorberende tilleggsbandasje.



Tips

- Askina® Foam kan festes med tape eller bandasjer eller med kompresjonsbandasjer.
- Askina® Foam kan også brukes som sekundærbandasje for sterkt væskende sår, i kombinasjon med Askina® Sorb, eller som sekundærbandasje for dype sår, fylt med Askina® Sorb Rope eller Askina® Foam Cavity.

Askina® Foam	Størrelse	Pakn.str. /stk.	Art.nr.	NE vnr.
	5 cm x 7 cm	10	7240710	302308
	10 cm x 10 cm	10	7241010	229321
	10 cm x 20 cm	10	7241210	229322
	15 cm x 20 cm		7241510	
	20 cm x 20 cm	5	7242005	229323
Askina® Cavity	2,5 cm x 40 cm	10	7244010	229324
Askina® Cavity Strips	2,5 cm x 40 cm	10	7246010	229325

ASKINA® TRACHEA

SKUMBANDASJE



Askina® Trachea er en hydrofil skumbandasje med en sirkelrund åpning, som passer rundt en trakeostomitube, eller andre typer dren eller stomi.

Indikasjoner Askina® Trachea

Moderat til sterkt væskende sår

- Trakeostomituber
- Dren
- Stoma



Askina® Trachea	Størrelse	Pakn.str. / stk.	Art.nr.	NE vnr.
	9,5 cm x 8,5 cm	10	7248510	229326