



1: **Koble til probe** før du skrur på maskinen. Rød prikk indikerer korrekt innsetting av kontakt.

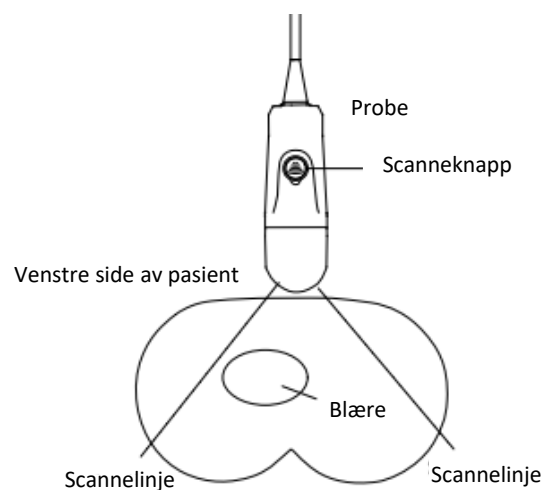
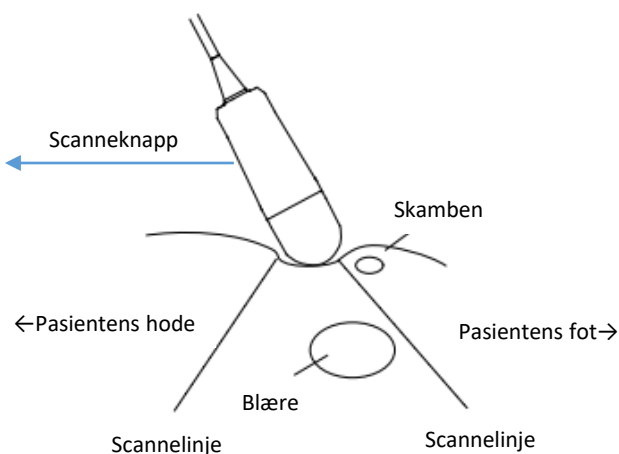


## 2: System setting





- Trykk på  for å skru på maskinen.
- På touch screen trykk  for systeminnstillinger
- Trykk  for redigering av pasientinformasjon

## 3: Forbered skanning av pasient

- Posisjoner pasient slik musklene er avslappet
- Tilfør ultralydgele (minst mulig luftbobler)
- Plasser proben retning haleben, skanneknapp mot hodet til pasient
- Trykk skan  på proben, eller  på skjerm. Skjermbilde av pasient vil da aktiviseres.





### 3: Forbered skanning av pasient - modus



Trykk på  for valg av modus:      Standard modus –   
Overvekt modus –   
Barn modus – 

Barnemodus er beregnet for aldersgruppen 6-12 år.

### 4: Skanning av pasient

Med proben i korrekt posisjon trykk  på proben, eller  på skjermen. Dette vil generere et skannerresultat som også viser blærevolum.

### 5: Tolkning

Etter gjennomført skanning viser maskinen 2 volumoppføringer (mL). Dette er forrige skan (øverst) og siste skan(nederst). Skanneren er 3D, tverrsnitt av blæren vises gjennom 12 bildeutsnitt. Se igjennom utsnittet ved hjelp av   knappene.