

SPRØYTEPUMPE

KORT BRUKERVEILEDNING CA-500



OPPSTART AV PUMPEN*:

1. Slå på pumpen ved å trykke **ON/OFF-tasten**.
2. Sett i sprøyten.
Vri sprøyteholder til venstre og tilpass til sprøyte.
Hold inne blank knapp på stempelholder for justering til sprøytetempel.
3. Velg sprøytetørrelse. Bekreft med **BOLUS/ENTER**.
4. Juster hastigheten om nødvendig med **PIL OPP/ PIL NED-tastene**.
5. Start pumpen ved å trykke **RUN/STOP**.

* Denne veiledningen er basert på brukermanualen. Vennligst les brukermanualen nøye før du tar i bruk pumpen, for mer informasjon.

SPRØYTEPUMPE

KORT BRUKERVEILEDNING CA-500

Etter få minutter med pågående infusjon vil pumpen gå i strømsparemodus. Brukeren må derfor trykke enten én av **PIL OPP/ PIL NED**-tastene eller ett trykk på **PCA**-knappen for aktivering av displayet, før man kan fortsette videre til ønsket handling.

ENDRE HASTIGHET:

1. Stopp infusjonen ved å trykke **RUN/STOP**.
2. Juster hastigheten med **PIL OPP/ PIL NED**-tastene.
3. Start pumpen ved å trykke **RUN/STOP**.

SPRØYTEBYTTE:

1. Stopp infusjonen ved å trykke **RUN/STOP**.
2. Slå av pumpen ved å trykke **ON/OFF**-tasten.
3. Følg prosedyre for «**Opstart av pumpen**» fra punkt 2.

BOLUS:

Med PCA-knapp:

Trykk to ganger på **PCA**-knappen for å aktivere display og gi forhåndsinnstilt bolusvolum.

Se Brukerhåndbok s. 16 for å endre innstilte verdier.

Evt. avbryt bolus med **RUN/STOP**.

På pumpe:

1. Hold inne **BOLUS/ENTER** i 2 sek.
2. Angi passord og bekreft med **RUN/STOP**.
3. Velg «2. BOLUS». Bekreft med **RUN/STOP**.
4. Angi ønsket bolusvolum med **PIL OPP/ PIL NED**.
5. Start bolus med **RUN/STOP**.