



- Mikrofiberteknologi
- Rask og myk debridering
- Bidrar til en ren sårbutikk og sår-
omgivelser
- Rengjør såret for belegg og rester
av døde celler
- Absorberer overflødig sårsekret
- Skånsom mot hel hud

Prontosan® Debridement Pad

MYK, MEKANISK FJERNING AV SLOUGH OG SÅRRESTER

Prontosan® Debridement Pad

MYK, MEKANISK FJERNING AV SLOUGH OG SÅRRESTER


PRODUKTBESKRIVELSE

Prontosan® Debridement Pad er utformet for å støtte sårbunns-optimalisering sammen med Prontosan® sårskyllevæske. Debrideringsputen består av en flate med mikrofiber, som debriderer, og et absorberende lag på baksiden for rask, effektiv og trygg debridering. Prontosan® Debridement Pad rengjør såret for belegg og rester av døde celler og absorberer overflødig sårsekret og urenheter. Hel hud bevares. Prontosan® Debridement Pad gir gode resultater, selv ved harde fibrinlag og nekrotisk vev, hvis såret på forhånd gjennomgår autolytisk behandling.

Prontosan® Debridement Pad er kun til engangsbruk.


HVORDAN FUNGERER MIKROFIBER?

Mikrofiber kan feste seg til mikroskopiske partikler – partikler som vanlige monofilamentfibre vil forbigå. Hvis det var synlig, ville man se at det oppstår en binding mellom mikrofibrene og partiklene. En debrideringspute består av millioner av mikrofiber, slik at den reelle bindingseffekten er dramatisk forstørret. Derfor kan mikrofiber materialet trekke til seg cellerester, sårsekret og urenheter.

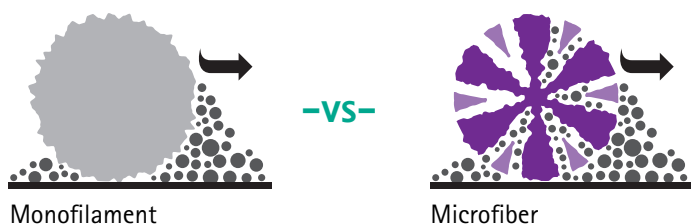

BRUKSANVISNING

Den myke, umerkede siden av debrideringsputen fuktes med 15–20 ml Prontosan® sårskyllevæske*. Følg eventuelle lokale retningslinjer. Utøv lett trykk og rens såret og såromgivelsene med den fuktede siden av debrideringsputen med sirkelbevegelser.

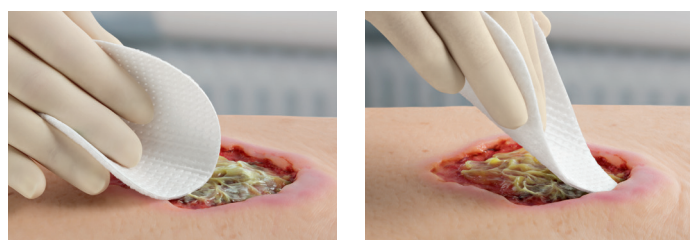

Etter debridering, anbefales det igjen å skylle såret grundig med Prontosan® sårskyllevæske og fortsette med relevant sårbehandling.

Pakningsstørrelser	Art. nr.
Pakning av 3 debrideringsputer	3908456
Pakning av 10 debrideringsputer	3908457

Sammensetning

Debrideringsputen er satt sammen av polyester og polypropylen mikrofibre med et støttende lag av polypropylen på baksiden.

EGENSKAPER

- Mikrofiberteknologien sørger for god rengjøring og debridering.
- Myk debridering, ingen vevsirritasjon.
- Unik dråpefasong, som gjør det mulig å debridere kaviteter og områder, som er vanskelige å nå.
- Blisterpakning for sikker og aseptisk fukting av debrideringsputen før bruk.

* Hvis Prontosan® sårskyllevæske ikke er tilgjengelig, kan debrideringsputen fuktes med saltvann eller destillert vann.