

Infusomat® compact^{plus}

HURTIGREFERANSE



KLARGJØRE OG PROGRAMMERE EN INFUSJON

1. Trykk  for å slå på pumpen.
2. Følg instruksjonene på displayet:
 - Åpne pumpedøren ved å trekke i dørhåndtaket.
 - Sett inn infusjonsslangen:
 - 1** Sett den grønne sikkerhetsklemmen inn i den grønne kontakten på pumpen.
Du hører en "klikke"-lyd.
 - 2** Klips den oransje klemmen fast i den oransje kontakten på pumpen.
 - 3** Skyv infusjonsslangen inn i luftsensoren til venstre og inn i sikkerhetsklemmen på pumpen til høyre.
 - 4** Lukk pumpedøren ved å trekke i dørhåndtaket.
3. Følg instruksjonene på displayet:
 - Åpne rulleklemmen og trykk  for å bekrefte.
 - Trykk  for å bekrefte infusjonsslangen "Universal".
4. Pumpen vil deretter kalibrere infusjonsslangen.
5. Koble til pasienten. Avhengig av den forrige behandlingen, kan pumpen være innstilt til å bruke infusjonshastighet eller medikamentliste.
6. Angi infusjonshastigheten ved bruk av .
7. Start infusjonen med .



ENDRE INFUSJONSPARAMETERE OG TASTATURLÅS

1. Stopp infusjonen med .
2. Endre infusjonshastigheten ved bruk av .
3. Start infusjonen med .

ALTERNATIV

1. Trykk på  for å endre infusjonshastigheten under en pågående infusjon.
2. Angi ny hastighet.
3. Bekreft den nye hastigheten med .

TASTATURLÅS

Låsing av tasturet beskytter pumpen mot utilsiktet bruk. Trykk på  og hold den inne noen sekunder for å låse tastaturet. Fremgangsmåten for å låse opp tastaturet er den samme. Tastaturlåsen er ikke aktivert for  og .

BYTTE INFUSJONSSSLANGE

1. Stopp pumpen med .
2. Koble fra pasienten.
3. Åpne pumpedøren ved å trekke i dørhåndtaket.
4. Ta ut infusjonsslangen og sett inn en ny (se avsnittet Klargjøre og programmere en infusjon).

TILBAKESTILLE INFUSJONSDATA

1. Stopp infusjonen med .
 2. Trykk  og velg Tilbakestill infusjonsdata. Trykk  for å bekrefte.
 3. Trykk  for å tilbakestille infusjonsdata etter avbryt med .
- Avhengig av den forrige behandlingen, kan pumpen være innstilt til å bruke infusjonshastighet eller medikamentliste.

ADMINISTRERE BOLUS

Det finnes tre ulike alternativer for å administrere bolus:

1. Manuell bolus:

- Trykk  Bolusskjermbildet vises.
- Trykk  igjen og hold den inne. Bolusinfusjon pågår så lenge tasten er trykket inn eller til maksimal varighet/dose er nådd.
- Skjermbildet Infundert bolus vises.
- Slipp  for å avslutte bolusen og gjenoppta infusjonen.

2. Bolus med forhåndsvalgt bolusvolum

- Trykk  . Bolusskjermbildet vises.
- Trykk  og angi ønsket bolusvolum.
- Trykk  for å starte administrasjon av bolusdosen.
- Trykk  for å stoppe bolusdosen når som helst.

3) Bolus med forhåndsvalgt bolusvolum og bolusvarighet:

- Trykk  . Bolusskjermbildet vises.
- Trykk  og angi ønsket bolusvolum.
- Trykk  for å bekrefte angitt bolusvolum..
- Velg bolusvarighet med  og trykk  . Bolushastigheten beregnes.
- Trykk  for å starte administrasjon av bolusdosen.
- Trykk  for å stoppe bolusdosen når som helst.

VELGE MEDIKAMENT/MEDIKAMENTDATABASE

1. Trykk  . Hovedmenyen vises.
2. Velg medikament og trykk  for å bekrefte.
3. Hvis det finnes mer enn én tilgjengelig profil: velg stasjon/profil og trykk  for å bekrefte.
4. Velg medikamentkategori og trykk .
5. Les informasjon som eventuelt står på skjermbildet Medikamentinfo og trykk  for å bekrefte.
6. Velg om nødvendig konsentrasjon og trykk .
7. Angi infusjonshastigheten og start infusjonen med .

Kontroller at riktig medikament er valgt.