



# Cavilon™

Skin Care Solutions

## Applikeringsguide for 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse



# Applikeringsguide 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse

Til forebygging og behandling av fuktrelaterte hudskader (MASD)

## Produkter du trenger:

- ▶ 3M™ Cavilon™ vaskelut for kroppsvask eller rent vann
- ▶ Myk vaskeklut som ikke loer
- ▶ 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse
- ▶ Hansker

## Finn frem produktene du skal bruke



Legg frem produktene på en ren flate.



Åpne pakken med Cavilon Advanced hudbeskyttelse og la applikatoren bli liggende i plastdelen av emballasjen.

## Plasser og vask pasienten



Plasser pasienten (slik at huden som skal vaskes eksponeres, men mest mulig tildekket for varme og integritet).



Rengjør huden nøye og forsiktig med et ph-balansert vaskemiddel som f.eks. 3M™ Cavilon™ vaskeklut eller rent vann.

## Bytt hansker



Bytt hansker.

**Hver applikator dekker et område  
på størrelse med et A4-ark.**

**Mer enn en applikator kan anvendes hvis  
nødvendig for å dekke et større område.**

Se vedlagte produktinformasjon  
for ytterligere informasjon om  
kontraindikasjoner, forsiktighetsregler  
og advarsler.

## Påføring av 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse



**6** Ta tak i applikatoren og plasser tommelen på spaken.

Hold applikatoren med skumsvampen ned og trykk inn spaken for å bryte den indre ampullen.

*Du kommer til å høre et knepp når ampullen brytes. Det er ikke nødvendig å fortsette å trykke inn spaken.*



**7** Hold applikatoren med skumsvampen vendt ned i ca. 10 sekunder for å la væsken renne ut i skumsvampen.

*Væsken renner ned ved hjelp av tyngdekraften, så du behøver ikke fortsette å trykke på spaken. Væsken kommer ikke til å gjennomfukte svampens ytterkanter.*



**8** Påfør Cavilon Advanced hudbeskyttelse ved å forsiktig stryke med skumsvampen over det såre området og huden rundt.

Anvend en jevn, sveipende bevegelse med minimal overlapping av produktet. Applikatoren kan anvendes i hvilken som helst retning.

*Det er ikke behov for å trykke applikatoren ned under påføring, da dette kan resultere i for mye fuktighet og væskeansamling.*



**9** Fortsett påføringen til hele området som skal behandles er dekket. Det er viktig å bruke produktet på all hud som er utsatt for fuktighet som avføring og / eller urin.



**10** La tørke i minst 30 sekunder eller til det føles tørt. Hvis et område mangler, vent til væsken er helt tørr før neste påføring.



**11** Dersom Cavilon Advanced hudbeskyttelse benyttes i en hudfold eller annet område med hud-mot-hud kontakt, sørg for at hudflatene holdes adskilt til væsken har tørket helt (ca. 30 sekunder). normal position.

## Tilleggsinformasjon



Påfør produktet 2 ganger pr. uke.

Vær oppmerksom på at 30 sekunder er minimum anbefalt tørketid. Tørketid kan variere fra pasient til pasient avhengig av hudtype, alvorlighetsgrad og årsak til hudskade. Tørketiden kan variere fra 30 sekunder og i noen tilfeller opptil 5 minutter eller lenger. Det er viktig at huden føles tørr, spesielt hvis pasienten / brukeren bruker beskyttelse mot bleie eller inkontinens.

**Filmen vil slites vekk og trenger ikke å fjernes.** Skulle du ønske å fjerne produktet kan du benytte en plasterfjerner som inneholder hexametyldisiloxan (HMDS) eller silikonpolymer.

# Oppdag hvordan 3M™ Cavityon™ Advanced hudbeskyttelse kan hjelpe deg med å stoppe, forhindre – og bidra til å fjerne – MASD.

For mer informasjon, besøk [3Mnorge.no/endIAD](http://3Mnorge.no/endIAD) eller kontakt din lokale 3M representant.

## Bestillingsinformasjon

3M™ Cavityon™ Advanced hudbeskyttelse

| 3M Art. no | Str.             | Stk./eske |
|------------|------------------|-----------|
| 5050G      | 2,7ml applikator | 20        |
| 5050G-4P   | 2,7ml applikator | 4         |



**3M Norge AS**  
Postboks 300, 2001 Lillestrøm  
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm  
Tel: 0 63 84  
[www.3M.no/helse](http://www.3M.no/helse)

OMG60179.

3M and Cavityon er varemerker som tilhører 3M Company.  
© 3M 2019. Alle rettigheter forbeholdes.

