


# Attends® Slip Regular



## Brukerveiledning


### Forberedelse

1

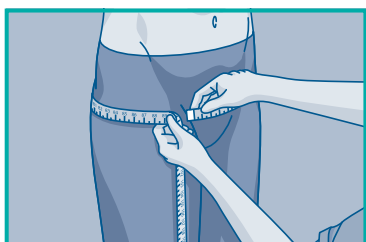


Mål hofte og livvidde, og velg det største målet for å sikre at du bruker riktig størrelse.

2

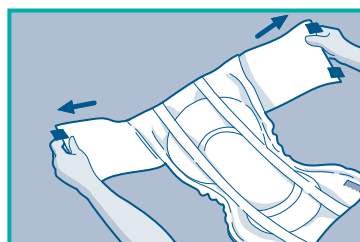

Brett produktet helt ut. Pass på at delen med festebeltene og fikseringstapen vender mot ryggen, og sjekk at festebeltene er dratt helt ut før bleien fikseres. Den myke overflaten på produktet skal vende inn mot huden.

3

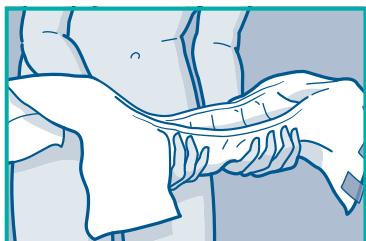

Skålform bleien forsiktig i lengderetningen for å sikre at lekkasjesperrene vender opp.

### Fiksering

4



Plasser bleien mellom bena slik at den sitter tett og komfortabelt i skrittet på brukeren. Bruk våtindikatoren som hjelp for å justere og sentrere bleien.

5



Dra festebeltene fremover og fest dem med fikseringstapen.

6



Fest de nederste tapene først i retning oppover, for en tett fiksering rundt lysken. Fest så de øvre tapene i retning nedover, for å sikre en god og komfortabel passform.

# Tips og råd

## Utvalg

- Vurder bruken av Attends kroppsformede bleier / bleiebukser før man prøver Slip - da disse gir en høyere diskresjon.
- Velg riktig Slip produkt ved å måle hofte- og livvidden, og velg det største målet.
- Velg absorpsjonsnivå på bleien ut fra mengden urin. For best mulig komfort og diskresjon bør du starte med et lavest mulig nummer på absorpsjonsskalaen før du bytter til et produkt med et høyere absorpsjonsnivå.
- Slip er en effektiv løsning når det er risiko for at brukeren selv tar av den kroppsformede bleien.

## Skifte

- Sjekk våtindikatoren. Hvis våtindikatoren har blitt utydelig på mer enn halvparten av bleiens lengde (60 %), eller hvis bleien inneholder avføring, bør man bytte. Hvis ikke kan produktet brukes lenger.
- Rene og tørre bleier kan brukes igjen etter toalettbesøk.
- Ikke fest fikseringstapen mot huden.
- Rengjør huden i henhold til lokale forskrifter. Rengjør forfra og bakover.
- Hvis mulig, unngå oljebaserte kremer. Pudder bør heller ikke brukes, da dette kan påvirke bleiens absorpsjonsevne og hindre at væsken blir absorbert. Huden kan da bli påvirket.

## Fiksering

- Sjekk at lekkasjesperrene rundt bena ligger på utsiden av bleien.
- Hold festetapen mot ryggen når bleien fikses, da vet du at den er vendt riktig vei.
- Når bleien festes, dra de nedre tapene oppover, og de øvre tapene nedover, for en god og komfortabel passform.
- Dersom bleien fikses når brukeren ligger skal man bruke samme fremgangsmåte som ved stående fiksering. For å sikre at bleien holdes på plass når du snur brukeren, kan du holde en hånd bak på bleien.
- Bruk våtindikatoren for å sentrere bleien.

## Lekkasje

- Sjekk at bleien sitter godt på.
- Sjekk at du har valgt riktig størrelse.
- Øk størrelsen/absorpsjonen på bleien kun når du er sikker på at det ikke er problemer med fikseringen som fører til lekkasje.

## Avfallshåndtering

- Rull bleien sammen og kast den i henhold til gjeldende regler for lokal avfallshåndtering.
- Ikke kast bleien i toalettet.

**Attends® Slip** Regular



Attends Slip Regular er testet og godkjent for hudvennlighet av proDERM, Institut for dermatologisk forskning.

For mer informasjon, besøk [www.attends.no](http://www.attends.no)