




curos™

for desinfeksjon av kateterkoblinger

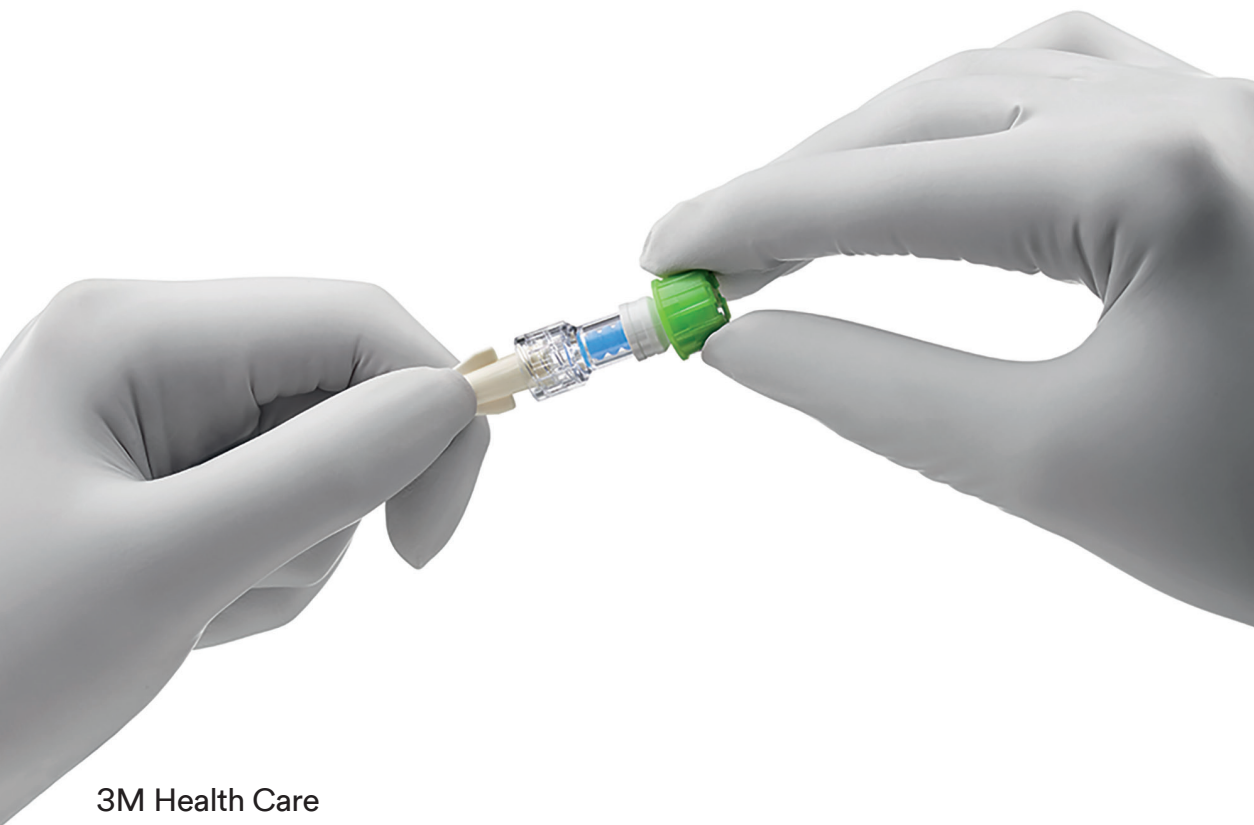

3M Health Care

3M™ Curo s™

Desinfeksjonshette for nåleløse koblinger


3M™ Curo s™ Desinfeksjonshette desinfiserer og beskytter nåleløse koblinger, og reduserer risikoen for intraluminal smitte. Desinfiserer på 1 minutt - holder tilgangen ren i 7 dager.



Alle pasienter, alle tilganger, alltid!



Fjern
beskyttelsesfilmen på
3M™ Curot™
desinfeksjonshette

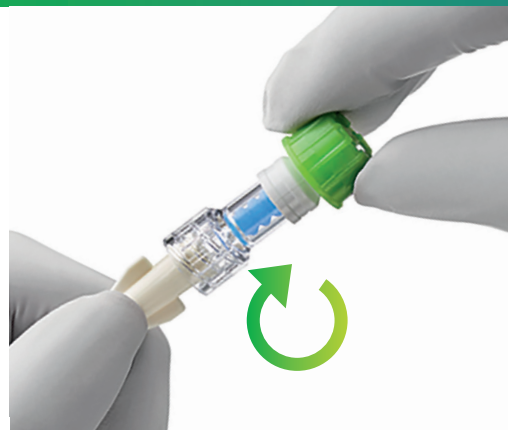

Skr
3M™ Curot™
desinfeksjonshette
på den nåleløse koblingen

- Desinfiserer på et (1) minutt, ved hjelp av skum fuktet med 70% isopropylalkohol (IPA).
- Holder tilgangen ren i 7 dager.
- Leveres enkeltpakket og i strimler som kan henges opp ved pasienten.
- Klar grønnfarget hette, gir rask visuell bekreftelse på desinfeksjon av koblingen.
- Dersom den nåleløse koblingen er veldig tilsmusset, følg lokale retningslinjer for rengjøring før påføring av 3M™ Curot™ desinfeksjonshette.
- Ikke bruk 3M™ Curot™ desinfeksjonshette dersom beskyttelsesfilmen er ødelagt, punktert eller om skummet ser ut til å være tørt. Sett alltid en ny 3M™ Curot™ desinfeksjonshette på koblingen etter bruk.
- Kast alltid 3M™ Curot™ desinfeksjonshette etter bruk.

Skal kun anvendes på nåleløse koblinger.

3M™ Curot™ desinfeksjonshette for nåleløse koblinger			Antall/eske	Esker/ kartong
	CFF1-270R	3M™ Curot™ desinfeksjonshette for nåleløse koblinger	270	20
	CFF10-250R	3M™ Curot™ desinfeksjonshette-strimmel for nåleløse koblinger	25 strimler, 10 per strimmel	20

3M
CUROS™
for desinfeksjon av kateterkoblinger

3M Norge AS
Avd. Health Care
Postboks 300, 2001 Lillestrøm
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Telefon 0 63 84
www.3m.no/helse

3M og Curot er varemerker som tilhører 3M.
Vennligst resirkuler. Trykket i Norge. © 3M 2018.
Alle rettigheter. PL531269-1NO180312



Green means clean.

STERIL	R
--------	---

Aktiv ingrediens: 70% isopropylalkohol (IPA).
Kun til engangsbruk. Produktet inneholder ikke naturgummitateks eller myknere Diethylexylphthalate (DEHP). Se bruksanvisning for indikasjon, advarsler og øvrig produktinformasjon.