



MYK SILIKON SÅRKONTAKTLAG

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning^{1,2}
- Kan ligge på såret i flere dager^{3,4,5} og gir kostnadseffektiv^{5,6}- og uforstyrret sårtilheling

Safetac®-lag (myk silikon)

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning⁷
- Minimerer risikoen for maserasjon⁸

Releasefilm

- Beskytter Safetac laget

Polyamidnett

- Muliggjør applisering av topisk behandling, som for eksempel salver
- Transparent




Safetac® teknologi


Safetac® teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.™

Safetac er en patentert hefteteknologi som minimerer skade på såret og smerte for pasienten. Safetac teknologi finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex®-familien, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

For mer informasjon se www.safetac.com

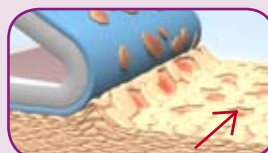


Hudstripping ved bruk av tradisjonelle heftemidler

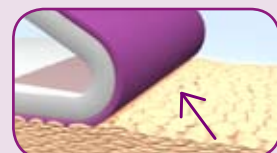


Ingen hudstripping ved bruk av Safetac


Hvordan bruke Mepitel®

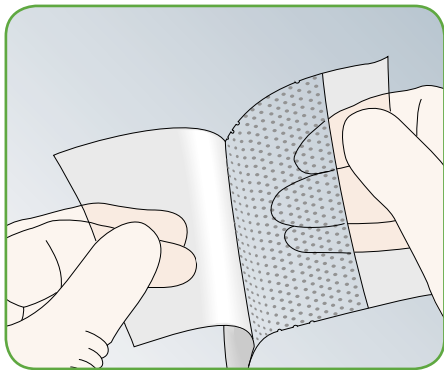

Rens sårområdet. Fjern releasefilmen.

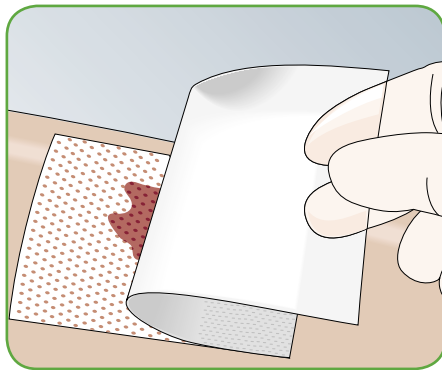

Appliser Mepitel på såret.

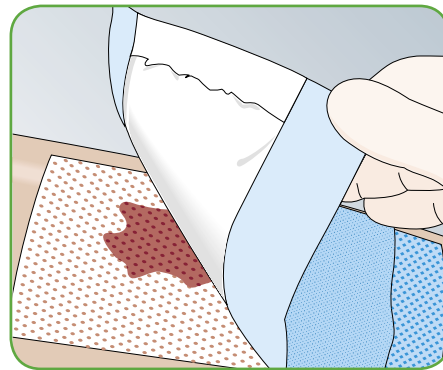

Appliser en sekundær absorberende bandasje.

Slik fungerer Mepitel

Mepitel kan ligge på såret i flere dager^{3,4,5} avhengig av sårets tilstand. Den åpne strukturen gjør at eksudat kan passere ut i en sekundær absorberende bandasje. Mepitel hindrer således den sekundære bandasjen i å feste seg i såret og minimerer dermed skade og smerte ved bandasjeskift. Dette medfører mindre ubehag for pasienten som igjen bidrar til uforstyrret sårtilheling.

Fordeler med Mepitel

- Fester ikke til en fuktig såroverflate, men skånsomt til omkringliggende hud
- Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift
- Kan ligge på i flere dager og sikrer uforstyrret sårtilheling
- Tillater færre bandasjeskift
- Minimerer risikoen for maserasjon
- Hindrer nydannet vev i å bli skadet
- Gjennomsiktighet gjør det lett å inspisere ved applisering og ved bandasjebruk
- Former seg etter kroppen og gir god komfort

Bruksområder

Mepitel egner seg til en rekke typer sår som for eksempel, hudflenger, hudavskrapninger, kirurgiske snitt, annengrads forbrenninger, blemmer, fiksering av hudtransplantat, diabetiske fotsår og venøse- og arterielle sår.

Advarsler

Ved bruk av Mepitel på brannskader behandlet med meshedgrafts eller etter ansiktsoperasjoner kan avtrykk (merker) oppstå dersom Mepitel ikke brukes riktig.

Forholdsregler

- Såret må sjekkes for tegn til infeksjon i henhold til klinisk praksis. Rådfør deg med profesjonelt helsepersonell for en passende medisinsk behandling.
- Ved bruk av Mepitel på brannskader behandlet med meshedgrafts: unngå å legge unødvendig press på bandasjen. Mepitel brukt etter ansiktsoperasjoner: unngå å legge press på bandasjen, reposisjoner bandasjen annenhver dag.
- På blødende sår eller svært væskende sår bør Mepitel dekkes med en fuktig absorberende bandasje.
- Når Mepitel brukes til fiksering av hudflenger og beskyttelse av blemmer, bør ikke bandasjen skiftes før etter fem dager.

Hva er Safetac teknologi?

Safetac er en patentert teknologi for skånsom men sikker fiksering med myk silikon. Safetac minimerer skade og smerte på såret og omkringliggende hud ved bandasjeskift.



MEPITEL Sortiment

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
290510	5 x 7,5	5	10 60
290560	5 x 7,5	2	16/128
290710	7,5 x 10	10	50
291010	10 x 18	10	50
292005	20 x 30	5	30

Mepitel er pakket i sterile enhetspakninger