

Produktfaktablad

TENA Flex

TENA Flex er en svært effektivt beltebleie som tilpasses brukerens livvidde. Bleien er enkel å skifte, og derfor arbeidsbesparende for personalet. TENA Flex finnes i tre forskjellige absorpsjonsnivåer; Plus, Super og Maxi. Produktet leveres i flere livvidder, fra 60 cm til 155 cm, for optimal passform og lekkasjesikkerhet.

- Unikt elastisk hoftebelte (ComfiStrech™)
- Fikseres med borrelås
- Kan enkelt justeres og flere ganger
- Spredningssjiktet FeelDry™ holder huden tørr
- Midjeelastikk foran og bak for å gi sikker passform
- LekkasjebARRIERE for høy sikkerhet
- Diskret våtindikator
- Odeur Neutralizer


Produktegenskaper

TENA Flex har ett unikt elastisk hoftebelte (ComfiStrech™) som sammen med midjeelastikk både foran og bak gjør at produktet beholder sin sikre passform i bruk. Hoftebeltet er mykt og komfortabelt.

TENA Flex er en lekkasjesikker beskyttelse. Doble absorberende kjerner med superabsorbenter sammen med spredningssjiktet FeelDry™ gjør at urinen spres og absorberes effektivt. TENA Flex holdes tørr, noe som holder huden sunn. Produktets kroppsnære passform, benelastikk og myke væskeavvisende lekkasjebARRIERE er med på å forhindre lekkasje.

TENA Flex har et luftig anatomisk design og tekstillignende materiale for høy komfort og sunn hud. Fikseres med borrelås direkte på beltet og kan enkelt justeres og tas av og på flere ganger

TENA Flex er diskret. Samtlige TENA Flex har Odour Neutralizer, det vil si superabsorbenter som kapsler inn urinen og har en nøytraliserende effekt på uønsket lukt.

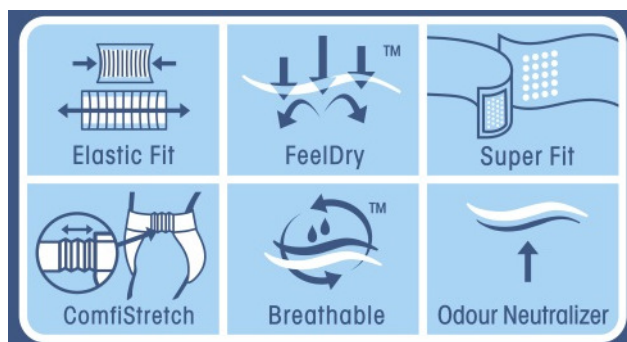

¹ TENA Flex i størrelse XL har en ekstra borrelås i stede for midjeelastikk foran, for ekstra sikker passform.

Produktfaktablad

TENA Flex

NAF nr.	Art. Nr	Navn	Livvidde
903953	723130	TENA Flex Plus Small	60-85 cm
921618	723230	TENA Flex Plus Medium	70-105 cm
913716	723330	TENA Flex Plus Large	80-125 cm
	723430	TENA Flex Plus X-large	105-155 cm
839686	724130	TENA Flex Super Small	60-85 cm
816980	724230	TENA Flex Super Medium	70-105 cm
899263	724330	TENA Flex Super Large	80-125 cm
868296	724430	TENA Flex Super X-Large	105-155 cm
922950	725122	TENA Flex Maxi Small	60-85 cm
898868	725222	TENA Flex Maxi Medium	70-105 cm
867956	725322	TENA Flex Maxi Large	80-125 cm
921675	725421	TENA Flex Maxi X-Large	105-155 cm
	725220	TENA Flex Ultima Medium	70-105 cm
	725320	TENA Flex Ultima Large	80-125 cm
	720000	TENA Flex belteforlenger	29 cm

Bytte stående



TENA Flex absorberer like bra begge veier på grunn av symmetrisk formet kjerne

Bytte liggende



Enkel fiksering både forfra og bakfra for diskresjon og verdighet samt ergonomisk arbeidsstilling for den som fikserer.



TENA Flex

Produktfaktablad

TENA Flex

Overflate innside

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden

Overflate utside

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Økt bekvemmlighet og diskresjon (knitrefritt)

Innslipp- og spredningsmateriale

Materiale: Polyethylene, High loft nonwoven

Funksjon: Raskt innslipp og effektiv spredning av urin, hindrer at urin trenger tilbake til yttersiden

ABSORBSJONSKJERNE, øvre

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde tilbake væsken

Absorbsjonskjerne, under

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde tilbake væsken

Superabsorbent

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Absorbere og holde tilbake væsken samt til en viss grad nøytralisere uønsket lukt

Sperresjikt

Materiale: Pustende polyeten

Funksjon: Forhindre lekkasje, tillate fuktig luft å ventileres ut og på den måten opprettholde godt hudmiljø og komfort

Hoftebelte

Materiale: Non-woven

Funksjon: Fikseringsflate for borrelåsen, mykt og pustende for huden.

Elastikk i hoftebelte

Materiale: SBS og Non-woven

Funksjon: Følge kroppens bevegelser og holde bleien bekvemt på plass.

Midjeelastikk

Materiale: Polyeten og SBS

Funksjon: Holde bleien bekvemt på plass

Benelastikk

Materiale: Syntetiske polyeter-polyuretantråder (Spandex)

Funksjon: Bekvemmelighet og forhindre lekkasjer

Barriæreelastik

Materiale: Elastan

Funksjon: Forhindre sidelekkasjer av urin og avføring

Ingen TENA Pants produkter inneholder: Naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftemner, hudpleiemidler eller parfyme. Produktene kan brukes inntil tre år etter tilvirknings-dato. Lagres under normale forhold og må ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller væte.

