

NB! Viktig melding til deg som bruker QuikRead go.



Reagenskorken må være satt på ordentlig.

Når korken er satt på riktig synes **ingen** gjenger. Observer at den indre fargede delen **ikke** skal trykkes ned.

Om reagenskorken ikke sitter godt nok på, kan den løsne under analysen og forårsake driftsstop.



Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no / Tlf. +47 66 78 56 30

Epost for bestillinger: ordre@aidian.no

www.aidian.no / www.quikread.com