



SÅRBEHANDLING

ASKINA[®] DERM
POLYURETAN FILMBANDASJE

ASKINA® DERM

POLYURETAN FILMBANDASJE

Innovativ påføringsteknikk

Opprettholder et fuktig sårmiljø

Film med god transport av fuktighet

Festemiddel som kleber lite: fjernes enkelt

Ugjennomtrengelig for væsker og bakterier

Gjennomsiktig: tillater visuell inspeksjon av såret

Forebygger ødeleggelse av huden som følge av friksjon eller kontinuerlig eksponering for fuktighet


Kan brukes til å fiksure IV-katetere

Kan brukes som sekundærbandasje


Indikasjoner

Beskyttelse av ikke-væskende sår som:

- Grad 1 trykksår
- Donorsteder
- Mindre skrubbsår
- Førstegradsforbrenninger
- Kirurgiske sår
- Flenger

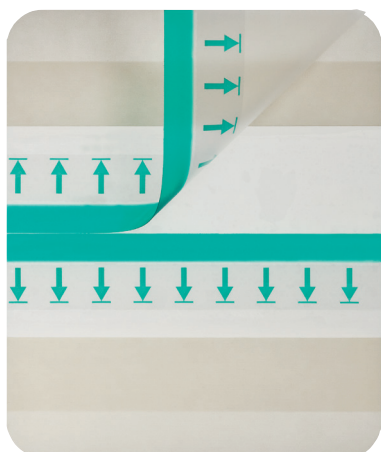

① Fjern det trykte papiret fra limsiden på bandasjen

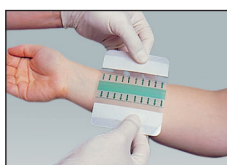

② Plasser bandasjen over såret med flippene på limsiden pekende ned mot såret. Trykk forsiktig på bandasjen når den fester seg til såret.



③ Trekk langsomt av flippene og legg forsiktig på resten av bandasjen på den tørre huden rundt såret.



④ Fjern plastlaget som dekker bandasjen ved å trekke i pilenes retning.

Askina® Derm er en steril, gjennomsiktig polyuretan filmbandasje. Den er semipermeabel og egnet til beskyttelse av nydannet hud. Hindrer skorpedannelse.

Askina® Derm	Strørrelse	Pakn.str. / stk.	Art.nr.	NE vnr.
	6 cm x 7 cm	10	F72032	
	6 cm x 7 cm	100	F72033	96760
	10 cm x 12 cm	5	F72034	
	10 cm x 12 cm	10	F72035	
	10 cm x 12 cm	50	F72036	96781
	15 cm x 20 cm	10	F72038	96786