



SÅRBEHANDLING

ASKINA® CALGITROL® AG | ASKINA® CALGITROL® THIN
IONISERT SØLVALGINATBANDASJE

ASKINA® CALGITROL® AG | ASKINA® CALGITROL® THIN

SØLVALGINATBANDASJER



Meget effektiv

Aktivering unødvendig: klar til bruk

Aktiv umiddelbart – betydelig reduksjon av bakterier innen de første 30 minuttene

Aktiv mot et bredt spekter av mikroorganismer, inkl. MRSA

Vedvarende antimikrobiell effekt i opp til 7 dager

Skånsom fjerning


Gir ikke misfarging

Askina® Calgitrol® patentert alginatmatrise kombinerer calciumalginat og sølvalginat med 10 % bundet vann. I kontakt med eksudat, danner alginatmatrisen en myk gel, som frigjør sølvioner.

Askina® Calgitrol® Ag er en teknologisk avansert sårbandasje som kombinerer den antibakterielle effekten til det ioniserte sølvet med absorpsjonsevnen til calciumalginat og polyuretanskum.





Askina® Calgitrol® THIN er et tynt lag av sølvalginatmatrise. Myk og komfortabel og godt egnet til dype sår og sår som er vanskelig å bandasjere. Den bør brukes sammen med en absorberende sekundærbandasje, som f.eks. Askina® Foam.

Virkningsmekanismen til
Askina® Calgitrol® Ag
bandasjer

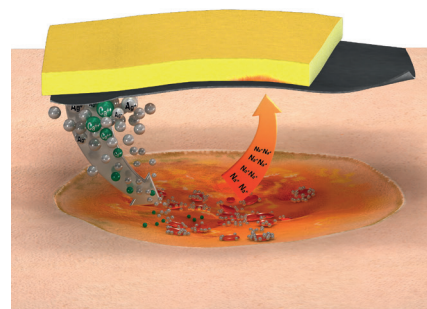

Tips

- Legg på bandasjen med sølvmatrisen (mørk grå overflate) ned mot sårflaten.
- Fest med en passende bandasje/fiksering
- Etter at bandasjen er fjernet, rens såret grundig for å fjerne rester fra Askina® Calgitrol® Ag / Askina® Calgitrol® THIN

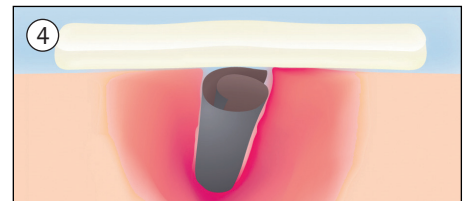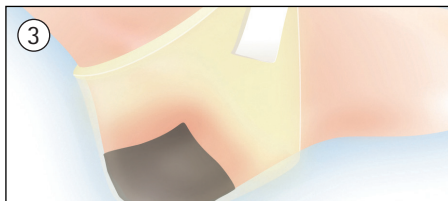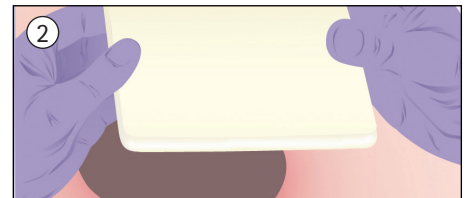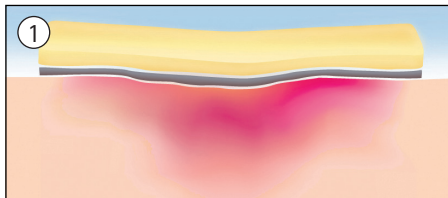


Indikasjoner

Infiserte eller kritisk koloniserte, moderat til kraftig væskende sår:

- Grad I-IV trykksår
- Venøse og arterielle leggsår
- Diabetiske fotsår
- Andregradsforbrenninger
- Traumatiske sår
- Donorsteder

Eksempler på bruk

- ① Bruk av Askina® Calgitrol® Ag på flate sår
- ② Askina® Calgitrol® THIN brukt på et flatt sår med ujevn overflate, med Askina® Foam som sekundærbandasje
- ③ Bruk av Askina® Calgitrol® THIN på hælssår, i kombinasjon med Askina® Heel
- ④ Askina® Calgitrol® THIN er også egnet til dype sår

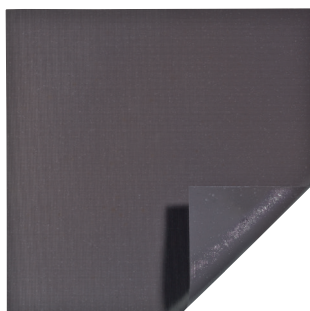

	Størrelse	Pakn. str. / stk.	Art. nr.	NE vnr.
Askina® Calgitrol® Ag	10 cm x 10 cm	10	6211010	96864
	15 cm x 15 cm	10	6211510	96865
	20 cm x 20 cm	10	6212010	96867
Askina® Calgitrol® THIN	5 cm x 5 cm	10	6205510	93617
	10 cm x 10 cm	10	6201010	93620
	10 cm x 20 cm	10	6202110	
	20 cm x 20 cm	10	6202010	
	20 cm x 40 cm	3	6202403	

