


# Attends® Cover-Dri




## Brukerveiledning

### Forberedelser

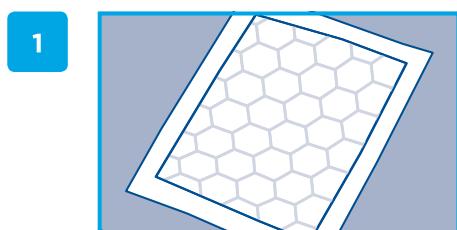


1 Brett produktet helt ut og plasser den vanntette baskiden mot sengen, og de hvite absorberende putene vender opp mot huden.

### Tilpasning

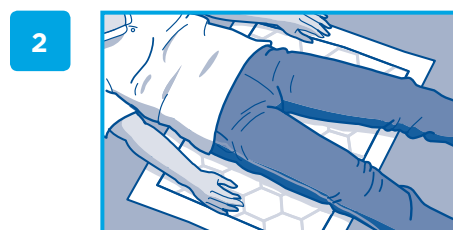


2 Plasser underlaget under brukeren.


### Skifte

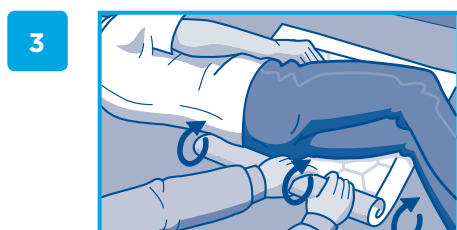


3 Legg brukeren på siden og rull sammen det brukte underlaget inn mot brukers ryg.

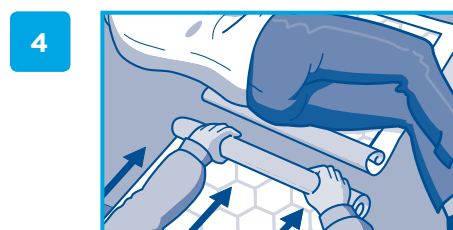

4 Rull ut det nye underlaget og plasser det mot brukers ryg.

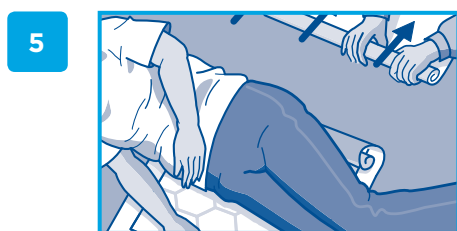

5 Vend brukeren tilbake på underlaget, og pass på at beskyttelsen ligger flatt på sengen. Fjern den brukte beskyttelsen.

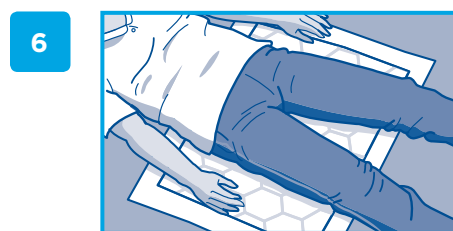

6 Legg brukeren i sin vanlige stilling.

## Tips og råd

### Utvalg

- Velg riktig produktstørrelse og absorpsjon ut fra en individuell klinisk vurdering.

### Lekkasje

- Sjekk at du bruker riktig størrelse og riktig absorpsjonsnivå på underlaget for den spesifikke situasjonen.

### Avfallshåndtering

- Rull sammen produktet og kast i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i toalettet.



Attends Cover-Dri er testet og godkjent av proDERM, institutt for dermatologisk forskning.

For mer informasjon, besøk [www.attends.no](http://www.attends.no)