



B. BRAUN
SÅRBEHANDLING

Askina[®] SilNet

MYKT SÅRKONTAKTLAG AV SILIKON

ASKINA® SILNET

MYKT SÅRKONTAKTLAG AV SILIKON



Ikke-klebende: beskytter skjørt granulasjonsvev

Skånsom bytte av bandasje

Mykt og formbart

Forenlig med topiske behandlinger

Tillater sårveske å trenge gjennom bandasjen

Askina® SilNet er laget av formbart ikke-vevet materiale, dekket på begge sider med myk silikon.


Den brukes som et sårkontaktlag, som formes etter sårets overflate og festes sikkert til huden rundt såret.

Sårflaten beskyttes mot mekanisk oppriving ved fjerning av bandasje og minimerer traumer ved bandasjeskift.

Tips

Askina® SilNet kan brukes i kombinasjon med sekundærbandasjer

- Askina® Foam
- Askina® Heel
- Askina® Pad

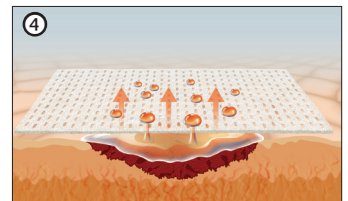



Indikasjoner

- Kutt og skrubbsår
- Hudavriving
- Traumatiske sår
- Første- og andregradsforbrenninger
- Feste av hudtransplantat
- Donorsteder
- Kirurgiske sår
- Flenger

- ① Fjern den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen
- ② Legg Askina® SilNet på sårflaten og fjern forsiktig den blå beskyttelsesfilmen.
- ③ Dekk med en egnet absorberende sekundærbandasje, som f.eks. Askina® Foam.
- ④ Virkningsmåte Askina® SilNet: den porøse strukturen tillater vertikal transport av sårveske inn i sekundærbandasjen, uten risiko for oppbløting.

Mykt klebelag av silikon

Askina® SilNet er laget av myk silikon, som gir et sikkert feste uten avriving av epiderme celler når den fjernes, til forskjell fra tradisjonell akrylfestemiddel.

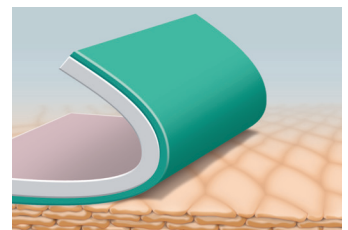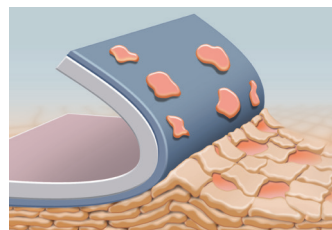

Askina® SilNet	Størrelse	Pakn.str. / stk.	Art.nr.	NE vnr.
	5 cm x 7,5 cm	10	5195710	99993
	10 cm x 7,5 cm	10	5197510	99466
	10 cm x 18 cm	10	5191810	99467
	20 cm x 30 cm	5	5192305	99469

