

Stell av permanente urinkateter med Uro-Tainer® skyllevæske

Produkt oversikt og bruk

URO-TAINER®		Virkestoff	Indikasjon	Bruk	Refusjon	Art. nr	Varenummer	Pakn. str
Uro-Tainer® NaCl 9 mg/ml		NaCl 9 mg/ml	- Mekanisk skylld av urinkateter - Brukes ved plakkdannelse	1-2 ganger daglig ved behov	Er godkjent for refusjon	FB99833	974014	10
Uro-Tainer® Suby-G		3,23 % sitronsyre	- Motvirker hyppig kateterskift og kateter som går tett - Spesielt egnet til å forebygge krystallisering - Løser opp avleiringer på kateter og krystaller i urinkateter - Skal virke i pasientens blære i minimum 5 minutter	2-3 ganger per uke Maks 2 ganger per dag La virke i minimum 5 min	Er godkjent for refusjon	FB99839	974022	10
Uro-Tainer® Solutio R		6 % Sitronsyre	- Brukes der Suby-G ikke gir tilfredstillende resultat - Brukes ved blokkert kateter og krystallisering «Akuttløsning» ved tett kateter - Det anbefales å gå over til Suby-G etter oppnådd resultat - Skal virke i pasientens blære i minimum 5 minutter	2-3 ganger per uke Maks 2 ganger per dag La virke i minimum 5 min	Ikke godkjent for refusjon	FB99841	818275	10
Uro-Tainer® Polihexanide		0,02 % Polihexanide	- Fjerner effektivt biofilm - Fjerner lukt - Forebygger og hindrer utvikling av infeksjon - Reduserer misfarging av urin - Mindre slimdannelse og generelt ubehag - Forlenger brukstid på kateter	2-3 ganger per uke Maks 2 ganger per dag	Er godkjent for refusjon. Førstegangs forskrivning skal gjøres av spesialist	FB99965	962723	10