


QuikRead go[®] wrCRP & wrCRP+Hb

Kort beskrivelse av testprosedyren



1 Fjern folien fra kyvetten. Væskeoverflaten skal være mellom de to linjene som er markert på kyvetten. Ikke berør den klare flate delen nederst på kyvetten.

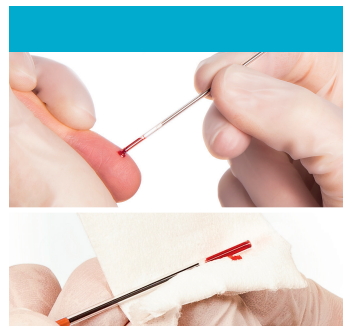

2 Fyll kapillærrøret med prøven (10 µl) opp til den hvite proppen. Kontroller at det ikke er luftbobler i kapillæret. Tørk av overflødig prøvemateriale på utsiden av kapillærrøret.



3 Plasser kapillærrøret i bufferløsningen i kyvetten, og trykk ned stemplet. Sørg for at kapillærrøret er helt tomt (10 µl).



4 Lukk kyvetten godt med en wrCRP-reagenskork. Ikke trykk ned den indre turkise delen av korken. Når prøve-materialet er tilsatt bufferen, bør analysen kjøres innen to timer.



5 Velg Analyse på skjermen på QuikRead go-instrumentet.



6 Sett kyvetten i analyserings-brønnen på instrumentet. Strekkoden skal være vendt mot deg. Fremdriften i målingen vises på skjermen.




7 Når analysen er fullført, vises resultatet på skjermen og kyvetten stiger opp fra instrumentet automatisk. Når du utfører QuikRead go wrCRP+Hb-testen, vises Hb-resultatet under CRP-resultatet.

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.

QuikRead go® wrCRP & wrCRP+Hb

Oppbevaring av reagenser

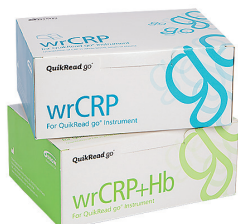

Uåpnet kit

Oppbevart i 2–25°C:
inntil utløpsdato på kittet



Uåpnede kyvetter i åpnet aluminiumspose

Oppbevart i 2–8°C:
6 måneder

Oppbevart i 18–25°C:
3 måneder



Boksen med reagenskorker

Uåpnet i 2–25°C:
inntil utløpsdato på kittet

Etter første åpning i
2–25°C: 6 måneder



Åpnet kyvette

Testen må utføres innen
2 timer etter åpning av
kyvetten. La bufferen oppnå
romtemperatur før testen
utføres.



CRP kontroller (se tabellen under)

Uåpnet flaske i 2–8°C:
inntil utløpsdato

Åpnet flaske i 2–8°C:
stabil i 2 måneder



Hb kontroll (se tabellen under)

Uåpnet flaske i 2–8°C:
inntil utløpsdato

Åpnet flaske i 2–8°C:
inntil én måned



Orion Diagnostica Oy / Norge
Postboks 4366 Nydalen, 0402 Oslo
Tel. 66 78 56 30, Fax 66 78 56 59
www.oriondiagnostica.no, www.quikread.com

8046-01NO, 05/2015

Produkt	Varenr.
QuikRead go wrCRP, 50 tester » med kapillærer og stempler	146521
QuikRead go wCRP+Hb, 50 tester » med kapillærer og stempler	146255
QuikRead CRP kontroll 1 ml	132702
QuikRead go CRP kontroll høy 1 ml	137071
Ultrasensitiv CRP kontroll 1 ml	132698
QuikRead go Hb kontroll 1 ml	141154
QuikRead go 10 µl kapillærrør, 50 stk.	147851
QuikRead stempel, 50 stk.	67966
QuikRead go instrument	135867

Finn mer informasjon : www.quikread.com