

medi sårkonsept

www.medinorway.no

Behandlingskonsept for venøse leggsår



RENSE - debridering av sår

KOMPRIMERE - redusere hevelse

FOREBYGGE - hindre tilbakefall

medi sårkonsept - venøse leggsår

Rense - Komprimere - Forebygge

1

Trinn

RENSE - debridering av sår

Første skritt på veien for å få et leggsår til å gro er en ren sårseeng. I medis sårkonsept brukes UCS debridingsklut til å rense sårbunn, sårkanter og huden omkring såret på en skånsom måte. Kluten er ferdig fuktet og klar til bruk rett fra den sterile pakken. Den måler 20x20 cm, kan brukes på begge sider og er stor nok for ett sårskift.



2

Trinn

KOMPRIMERE - redusere/behandle hevelse

Kompresjon er nødvendig for å få hevelsen ned og er en viktig faktor for at mikrosirkulasjonen rundt såret normaliseres. Først da kan surstoff og næringsstoffer komme frem til såret og det kan få mulighet til å gro. I sårkonseptet brukes den justerbare kompresjonsbandasjen juxtalite gjennom hele sårtilhelingsprosessen og fram til såret har grodd.



3

Trinn

FOREBYGGE - hindre tilbakefall

Når såret har grodd er det nødvendig å fortsette med kompresjon fordi den venøse svikten fortsatt vil være tilstede. Tilbakefallsprosenten av venøse leggsår er høy og derfor er det viktig å finne en god kompresjonsstrømpe til daglig bruk. I sårkonseptet anbefales bruk av mediven cotton kompresjonsstrømpe i klasse 2.



Venesystemet

Venøse leggsår er sår som oppstår på legg eller ankel og som tar lang tid å hele. Det er anslått at ca. 0,1 - 1% av befolkningen lever med et aktivt leggsår, og for personer over 65 år er forekomsten 3 - 4 %. De fleste av sårene som kommer under kneet er venøse leggsår som utvikles på grunn av venøs sykdom og kronisk venøs insuffisiens¹. Når såret har grodd er tilbakefallsprosenten høy, ofte fordi underliggende venøs insuffisiens fortsatt er ubehandlet.

Kompresjonsstrømper brukes for det meste av pasienter med venøs insuffisiens enten som behandling etter at såret har grodd, eller forebyggende for å kontrollere ødem og redusere venøs hypertensjon som fører til venøs insuffisiens².

De vanligste tilstandene som påvirker venesystemet er:

- **Dyp venetrombose (DVT)**, en blodpropp som dannes i de dype venene i benet
- **Overfladisk tromboflebitt**, en betennelse i en overfladisk vene etter blodpropp
- **Åreknuter** i overfladiske vener som utvider og vrir seg
- **Kronisk venøs insuffisiens** når blodet i venene ikke strømmer tilbake mot hjertet, men samler seg i venene ved ankelen. Dette kan oppstå når klaffene inne i venene blir skadet.

Alle venøse tilstander reagerer godt på kompresjonsbehandling.




1. National Wound Care Strategy Programme: (2020) Recommendations for Lower Limb Ulcers. Accessed at National Wound Care Strategy Programme | AHSN Network on 21/06/21

2. Wounds UK (2021) Best Practice Statement: Compression hosiery: A patient-centric approach (3rd edn). Wounds UK, London www.wounds-uk.com


medi sårkonsept - venøse leggsår

Alle venøse tilstander responderer godt på kompresjon


Den positive effekten av kompresjonsstrømper

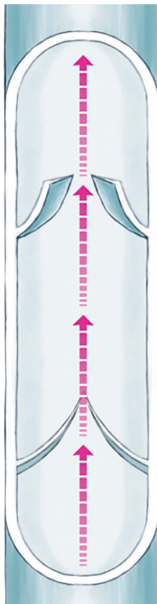

En frisk vene der de fungerende klaffene sørger for at blodet føres i riktig retning, gjennom årene og tilbake mot hjertet.

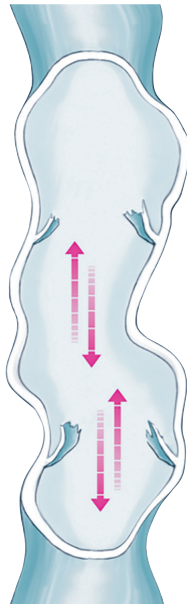

Et skadet venesystem der blodet "lekker" nedover mot ankelen og forårsaker høyt trykk (venøs hypertensjon) som igjen fører til videre skader.

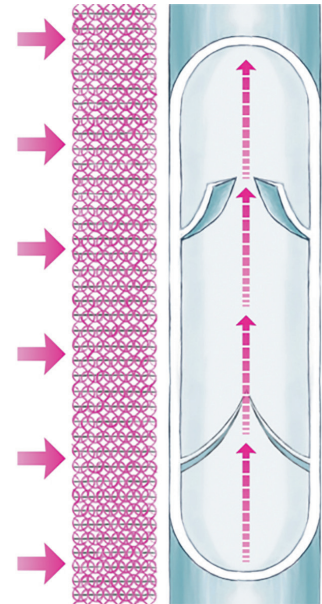

Kompresjon gir et ytre trykk mot huden som reduserer omkretsen av venen. Dette gir klaffene mulighet til å å fungere normalt og dermed hindre refluks.

Medisinsk kompresjon hjelper de skadede klaffene til å gjenoppta sin normale funksjon, øke venøs tilbakestrømming og redusere venøs hypertensjon.

Kompresjonsklasser (RAL - standard)

Medisinske kompresjonsstrømper er strikket med gradert avtagende kompresjon fra ankelen og opp til enten kneet eller låret, avhengig av lengden på strømpen. Medisinske kompresjonsstrømper er den grunnleggende behandlingsformen ved venøse lidelser.

Medisinsk kompresjon er inndelt i kompresjonsklasser med mild, moderat og kraftig kompresjon. For å få et leggsår til å gro er det anbefalt å bruke et trykk på 40 mmHg (EWMA standard).

Kompresjonsklasse 1 18-21 mmHg

Mild kompresjon for forebygging og behandling av lettere venøse lidelser som for eksempel mindre uttalte åreknuter, lettere hevelser og tyngdefornemmelse.

Kompresjonsklasse 2 23-32 mmHg

Moderat kompresjon for behandling av venøs svikt og forebygging og behandling av venøse leggsår. Brukes etter at såret har grodd for å hindre tilbakefall av nye sår.

Kompresjonsklasse 3 34-46 mmHg

Kraftig kompresjon for behandling av aktive venøse leggsår, moderat til uttalte venøse hevelser/lymfødem.

ENKEL • EFFEKTIV • SKÅNSOM • ØKONOMISK

UCS debridement klut er en steril, prefuktet debrideringsklut som renser sår og omkringliggende hud.

Kluten brukes direkte i såret, fjerner dødt vev og biofilm, samtidig som den pleier huden rundt. Tekstilfibrene fanger opp og holder sårrester som sekresjon, fibrin og hyperkeratose fast i kluten.

Bruksområder for UCS Debridement klut: akutte og kroniske sår, (både i sårbunn, på sårkanter og huden omkring), trykksår, 1. og 2. grads forbrenninger, fistler og abcesser.



Se video



Skann QR-koden for å komme til video som viser hvordan UCS-kluten virker.

UCS® Debridement klut

Steril, prefuktet klut til debridering av sår. Unike egenskaper som optimaliserer sårtilheling. Brukes ved debridering og rensing av sårseng og huden rundt. Fjerner barrierer for sårtilheling som nekrotisk vev, fibrin, biofilm og sårrester.



- Unik blanding av ingredienser fjerner biofilm (Poloxamer 188), fukter (Allantoin) og beroliger (Alo Vera)
- Prefuktet og klar til bruk
- Enkel å åpne og bruke, gjør det mulig for noen pasienter å klare seg selv.

UCS Debridement klut, pasient case

Tørt og statisk sår med hyperkeratose. Vanskelig å gjøre en nøyaktig vurdering av såret.



Før bruk av UCS Debridement klut



Etter bruk av en UCS Debridement klut

Bildene viser såret etter bruk av en enkelt UCS Debridement klut. Mye av hyperkeratosen er fjernet, huden omkring såret er fuktet, og det blir enkelt å vurdere såret og planlegge videre behandling.

Navn	Enhet	Artikkelnummer
UCS Debridement	1 pakke a 10 stk.	29F0894000

circaid® justerbar kompresjon

LETT TIL KRAFTIG KOMPRESJON



circaid har 3 forskjellige modeller av justerbare kompresjonsbandasjer.

Hver stropp kan etterstrammes individuelt gjennom døgnet uten å ta av bandasjen. Dette gir kontinuerlig kompresjon som får hevelsen raskere ned og såret til å gro fortere. Med det enkle og unike MBP-målekortet er man sikret kontrollert kompresjon og trykket kan justeres etter pasientens behov.

En til to timer etter at circaid-bandasjen er satt på, vil hevelsen ha gått noe ned og trykket blitt mindre. Da er det på tide å etterstramme stroppene. Det kan gjøres uten å ta av bandasjen, gjennom hele døgnet for kontinuerlig og ønsket kompresjon.

Bildet viser juxtalite leggbandasje med understrømpe og ankelsokk. Vi ser hvordan stroppene strammes ved å ta tak i to stropper av gangen. Begynn nederst, og stram to og to stropper oppover leggen.

circaid® justerbar kompresjon

circaidbandasjen kan brukes til ben som er hovne, har avvikende form, og til ben som har væskende sår.



Hevelse på fot eller ben




Avvikende form



Væskende sår

- circaidproduktene kan brukes over alle typer av sårbandasjer, på store eller små leggsår, inkludert væskende sår
- Målbar kompresjon ved hjelp av målekortet til det unike BPS-systemet som sikrer at kompresjonen blir som foreskrevet.
- Stroppene ligger over hverandre uten overlapping og kan derfor justeres enkeltvis hver for seg.

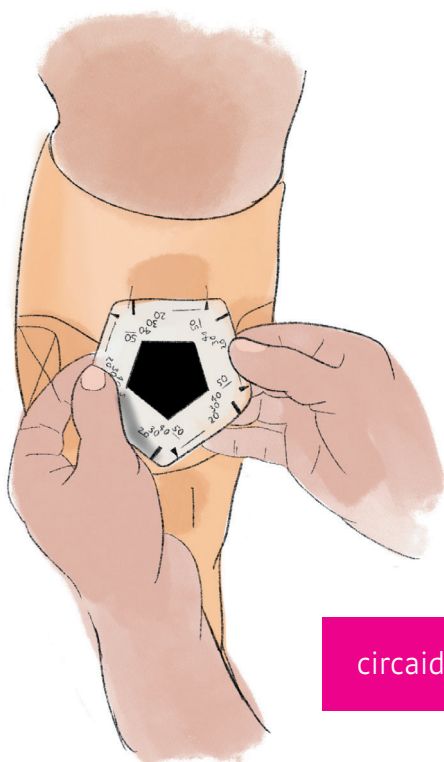

Kompresjonsnivået på circaid justerbar kompresjon kan reguleres med målekortet, helt ned til 20mmHg. Det vil si at kompresjonsbandasjen også kan brukes ved blandingssår.

circaidbandasjene har sitt eget system for måling av trykk - BPS-systemet.

juxtalite® justerbar kompresjon

LETT TIL MODERAT KOMPRESJON

juxtalite kan brukes ved lette til moderate hevelser, med eller uten sår.




Målekort - BPS

Pakken inneholder:

- 1 juxtalite kompresjonsbandasje
- 1 målekort for kontroll av trykk
- 1 par ankelsokker med kompresjon
- 1 understrømpe

MÅLESKJEMA

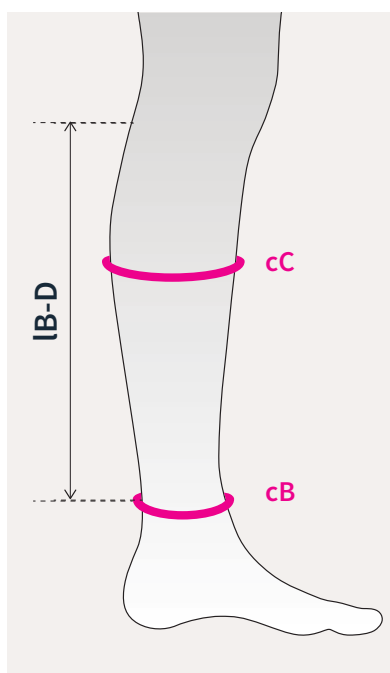

Varianter		
Størrelser / Artikkelnr.	Kort	Lang
S	JU15702000	JU15002000
M	JU15703000	JU15003000
M – ekstra vidde (XW)	JU15713000	JU15013000
L	JU15704000	JU15004000
L – ekstra vidde (XW)	JU15714000	JU15014000
XL	JU15705000	JU15005000
XL – ekstra vidde (XW)	JU15715000	JU15015000
XXL	JU15706000	JU15006000

Omkræter og lengder målt i cm

	S	M	M-XW	L	L-XW	XL	XL-XW	XXL
cC	26-36	33-44	44-54	41-51	51-61	37-48	48-61	53-64
cB	19-22	22-27	22-27	25-32	25-32	30-37	30-37	35-42

Lengden måles fra rett ovenfor ankelknoken til rett under kneet = lengden BD

Kort (28 cm) Lang (33 cm)

juxtalite® HD

MODERAT TIL KRAFTIG KOMPRESJON

juxtalite HD kan brukes ved moderate til kraftige hevelser med eller uten sår.




Målekort - BPS

Pakken inneholder:

- 1 juxtalite HD kompresjonsbandasje
- 1 målekort for kontroll av trykk
- 1 par understrømper med moderat kompresjon i foten

MÅLESKJEMA

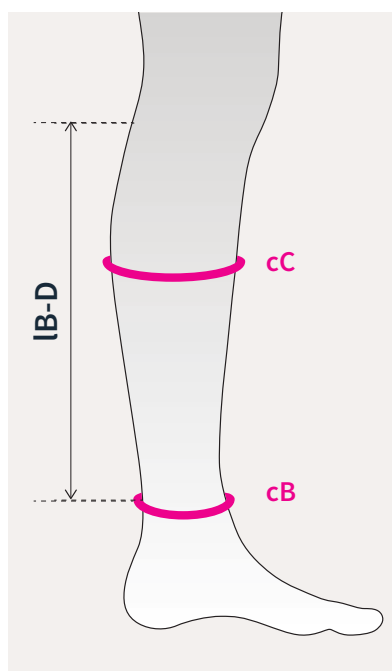

Varianter		
Størrelser / Artikkelnr.	Kort	Lang
S	JU1H702000	JU1H002000
M	JU1H703000	JU1H003000
M – ekstra vidde (XW)	JU1H713000	JU1H013000
L	JU1H704000	JU1H004000
L – ekstra vidde (XW)	JU1H714000	JU1H014000
XL	JU1H705000	JU1H005000
XL – ekstra vidde (XW)	JU1H715000	JU1H015000
XXL	JU1H706000	JU1H006000

Omkretser og lengder målt i cm								
	S	M	M-XW	L	L-XW	XL	XL-XW	XXL
cC	26-36	33-44	44-54	41-51	51-61	37-48	48-61	53-64
cB	19-22	22-27	22-27	25-32	25-32	30-37	30-37	35-42


Lengden måles fra rett ovenfor ankelknoken til rett under kneet = lengden BD

Kort (28 cm) Lang (33 cm)

juxtacures egner seg til behandling av store leggsår med eller uten sekresjon og med moderate til store hevelser. Bandasjen er spesielt utformet slik at omkretsen kan rejusteres etter hvert som hevelsen går ned.



Målekort - BPS

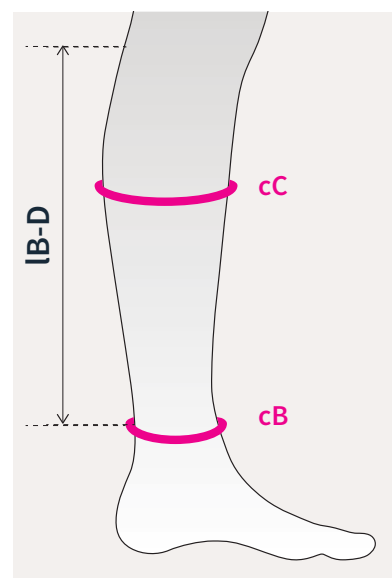

Omkretser målt i cm (min/max)		min	maks
cB		19	22
cC		25	64
Lengder målt i cm	Kort	Standard	Lang
IB-D	28	33	38
Artikkelnummer	Kort	Standard	Lang
	JU42709000	JU42N09000	JU42009000

Pakken inneholder:

- 1 juxtacures kompresjonsbandasje
- 1 Målekort for kontroll av trykk
- 1 par ankelsokker med kompresjon
- 1 par understrømper
- 6 sterke / små borrelåser

Du setter sammen / etterjusterer omkretsen på juxtacures plagget i 3 enkle trinn:

Trinn 1

Mål først lengden fra rett ovenfor ankelknoken og opp til under knehasen. Ta deretter omkretsen rundt ankel (B) og tykklegg (C).



Trinn 2

Bandasjen kommer i to deler, en smal og en bred. Ta den smale delen og fest nederste borrelås etter ankels omkrets B og øverste borrelås oppe etter tykkleggens omkrets C.



Trinn 3


Brett den smale delen til venstre og klipp av overflødig materiale. La det være igjen ca 5 cm til overlapping.

circaid® tilleggsprodukter




ankelsokk med kompresjon

Omkrets i cm	Standard	Large
cB	19-27	25-50
cA1	19-36	22-41
Artikkelnummer	JU51001000	JU51002000

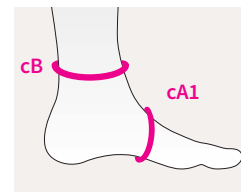


juxtalite ankle foot wrap

Omkrets i cm	Small	Medium
cA1	19-26	24-31
Art.nr.	JU1002000	JU1003000

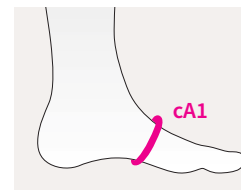

PAC-band

Omkrets i cm	Standard	Large	Ekstra large
cB	19-27	25-50	45-56
cA1	19-36	22-41	22-41
Art. nr.	JU51001000	JU51002000	JU5P003000

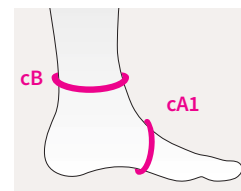


Understrømper

Størrelse	Art.nr.	Farge	Stil
Understrømpe legg, uten fot	JULS709	Hvit	BD
	JUSS709	Grå	BD
Understrømpe legg, med fot	JULT709	Hvit	AD
	JUST709	Grå	AD
	JUCT709	Bomull	AD



Understrømpe med kompresjon

Omkrets i cm	Standard	Stor	Str.	Kompresjon	Art.nr.
cC	26-54	41-64	Standard	Moderat	JU5M001000
cB	19-27	25-42	Stor	Moderat	JU5M002000
cA1	19-32	24-41	Standard	Fast	JU5M003000
			Stor	Fast	JU5M004000

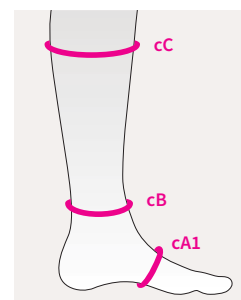

circaid tåkappe

Kompresjon	Lett kompresjon 20-30mmHg				
toe cap	2	3	4	5	6
cA base av tærne (cm)	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
Art.nr.	JU5T002	JU5T003	JU5T004	JU5T005	JU5T006



circaid tåkappe til behandling av hovne tær, kan klippes til passende lengde.

mediven® ulcer kit

Hva er et venøst leggsår?



Et venøst leggsår er et sår som har oppstått på grunn av dårlig venøs sirkulasjon i benet nedenfor kneet og som ikke har grodd etter 2 uker. Det er en tilbakevendende tilstand som forårsaker smerte, vond lukt, redusert bevegelighet og isolasjon og depresjon.

Ulcer kit behandlingsstrømpe som kan brukes ved små til middels store venøse sår med lite til moderat sårsekresjon.



- Unik understrømpe med 20mmHg og lukket tå + beige overstrømpe med 20mmHg og åpen tå utgjør en komplett sårstrømpe.
- Strikket hæl reduserer rynker ved bøy og strekk av ankelen.
- Gir terapeutisk kompresjonsnivå 24 timer i døgnet, selv når pasienten sover.
- Overflatematerialet i understrømpen er spesielt utviklet for å gjøre det enkelt å ta på og av strømpene.
- Hvit understrømpe kan maskinvaskes på 90°C.

mediven® ulcer kit

MODERAT TIL KRAFTIG KOMPRESJON




Varianter

AD	AD
Lukket tå	Åpen tå

Artikkel	Art.nr.	
lukket tå	kort	normal
mediven ulcer kit	381708 000	381008 000
åpen tå		
mediven ulcer kit	381707 000	381007 000
refill (2 stk. per enhet)		
mediven ulcer refill	8X4718 Δ 000	8X4018 Δ 000

Δ = Legg til størrelse 1–7

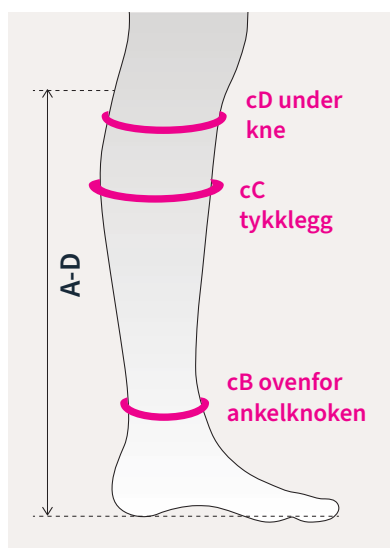

Omkretser i cm							
Størrelse	I	II	III	IV	V	VI	VII
Under kne cD	28-33	30-36	33-39	35-42	37-45	39-48	41-50
Tykklegg cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
Ankel cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
Fargekode - hæl	rosa	blå	gul	rød	grå	grønn	brun

mediven® ulcer kit

Det er viktig å forbygge slik at leggsåret ikke kommer tilbake. Samtidig håndterer man den venøse svikten enten på kronisk, alvorlig, moderat eller tidlig stadium for å forhindre at symptomene forverres.

Etter at pasientens venøse leggsår har grodd og blitt behandlet med full kompresjon (40 mmHg hvis Ankel-armindeks tillater det), er det viktig at bruken av kompresjon fortsetter livet ut. Dette gjøres for å redusere risikoen for tilbakefall. Det anbefales å bruke kompresjonsklasse 2. Dersom såret likevel kommer tilbake til tross for bruk av klasse 2, er det anbefalt å gå opp til klasse 3.



mediven cotton



mediven plus




mediven forte

Kompresjon er gullstandarden for behandling av venøs insuffisiens og RAL standard er kvalitetsstandarden medi Norway bruker for hele sortimentet av kompresjonsstrømper. Vi snakker her om **medisinske kompresjonsstrømper** produsert med et nøyaktig avtagende trykk. Strømpene har så god kvalitet og trykk at de øker returen av venøst blod og dermed får ned hevelser.

mediven - RAL kvalitetsstandard for kompresjon

Betyr at strømpen er strikket for å gi den graderte kompresjonen som trengs for å redusere venøs hypertensjon (høyt trykk i ankelen som bygger seg opp når venene ikke fungerer tilstrekkelig). Kompresjonen er garantert i 6 måneder.

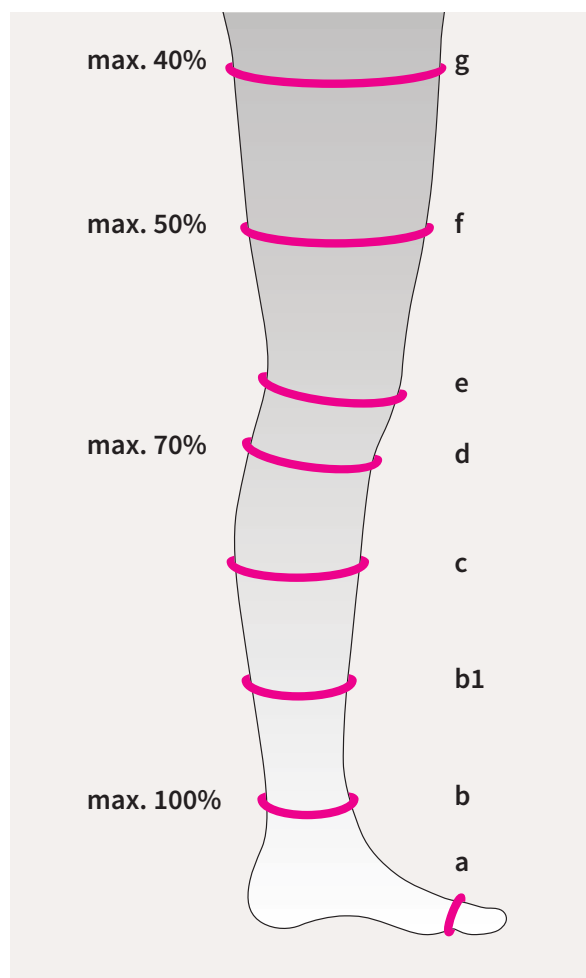

mediven graderte trykkprofil RAL standard.
Testet av Hohenstein (HOSY).

mediven rundstrikkede varianter

Rundstrikkede kompresjonsstrømper er ofte brukt til behandling av venøse lidelser og kan se ut som vanlige tette strømpebukser. Virkningen av kompresjonen i rundstrikkede strømper gir et trykk mot benet som bidrar til at klaffene i årene fungerer bedre og tilbakestrømningen til hjertet øker.

mediven rundstrikkede strømper

bør brukes daglig og skiftes hver 6. måned. Strømpene kan vaskes i maskin på 40 grader og tørkes på lav temperatur i tørketrommel. Det anbefales å bruke et vaskemiddel uten blekemiddel og unngå skyllemiddel. Legg gjerne strømpene i vaskepose for mest mulig skånsom vask. mediven kompresjonsstrømper finnes for kvinner og menn, i mange varianter og farger, alle med den samme høye RAL standarden.

Målet for kompresjonsbehandlingen er å holde hevelser nede og unngå at såret kommer tilbake.

mediven® cotton AD

Kompresjonsklasse 1 og 2

mediven cotton er en hudvennlig kompresjonsstrømpe som inneholder 27 % økologisk bomull. Den er myk og behagelig mot huden, dermatologisk testet og egner seg også for sensitiv og allergisk hud.


Måleskjema knestrømper (AD), omkretser målt i cm

Størrelser		I	II	III	IV	V	VI	VII
Legg	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
Ankel	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32

SJEKKLISTE VED BESTILLING

Kompresjonsklasse	kkl 1 (18-21 mmHg)	kkl 2 (23-32 mmHg)
Lengde fra gulv til knehase	kort (34-38 cm)	normal (39-44 cm)
Farge	caramel og svart	caramel og svart
Åpen eller lukket tå		

mediven cotton kan også bestilles etter individuelle mål.
Skostørrelser fra 36 til 43.

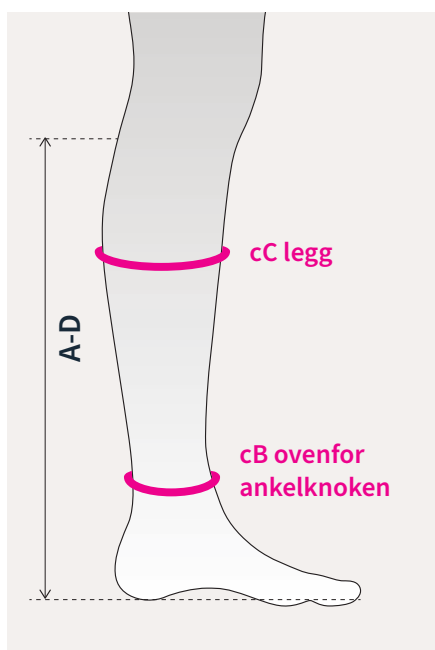

mediven cotton lukket tå



mediven cotton åpen tå

mediven® cotton AG

Kompresjonsklasse 1 og 2

I tillegg til knestrømpene på forrige side finnes mediven cotton også som lårstrømpe og strømpebukse. Måleskjemaet under kan også brukes til strømpebukser. Mer informasjon om mediven cotton finnes på våre hjemmesider www.medinorway.no

Måleskjema lårstrømper (AG og AT), omkretser målt i cm


Størrelser		I	II	III	IV	V	VI	VII
Lår med ekstra vidde	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85
Lår standard med toppbånd	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
Legg	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
Ankel	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32

SJEKKLISTE VED BESTILLING

Kompresjonsklasse	kkl 1 (18-21 mmHg)	kkl 2 (23-32 mmHg)
Lengde fra gulv til knehase	kort (34-38 cm)	normal (39-44 cm)
Farge	caramel og svart	caramel og svart

Åpen eller lukket tå

mediven cotton kan også bestilles etter individuelle mål. Skostørrelser fra 36 til 43.

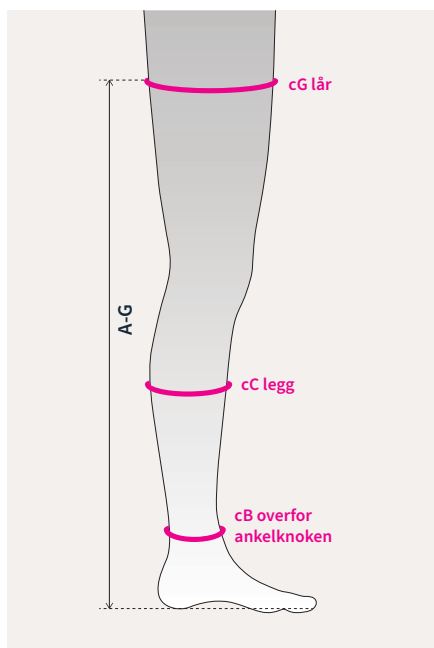

mediven cotton lukket tå



mediven cotton åpen tå

mediven® plus AD

Kompresjonsklasse 1, 2 og 3

mediven plus er en klassik kompresjonsstrømpe som passer for både kvinner og menn. Den er litt stivere enn mediven cotton og kan blandt annet brukes til de som ikke har god nok effekt av mediven cotton. mediven plus i klasse 3 kan brukes dersom såret kommer tilbake selv etter bruk av klasse.

Måleskjema knestrømper (AD), omkretser målt i cm


Størrelser		I	II	III	IV	V	VI	VII
Legg med ekstra vidde	cXC	34-38	37-41	40-44	42-46	44-48	46-50	48-52
Legg	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
Ankel	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32

SJEKKLISTE VED BESTILLING

Kompresjonsklasse	kkl 1 (18-21 mmHg)	kkl 2 (23-32 mmHg)	kkl 3 (34-36 mmHg)
Lengde fra gulv til knehase	kort (34-38 cm)		normal (39-44 cm)
Farge	caramel og svart		caramel og svart

Åpen eller lukket tå

mediven plus kan også bestilles etter individuelle mål. Skostørrelser fra 36 til 43.

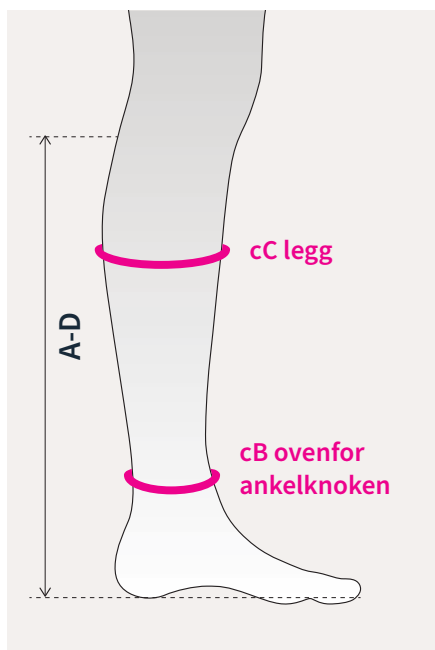

mediven plus lukket tå



mediven plus åpen tå

mediven® plus AG


Kompresjonsklasse 1, 2 og 3

I tillegg til knestrømpene på forrige side finnes mediven plus også som lårstrømpe, lårstrømpe med hoftefeste og strømpebukse. Måleskjemaet under kan også brukes til alle varianter. Mer informasjon om mediven plus finnes på våre hjemmesider www.medinorway.no.

Måleskjema lårstrømper (AG og AT), omkretser målt i cm								
Størrelser		I	II	III	IV	V	VI	VII
Lår med ekstra hoftefeste	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
Lår med ekstra vidde	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85
Lår standard med toppbånd	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
Legg	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
Ankel	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32

SJEKKLISTE VED BESTILLING			
Kompresjonsklasse	kkl 1 (18-21 mmHg)	kkl 2 (23-32 mmHg)	kkl 3 (34-36 mmHg)
Lengde fra gulv til knehase	kort (34-38 cm)		normal (39-44 cm)
Farge	caramel og svart		caramel og svart
Åpen eller lukket tå			

mediven plus kan også bestilles etter individuelle mål.
Skostørrelser fra 36 til 43.

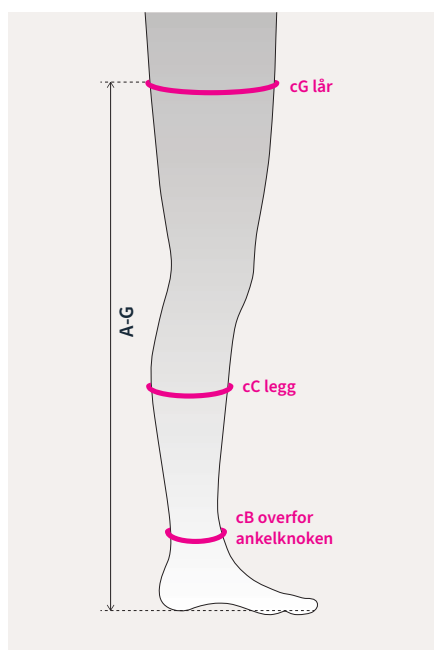

mediven plus lukket tå



mediven plus åpen tå

mediven® forte AD

Kompresjonsklasse 2 og 3

mediven forte er den kraftigste kompresjonsstrømpen i det rundstrikkede sortimentet. Den er robust og slitesterk og brukes ved alvorlige tilfeller av venøs svikt eller ved tilbakefall, til tross for bruk av kompresjon i klasse 2.


Måleskjema knestrømper (AD), omkretser målt i cm

Størrelser		I	II	III	IV	V	VI	VII
Legg med ekstra vidde	cXC	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46	43-48	45-50
Legg	cC	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
Ankel	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32

SJEKKLISTE VED BESTILLING

Kompresjonsklasse	kkl 2 (23-32 mmHg)	kkl 3 (34-36 mmHg)
Lengde fra gulv til knehase	kort (34-38 cm)	normal (39-44 cm)
Farge	caramel og svart	caramel og svart
Åpen eller lukket tå		

mediven forte kan også bestilles etter individuelle mål.
To fotlengder: liten fot opp til 23 cm, stor fot fra 23 cm.

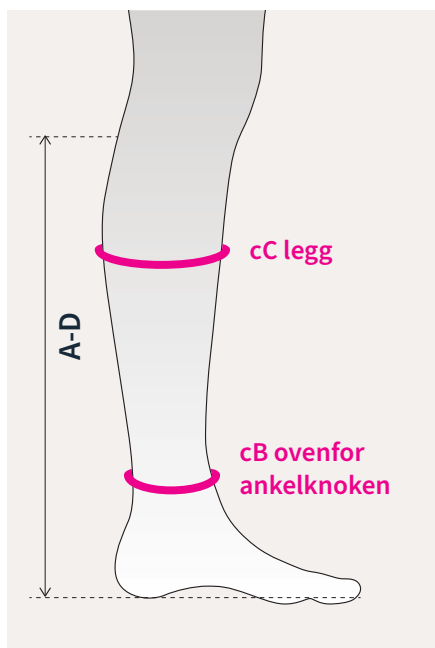

mediven forte lukket tå



mediven forte åpen tå

mediven® forte AG

Kompresjonsklasse 2 og 3

I tillegg til knestrømpene på forrige side finnes mediven forte også som lårstrømpe, lårstrømpe med hoftefeste og strømpebukse. Måleskjemaet under kan brukes til alle varianter. Mer informasjon om mediven forte finnes på våre hjemmesider www.medinorway.no.

Måleskjema lårstrømper (AG og AT), omkretser målt i cm


Størrelser		I	II	III	IV	V	VI	VII
Lår med ekstra hoftefeste	cG	44-47	46-50	50-54	53-58	56-61	60-65	64-70
Lår med ekstra vidde	cG	48-53	51-57	55-61	59-65	62-70	66-74	71-80
Lår standard vidde	cG	44-53	46-57	50-61	53-60	56-70	60-74	64-80
Legg	cC	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
Ankel	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32

SJEKKLISTE VED BESTILLING

Kompresjonsklasse	kkl 1 (18-21 mmHg)	kkl 2 (23-32 mmHg)
Lengde fra gulv til knehase	kort (34-38 cm)	normal (39-44 cm)
Farge	caramel og svart	caramel og svart

Åpen eller lukket tå

mediven forte kan også bestilles etter individuelle mål.
To fotlengder: liten fot opp til 23 cm, stor fot fra 23 cm.

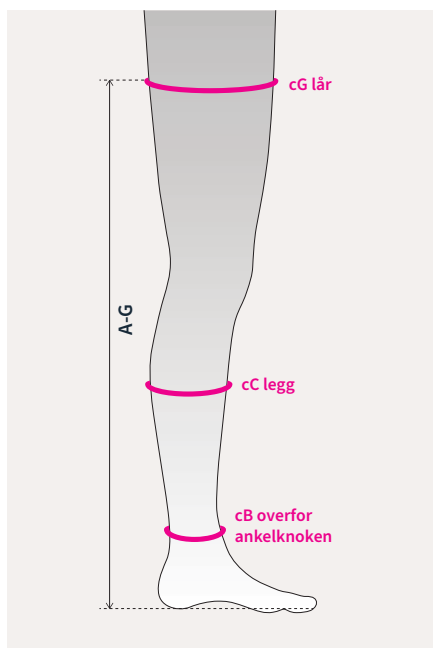

mediven forte lukket tå



mediven forte åpen tå

mediven® angio AD

Kompresjonsklasse 1 og 2

mediven angio er en kompresjonsstrømpe spesielt beregnet for pasienter med kronisk venøs svikt og samtidig perifer arteriell sykdom, eller til pasienter med diabetes mellitus.

I utviklingen av mediven angio er det tatt spesielle hensyn til sikkerhet i forhold til kompresjon, og til spesielle plager som er vanlig for denne pasientgruppen. Verifisering av Ankel-armindeks anbefales hvis man er usikker på pasientens arterielle sirkulasjon.



Ekstra bred vrangbord

Sitter godt oppe og fordeler trykket over et stort areal

- ✓ Forebygging av stase



Solid ribbet struktur

Gir godt grep med høy elastikk i lengderetningen og fint plysmateriale

- ✓ Lett å ta på og behagelig å bruke



Merino-plysj i hele foten

Unik, myk polstring fra tåspissen og opp til over ankelen

- ✓ Reduksjon av trykk på utsatte punkter ved nedsatt følsomhet eller ved hudlidelser. Optimal varmeregulering.

Ekstra lang, flat søm

Spesialsøm som ender bak tærnes grunnledd

- ✓ Optimal trykkavlastning av tærne og grunnleddene



mediven® angio AD

Kompresjonsklasse 1 og 2

Bruk måleskjemaet under for å finne riktig størrelse. Mer informasjon om mediven angio finnes på våre hjemmesider www.medinorway.no.


Måleskjema knestrømper (AD), omkretser målt i cm

Størrelser		I	II	III	IV	V	VI	VII
Legg	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
Ankel	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32

SJEKKLISTE VED BESTILLING

Kompresjonsklasse	kkl 1 (18-21 mmHg)	kkl 2 (23-32 mmHg)
Lengde fra gulv til knehase	kort (34-38 cm)	normal (39-44 cm)
Farge	caramel og svart	caramel og svart
To fotlengder:	liten fot opp til 25 cm, skostr. 36-40	stor fot fra 25 cm, skostr. 40-46
Kun lukket tå		

mediven angio kan også bestilles etter individuelle mål.

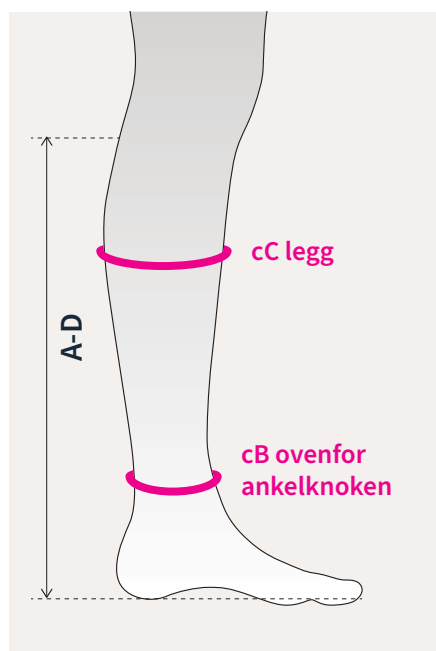

mediven angio, innsiden av strømpen, frottert fot



mediven angio lukket tå

medi hjelpemidler

Hjelpemidler for av- og påtrekk av medisinske kompresjonsstrømper.



medi 2in1

medi 2in1 gjør at kompresjonsstrømpen glir lett over hælen. Passer til alle lengder på plagg, både med åpen og lukket tå. Produktet er svært slitesterkt og holdbart mot rifter. Kan lett brettes sammen og tar liten plass på reise.

Art. nr. 6900013



medi Export Butler

medi Export Butler har lange håndtak som gjør at brukeren ikke trenger å bøye seg så langt ned. De avrundede håndtakene gir også et bedre grep. Passer alle kompresjonsstrømper som er utformet for ben, både med åpen og lukket tå.

Art. nr. 6900041



medi Butler Off

Med medi Butler Off, kreves det veldig lite kraft for å ta av kompresjonsstrømpene. Det ergonomiske håndtaket gir et godt grep, og gjør at det er lett å trykke butleren nedover. Brukeren trenger bare å skyve medi Butler Off inn mellom strømpen og benet og trykke skaftet nedover - strømpen følger med.

Art. nr. 6900362



medi fix strømpelim

Strømpelim med roll-on funksjon som hjelper til å holde strømpene på plass. Fungerer like bra både på ben- og armstrømper.

Art. nr. 50 ml (1 stk.): 1023025

Art. nr. 50 ml (6 pk.): 1023125

medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik

T +47 52 84 45 00
post@medinorway.no
www.medinorway.no