

UCS Debridement

Steril, prefuktet klut
til debridering av sår.
Unike egenskaper som
optimaliserer sårtilheling.

Enkel – Effektiv – Skånsom – Økonomisk.



UCS Debridement

Prefuktet vaske- og debrideringsklut

UCS er en steril, prefuktet debrideringsklut som renser sår og omkringliggende hud. Kluten brukes direkte i såret, fjerner døde hudceller og pleier huden rundt. Egner seg meget godt til vask mellom tærne. Tekstilfibrene fanger opp og holder sårrester som sekresjon, fibrin og hyperkeratose fast i kluten. Kluten er klassifisert som medisinsk utstyr klasse II B og er CE-merket.

Bruksområder

- Akutte sår
- Kroniske sår, både i sårbunn, på kanter og huden rundt såret
- 1 og 2. grads forbrenninger
- Fistler og abcesser
- Rundt kateteråpninger PEG/PEJ etc.
- Peristomal hud
- Fjerning av bandasjerester i såret

Egenskaper

- Bidrar til å løse opp biofilm
- Atraumatisk fjerning av fibrin, nekrotisk vev, slough og hyperkeratose
- UCS-klutens struktur binder sårrester og holder de fast i kluten
- Ved tørr hud vil UCS ingredienser trenge gjennom hudceller og mykgjøre huden
- Ingen risiko for blødning eller skader på granulasjonsvev
- Reduserer smerte, øker compliance
- UCS inneholder surfactant som reduserer overflatespenning i huden og effektivt renser såret slik at såret kan gro.

Fordeler

- Ressursbesparende
- Trenger ikke bruke vann til rengjøring
- Reduserer lukt
- Renser og klargjør sårsengen for tilheling
- Trygg og lett å bruke
- Bløt debrideringsklut som er fuktet med et mildt rensemiddel
- Renser og bløtgjør huden uten å ødelegge friske celler
- Unik og behagelig måte å rense hud og sår

Aktive ingredienser

Uttrekk fra Aloe Vera

Allantoin

Poloxamer 188™

UCS Debridement

Prefuktet vaske- og debrideringsklut



Før bruk av UCS debridement



Før bruk av UCS debridement



*5 min. etter bruk av 1x UCS debride-
ment*



1x UCS debridement daglig i 10 dager

Hvordan bruke UCS:

1. Åpne den sterile pakningen og ta kluten ut.
2. Bruk alle deler av kluten til skånsomt å bearbeide inni og omkring såret slik at væsken kan trenge gjennom huden, og dermed fjerne sårrester.
3. Begge sider av kluten kan benyttes.
4. UCS gir skånsom, myk og effektiv debridering.



Praktisk mellom tærne

Referanse:
Downe A. 2014
‘How wound cleansing and debridement, aids management and healing’.
JCN Vol. 28 No. 4

Forpakninger

1 pakke a 10 stk
1 kartong (30 pakker a 10 stk)