

5 Alarmer og sikkerhetsfunksjoner

Hvis det oppstår en alarm:



Koble ut lyden på alarmen (om nødvendig)


Finn årsaken og fortsett med behandlingen



Stopp alarm




Start pumpen

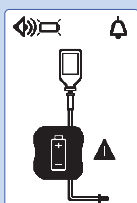


Tomt batteri

Koble pumpen til nettstrøm umiddelbart.

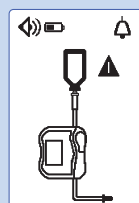


Alarm for tom pose/luft i sett

Skift reservoar og still inn eller kontroller for luftbobler.

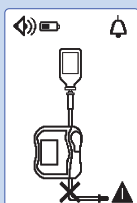


Nedstrøms okklusjon-alarm

Kontroller at ernæringssettet er åpent etter pumpen, på pasientsiden.

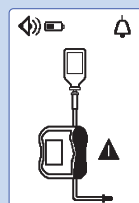

Alarm for åpen dør.

Lukk døren.

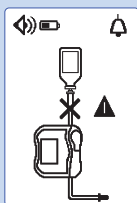


Oppstrøms okklusjon-alarm

Kontroller at ernæringssettet er åpent mellom beholderen og pumpen.




Melding målvolum nesten nådd.

Fortsett med ernæring eller avslutt ernæringen.

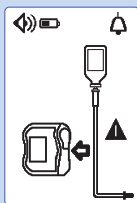


Alarm for sett installasjon

Kontroller installasjonen av ernæringssettet over- og under pumpemekanismen.

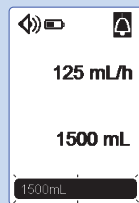


Alarm målvolum nådd.

Avslutt mating.

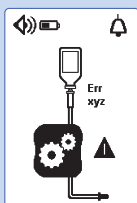

Pumpefeilalarm

Notér den tekniske feilkoden (Err xyz) og ta kontakt med personale som utfører service på pumper.

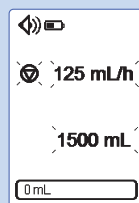

Påminnelse om å starte pumpen.

Fortsett til neste trinn eller slå av pumpen.

MEDISINSK UTSTYR



Z210322
210322-0_quick_reference_guide_amika_NO - 06/2013

Amika®

ENTERAL ERNÆRINGSpumpe
Hurtigguide




**FRESENIUS
KABI**
caring for life


Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg
Germany
Phone +49 (0)6172 686-0
www.fresenius-kabi.com

**FRESENIUS
KABI**
caring for life

1 Installering av sett i pumpen

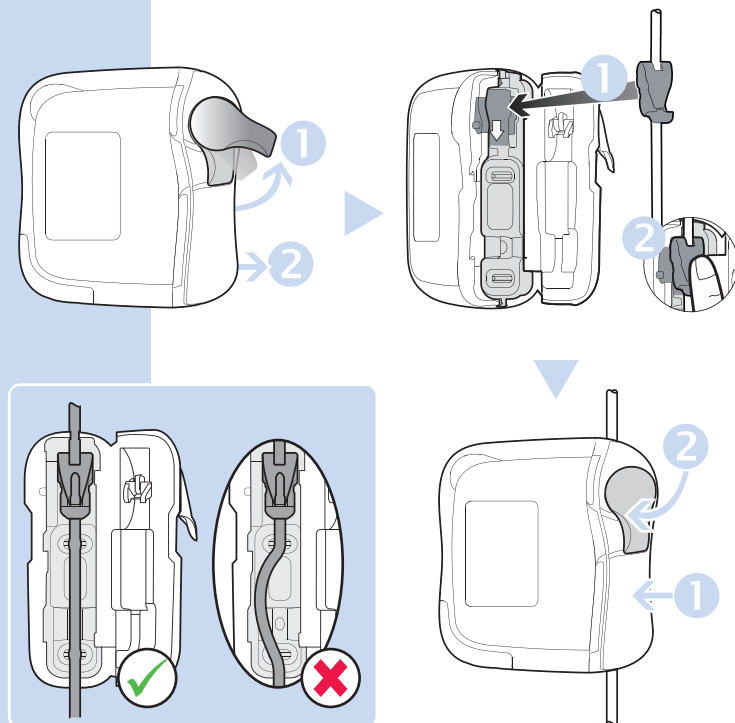

2 Beskrivelse av bruker

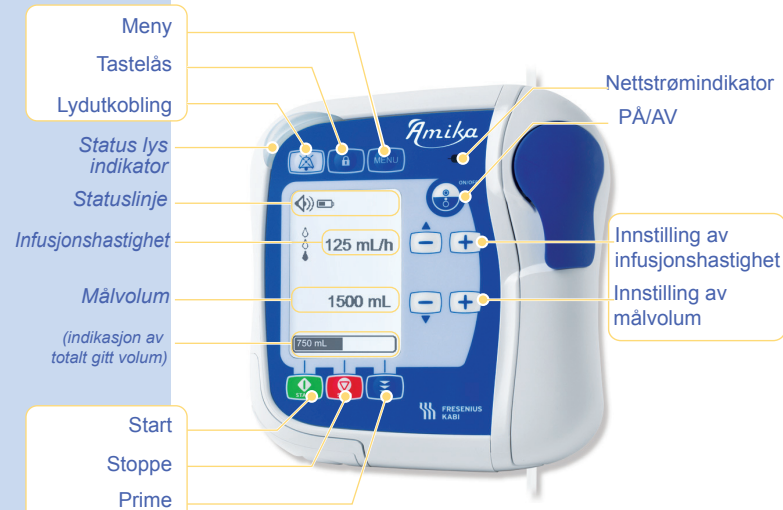


3 Bruk

3.1 Slå på pumpen




3.2 Prime settet


Automatisk priming (~1 min 45 s)

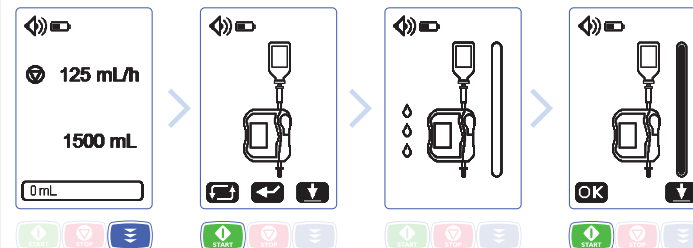

Halvautomatisk priming

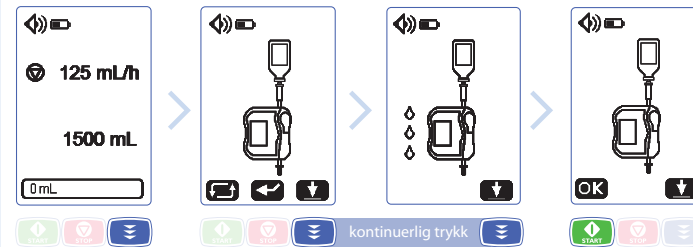



3.3 Stille inn infusjonshastighet (ml/t)

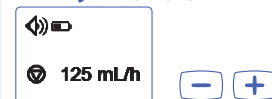



3.4 Still inn målvolum (ml)



3.5 Start mating (prime settet først)

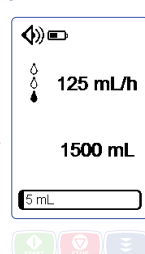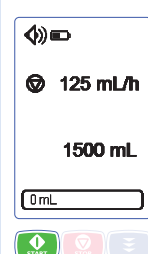

3.6 Stopp mating

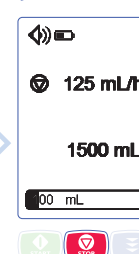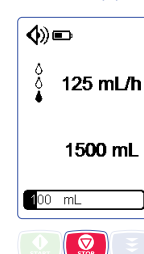

> 2 s:

Nullstilling av gitt volum

Tastaturlås



> 2 s

Slå av pumpen



> 2 s

4 Meny

Stopp mating

trykk deretter på MENY tasten



for å rulle opp

for å rulle ned

Gå inn i en meny eller bekreft en handling Tilbake til forrige skjerm



Aktivering/deaktivering av målvolum



Aktivering/deaktivering av nattmodus



Lyddinnstillinger



Aktivering/deaktivering av lås for innstillinger*



Teller for kumulativt matevolum



Alarmhistorikk



Matehistorikk



Innstillinger kontrast/lysstyrke



Innstilling av tidsintervall for alarmer*



Tid for forhåndsalarm. Målvolum for mating er nådd. *



Teknisk informasjon

* tilgangskode kreves