

PERASAFE

Rely+On™ PeraSafe™

Blanding og bruk

LES PAKNINGESVEDLEGGET! DETTE KAN INNEHOLDE OPPDATERINGER OG ANNEN VIKTIG INFORMASJON!




1 Fyll blandeflasken med 1 liter lunkent vann. 30 - 35°C.



2 Klipp posen forsiktig opp og hell pulveret (16,2 g) over i flasken. Skru på flaskekorken.



3 Rist flasken periodevis under aktiveringstiden. Aktiveringen tar 15 min. En liten mengde uoppløst materiale er forventet. Løsningen blir fargeløs etter ca. 30 min.

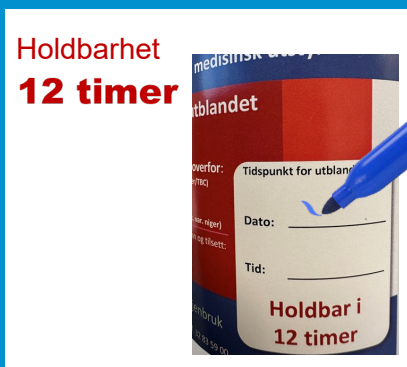

4 Løsningen er nå klar til bruk. Merk etikett med dato og tidspunkt for utblanding.

Riktig beskyttelse:

Benytt øyeskyttelse, hansker og munnbind.



Bruksområder:

PeraSafe brukes på stive og fleksible endoskop, katetre, transdusere og andre temperaturfølsomme instrumenter og utstyr.

Riktig virketid:



Desinfeksjon av invasivt og ikke-invasivt medisinsk utstyr:

- Rengjør utstyret på forhånd med et pH-nøytralt rengjøringsmiddel.
- Sterkt forurensset utstyr kan medføre en raskere reduksjon i nivået av porediksyre og derved redusere antall ganger oppløsningen kan brukes. Antall nedsenkninger, under normale forhold, er begrenset til maksimum 20.
- Skyll grundig med vann for å fjerne alle rester etter forhånds-rengjøring!
- La PeraSafe virke i 10 minutter. Sjekk at alle utstyrets flater er i kontakt med PeraSafe-løsningen.
- Utstyret skal deretter skylles grundig i sterilt vann og tørkes, med f.eks. steril klut, før gjenbruk/lagring.

Virketid:

Virketid er 10 minutter for alle bakterier, virus og sporer.

Ved spesielle utfordringer med gjærsopp skal kontakttiden være 60 minutter, og løsningen må brukes innen 8 timer etter utblanding.

Effekt:

PeraSafe har dokumentert effekt på:

- **Bakterier** - inkl. *Mycobacterium tuberculosis* (tbc)
- **Sporer**; *Clostridioides difficile*, *Bacillus subtilis var niger*
- **Virus** - alle kjente virus-familier
- **Gjærsopp**

Bruksløsning:

Konsentrasjon: 1,62%

pH: 8

Lukt: stikkende (eddik). Lukten er helt ufarlig.

Farge: Blå/grønn. Fargen indikerer god utblanding, men er ingen indikator for effekt.

Holdbarhet:

12 timer fra tidspunkt for utblanding.

Materialpåvirkning:

PeraSafe er testet overfor en lang rekke materialer uten påvist skade eller materialpåvirkning.

Avfall:

Brukt løsning kan helles direkte i avløp. Skyll etter med vann.