

Viktig å huske ved bytte av dekontaminatormidler

Har du valgt riktig kjemi til riktig bruk? I tillegg til selve produktene ønsker Norengros å bidra med faglig støtte og gode råd som sikrer korrekt bruk av dekontaminatormidler. For å sikre best mulig resultat – og unngå unødvendig slitasje på utstyr og maskiner – er det noen enkle rutiner som bør følges.

Her er noen gode tips:

Skyll alltid mellom kjemibytter. Uansett hvilken kjemi du bytter mellom, skal systemet skylles med vann for å unngå krystallisering. Dette kan ødelegge slangene i maskinen. Tømmefingerregelen er å skylle minst en gang i uken med rent vann.

Sørg for riktig innlasting. Sørg for korrekt og hensiktsmessig innlasting av utstyret. Overfylte eller feilplasserte komponenter fører til redusert vaskeeffekt.

Unngå over- eller underdosering. Har du en godkjent maskin med doseringsanlegg, sørger den for riktig mengde kjemi – noe som både sikrer bedre resultat og reduserer slitasje.

Følg anbefalt temperatur. Ulike produkter krever ulike temperaturer for optimal effekt. Maskinene kan ofte programmeres av tekniker ved behov.

Sjekk såpen jevnlig. Eldre maskiner gir ikke alltid beskjed når det er tomt. Uten såpe vasker den kun med vann – uten ønsket effekt.

Tøm aldri direkte i avløp. Produktene skal helles rett i sluket.

Utfør årlig service på maskinen. Jevnlig vedlikehold sikrer at slangene, doseringssystemet og maskinen fungerer som de skal.

Bruk verneutstyr. Ved bytte og håndtering av kjemi skal du alltid bruke hansker og annet personlig verneutstyr – dette er sterke kjemikalier som kan gi etseskader.

Smart fargekoding forenkler bruken

Den praktisk fargekodingen på Pure Dekontaminatormidler hjelper brukeren med å velge riktig kjemi til riktig bruk. På etiketten er det også piktogrammer som viser hva såpen skal brukes til.

Alle produktene er utviklet for å møte strenge krav til kvalitet og sikkerhet – og for å sikre god hygiene i det daglige arbeidet til helsepersonell.



Mild (lilla)

Et lavtskummende og svakt alkalisk rengjøringsmiddel med pH10, utviklet for å fjerne lett løselig smuss på en skånsom måte. Kan brukes både i bekkenspyler og instrumentvaskemaskin. Produktene hindrer kalk og belegg både på utstyret og i maskinen, og påvirker verken rustfritt stål, kobber eller messing. Aluminium påvirkes ikke ved kort vasketid. CE- og Svanemerket.

Enzym (grønn)

Et pH-nøytralt, enzymbasert rengjøringsmiddel utviklet for skånsom rengjøring av sensitivt medisinsk utstyr. Brukes til instrumentvaskere, men egner seg også godt til manuellvask, ultralydbad og bløtlegging. Middelet har optimal effekt ved lav temperatur – anbefalt mellom 40-50°C. CE- og Svanemerket.

Sterk (blå)

Et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel med pH 14, utviklet for effektiv rengjøring av hardt tilsmusset utstyr. Brukes på bekkenspyler, og er særlig aktuelt for sykehus med større maskiner samt enkelte sykehjem med hardt tilsmusset gods. Skal ikke brukes på aluminium. CE- og Svanemerket.

Tørremiddel (brun)

Et avspenningsmiddel som gir bedre tørk og reduserer skjolder etter vask. Brukes kun i instrumentvasker. CE- og Svanemerket.



Svanemerket kjemi av høyeste kvalitet

Norengros lanserer nå en komplett produktserie med dekontaminormidler under merkenavnet Pure.

Alle Pure Dekontaminormidlene er Svanemerket, noe som gjør dem til gode miljøvalg. Produktene er også CE-merket og EN-godkjent til sitt bruksformål. Dette innebærer at de oppfyller alle relevante sikkerhetskrav og gjør at du kan være trygg på at de holder høyeste kvalitet.

Den praktiske fargekodingen og piktogrammene på produktene hjelper brukeren med å velge riktig kjemi til riktig bruk.

Emballasjen er resirkulerbar, og produksjon i Norden bidrar til å redusere transport ut til sluttbruker. Dette er med på å gjøre Pure-serien til et godt valg for virksomheter som ønsker å kombinere effektiv drift med bærekraftige innkjøp.



PURE DEKONTAMINORMIDLER

Pure dekontaminormiddel-serien sikrer trygg og effektiv rengjøring av medisinsk utstyr i dekontamineringsmaskiner.

Varenr 460929	Pure Dekontaminatorvask Enzym	Grønn	1 liter
Varenr 460928	Pure Dekontaminatorvask Enzym	Grønn	5 liter
Varenr 460925	Pure Dekontaminatorvask Mild	Lilla	5 liter
Varenr 460926	Pure Dekontaminatorvask Sterk	Blå	5 liter
Varenr 460927	Pure Dekontaminatorvask Tørremiddel	Brun	5 liter