

Pure Dekontaminatorvask Enzym



Varenummer/volum

460929 1L
460928 5L

Produkttype

Ensymbasert dekontaminatormiddel.

Bruksområde

Ensymbasert, nøytralt og flytende rengjøringsmiddel for skånsom rengjøring av sensitivt medisinsk utstyr og instrumenter.

Rengjøringsmiddel for instrumentvaskere, ultralydbad, manuell vask og til bløtlegging.

Rustfritt stål, kobber, messing og aluminium påvirkes ikke.

Kun til profesjonelt bruk.

Brukerveiledning

Produktet doseres vanligvis gjennom maskinens doseringsanlegg.

Ved manuell rengjøring anbefales doseringspumpe.

Skal ikke tømmes direkte i avløp.

Vasketemperatur

Anbefalt vasketemperatur 40-50°C i ca. 10 minutter.

Temperatur må ikke overstige 60°C da enzymenes effekt vil avta. Ved manuell rengjøring anbefales doseringspumpe.

Dosering

2 - 3,5 ml pr liter vann avhengig av tilsmussingsgrad.

Bløtlegging: 10 - 15 ml pr. liter vann. 20-40°C i 2-12 timer.

Oppbevaring/lagring

Oppbevares lukket i original emballasje ved 5-35°C .

Holdbarhet

2 år etter produksjonsdato i uåpnet emballasje.


1 år etter åpning.

Miljømerking

Svanemerket 50800010.

Innhold

< 5% · Nonioniske overflateaktive stoffer · Polycarboxylater · Enzymer

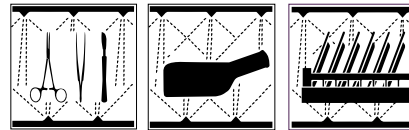

Miljøråd:

Sørg for korrekt og hensiktsmessig innlastning av utstyr for effektiv rengjøring. Unngå over- eller underdosering. Følg anbefalt temperatur for hygienisk rengjøring og desinfeksjon.

CE-Godkjent

Gjenvinning:

Emballasjen sorteres som plast, forutsatt tom og tørr.

Tekniske data/egenskaper

Tilstandsform: Flytende

pH: 9,8 (ufortynnet), ca. 7 i 1% oppløsning.

Spes. vekt: ca. 1,05 kg/l.

Sikkerhetsdatablad finnes på våre nettsider norengros.no/hms-datablader

Norengros AS Fyrstikkalleen 3 A, 0661 Oslo, Pb. 6714 Etterstad, 0609 Oslo. T: 22 66 62 20 E: ne@norengros.no W: www.norengros.no