


Forsterket, myk
stoffbakside gir
ekstra styrke

Unik form gir minimal
kontakt mellom
hud og kateter

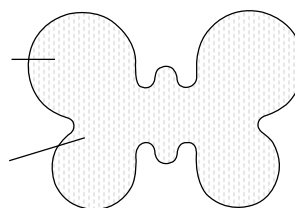

**Hudvennlige
egenskaper:**

Fjæren viser til produkter
som gir en sterk og sikker
fiksering, samtidig som
hudskade minimeres.

3M™ Fikseringsenhet til katetre og slanger


Veiledning for applikering og fjerning

Applikering av 3M™ Fikseringsenhet til katetre og slanger



Forberede applikering


- Åpne pakken.
- Fjern bandasjen helt fra beskyttelsespapiret.

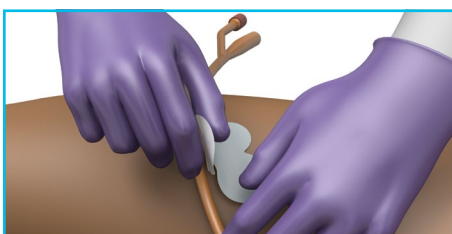

Legg på første vinge

- Legg én vinge av bandasjen (halve) på pasientens hud samtidig som du beveger kateteret minst mulig.

Merk: Ikke strekk bandasjen under påsettingen, da drag kan forårsake hudtraumer.

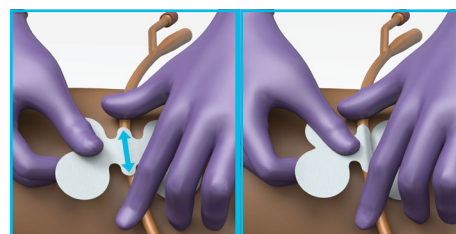


Fest kateteret

- Legg kateteret langs bandasjens sentrale midtre del.
- Fold bandasjen helt rundt kateteret.




Legg på andre vinge

- Legg den andre vingen av bandasjen (halve) på pasientens hud.
- Trykk bandasjen godt ned, inkludert kantene, for å forbedre festet mot huden og kateteret.

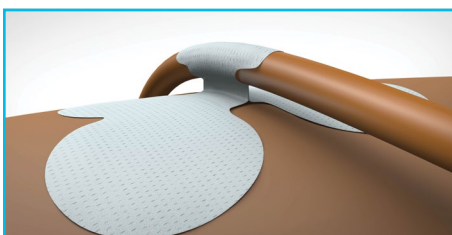


Sjekk den endelige plasseringen

- Forsikre deg om at kateteret er løftet litt opp fra huden, slik at det ikke oppstår trykkskade.

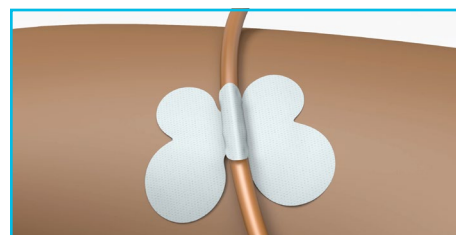


Applikert bandasje

Bytte eller fjerne 3M™ Fikseringsenhet til katetre og slanger

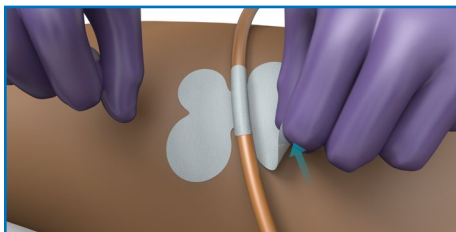

Starte fjerning


- Beveg kateteret minst mulig under fjerning.
- Løsne og trekk tilbake ett hjørne av bandasjen.

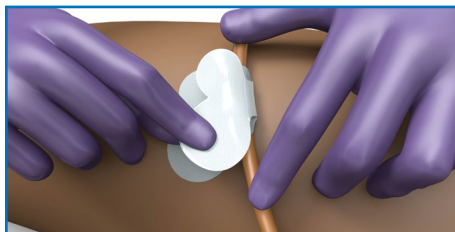

Fjern første vinge

- Stabiliser kateteret på pasienten.
- Hold bandasjen parallelt med huden.
- Fjern én vinge i sin helhet.

Merk: Hold den lavt og dra langsomt.

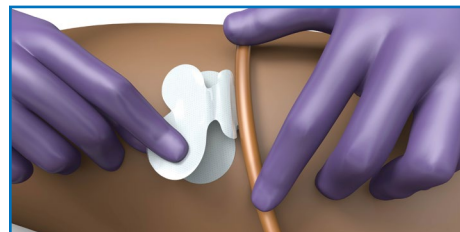

Stabiliser og fjern

- Løsne forsiktig bandasjen fra kateteret.
- Fjern bandasjens andre vinge fra huden.

Merk: Hold den lavt og dra langsomt.

Se produktets bruksanvisning for annen viktig informasjon.

Gå til [3M.com/MedicalSecurement](https://www.3m.com/MedicalSecurement) for å finne ut mer.



3M Company
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA

Nettsted [3M.com/Medical](https://www.3m.com/Medical)

© 2022 3M. Med enerett.
3M og andre viste varemerker er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er forbudt. Brukes under lisens i Canada.
GL_EN_70-2013-1330-4