




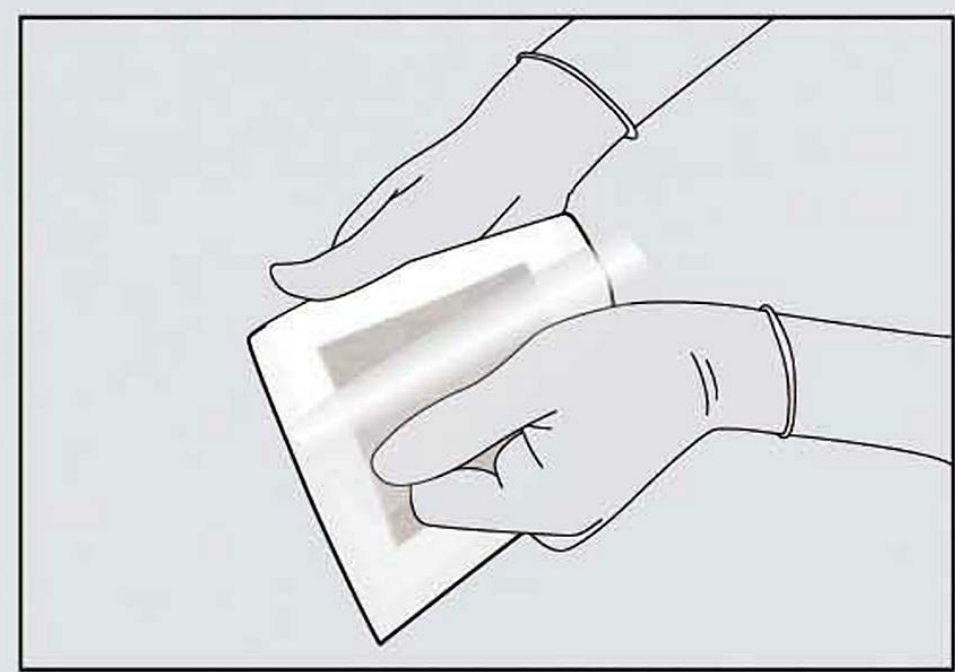

1 Velg riktig størrelse på bandasjen etter rensing.

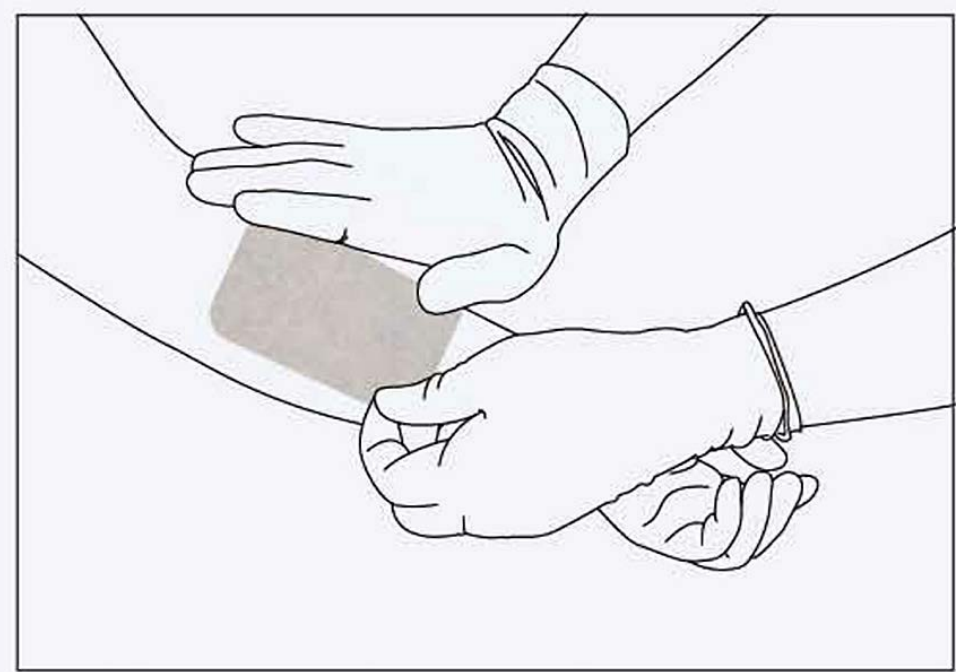

2 Legg bandasjen direkte på såret.

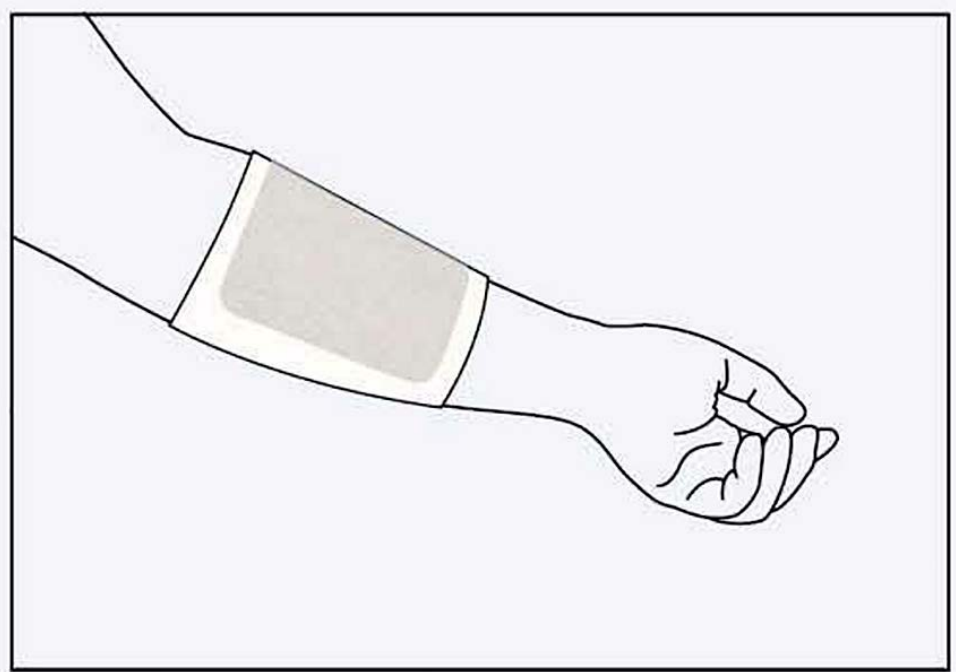

3 Sikre bandasjen med ikke-okklusiv sekundærbandasje.



Type	REF-kode	Str (cm)	Str (in)
 Vanlig	AD050050	5 x 5	2" x 2"
	AD100100	10 x 10	4" x 4"
	AD125100	12.5 x 10	5" x 4"
	AD150150	15 x 15	6" x 6"
	AD200200	20 x 20	8" x 8"
	AD300025	30 x 2.5	12" x 1"
 Sterkere	AD300050	30 x 5	12" x 2"
	AD050050S	5 x 5	2" x 2"
	AD100100S	10 x 10	4" x 4"
	AD125100S	12.5 x 10	5" x 4"
	AD150150S	15 x 15	6" x 6"
	AD200200S	20 x 20	8" x 8"
 Klebrig	AD300025S	30 x 2.5	12" x 1"
	AD300050S	30 x 5	12" x 2"
	AD100060B	10 x 6 (6 x 3)	4" x 2.4" (2.4" x 1.2")
	AD100100B	10 x 10 (5 x 5)	4" x 4" (2" x 2")
 Bånd	AD150150B	15 x 15 (10 x 10)	6" x 6" (4" x 4")
	AD200200B	20 x 20 (15 x 15)	8" x 8" (6" x 6")
	AD002305R	2g	-

Merk: Spesielle spesifikasjoner i forhold til sårets form og helningsprosess.

FORYOU MEDICAL
HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD


ADD: No.1, Shangxia North Road, Dongjiang Hi-tech Industrial Park, Huizhou, Guangdong, China
TEL: +86-752-5302185 FAX: +86-752-5302020 E-MAIL: medical2@foryougroup.com WEB: en.foryoumedical.com

LUOFUCON®

Alginatbandasje


Ver. A2 Update 20200722

FORYOU MEDICAL
for you , for us , for life

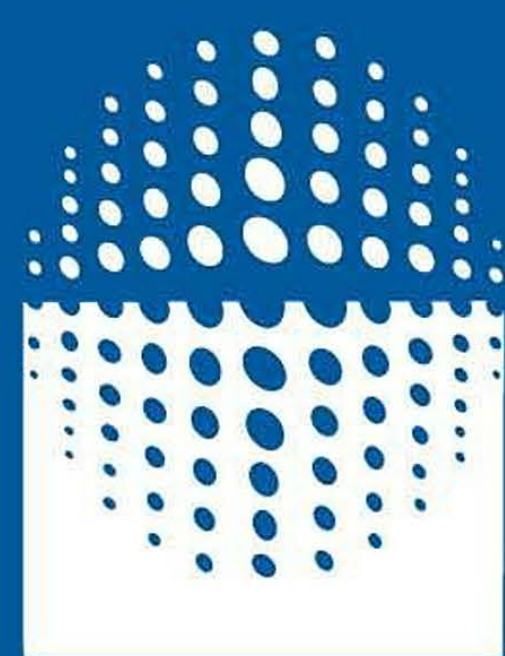

LUOFUCON®

Alginatbandasje

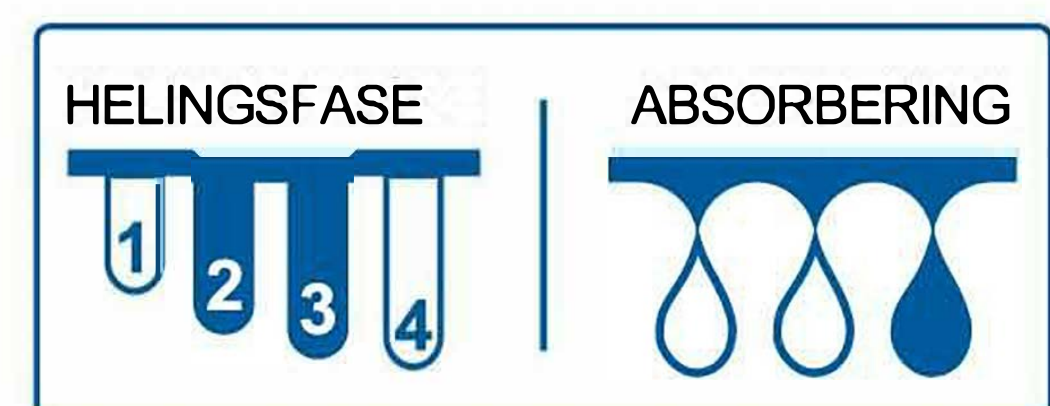

- Rødt sår
- Gult sår
- M: Fuktighetsbalanse

Høykvalitets naturlig bandasje for bruk på moderat til sterkt væskende sår.

LUOFUCON® Alginatbandasje er laget av naturlige fibre fra tang/alger. Den er designet til å være høy- og hurtigabsorberende. Alginat absorberer sårveske og lager en gelaktig hinne over såret. Den opprettholder et fuktig sårtilhelingsmiljø, noe som medfører raskere helingsprosess og bidrar til å stanse blødning. Den gelaktige overflaten bidrar også til at bandasjen ikke fester seg til såret, og vil dermed være smertefri å fjerne.

Hvordan fungerer alginatbandasje?

- Høyabsorberende
- Bidrar til et fuktig sårtilhelingsmiljø
- Lett å legge på og å fjerne
- Imponerende våtstyrke



Indikasjoner

- Overflatiske traumesår
- Moderat til sterkt væskende sår, samt sår med hulrom
- Trykksår
- Diabetiske sår
- Venøse/arterielle leggsår
- Donorhudområde
- Post-kirurgiske sår




Bruk i dype hulrom

Det fleksible og myke softfiberbåndet er ideelt for bruk i dype hulrom.

Høyabsorberende

Produktet absorberer 10-20 ganger sin vekt og beholder et fuktig sårtilhelingsmiljø.

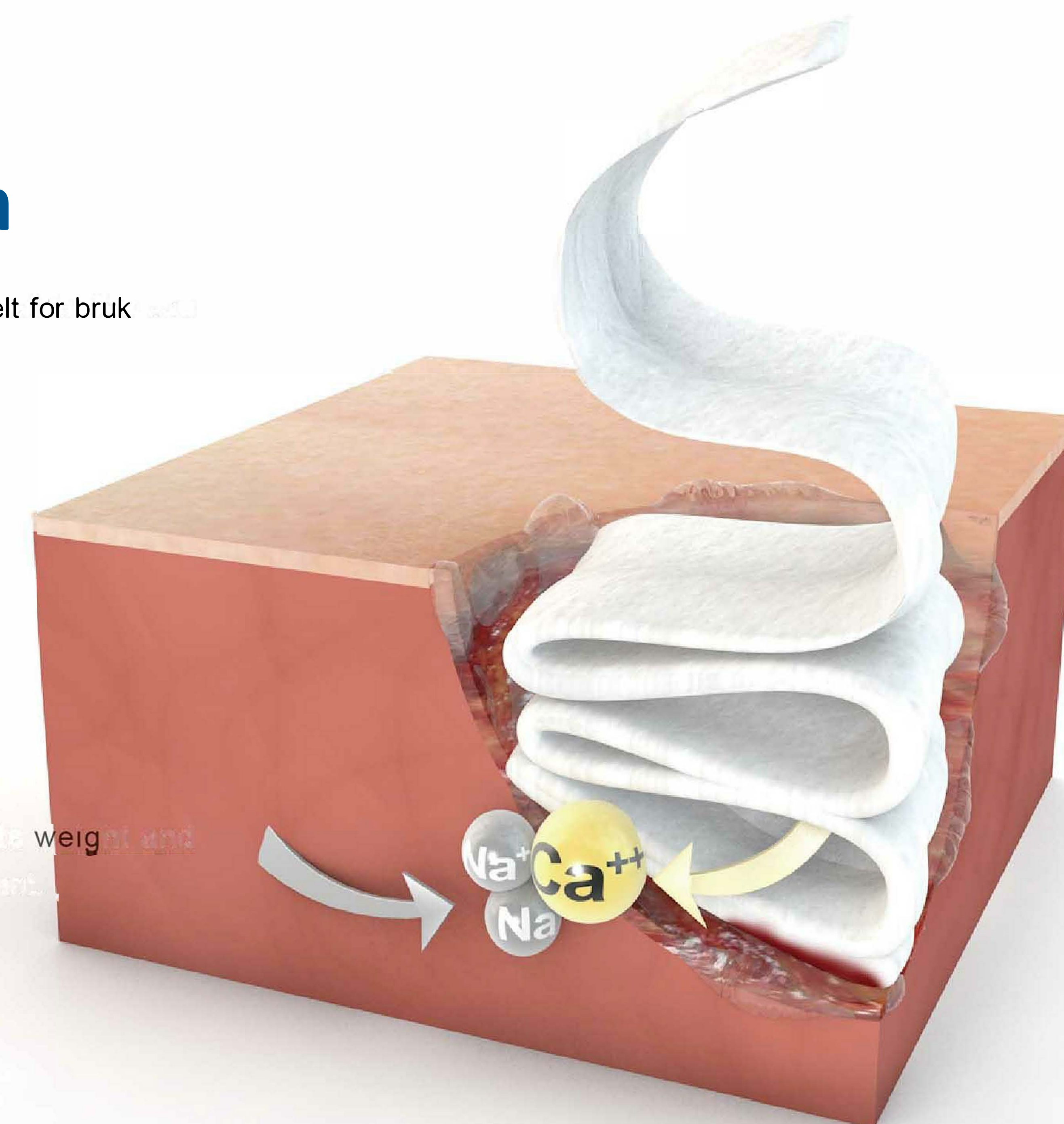


Korrekt bruk

Når produktet legges på oppstår det en ionutveksling mellom kalsiumet i bandasjen og natrium fra væsken, noe som former en oppløselig kalsium/natrium alganisk gel. De frie kalsiumionene i såret vil forsterke koaguleringskaskaden, og det har påvist at kalsiumioder reduserer blødning under forskjellige kirurgiske inngrep. Interaksjonen av sårvesken vil lage en beskyttende gel som har sperrende, ikke-klebende og fuktende egenskaper.*


* Referanse: Kuen Yong Lee, David J. Mooney. Alginate: properties and biomedical applications. Prog Polym Sci. 2012 Jan; 37(1): 106–126.

Merkander


- Dette er et engangsprodukt. Ikke bruk produktet dersom emballasjen er ødelagt eller brutt.
- Bruk ikke produktet til å tørke sår.
- Bruk ikke produktet når sår er infisert.
- LUOFUCON® Alginatbandasje er ikke anbefalt for bruk på sår som krever kirurgisk inngrep for å stanse blødninger.
- Dersom rødhet eller allergiske reaksjoner, avslutt bruk av produktet.
- Engangsprodukter kan ikke ligge på mer enn 7 dager, og bruk av dette produktet kan ikke overskride 30 dager sammenhengende bruk.

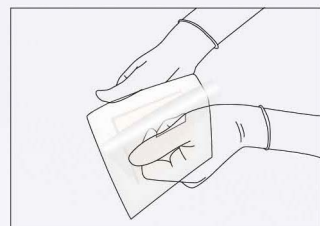

1 Velg riktig størrelse på bandasjen etter rensing.

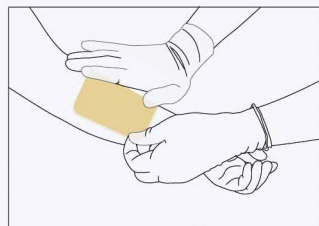

2 Legg bandasjen direkte på såret med den hvite siden mot såret

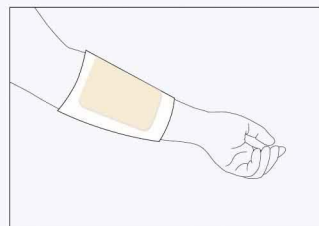

3 Sikre bandasjen med passende bandasje eller teip om nødvendig.



Type	REF code	Size (cm)	Size (in)
Non-Border	FD050050	5 x 5	2" x 2"
	FD100100	10 x 10	4" x 4"
	FD150150	15 x 15	2" x 2"
With-Backing	FD050050U	5 x 5	2" x 2"
	FD100100U	10 x 10	4" x 4"
	FD150150U	15 x 15	6" x 6"
	FD200200U	20 x 20	8" x 8"
	FD065065UX	6.5 x 6.5 (Tracheostomy)	2.6" x 2.6" (Tracheostomy)
	FD100090UX	10 x 9 (Tracheostomy)	4" x 3.6" (Tracheostomy)
	FD125100UX	12.5 x 10 (Tracheostomy)	5" x 4" (Tracheostomy)
	FD130100UH	13 x 10 (Heel)	5.2" x 4" (Heel)
	FD170105UH	17 x 10.5 (Heel)	6.8" x 4.2" (Heel)
	FD100100W	10 x 10 (5 x 5)	4" x 4" (2" x 2")
With-Border	FD150150W	15 x 15 (10 x 10)	6" x 6" (4" x 4")
	FD220220WS	22 x 22 (16 x 15.5) (Sacrum)	8.8" x 8.8" (6.4" x 6.2") (Sacrum)
	FD100100WX	Φ10 (Φ5) (Tracheostomy)	Φ4" (Φ2") (Tracheostomy)
Lite-Border	FD100100BL	10 x 10 (5 x 5)	4" x 4" (2" x 2")
	FD150150BL	15 x 15 (10 x 10)	6" x 6" (4" x 4")
	FD200200BL	20 x 20 (15 x 15)	8" x 8" (6" x 6")

Merk: Spesielle spesifikasjoner i forhold til sårets form og legningsprosess.

FORYOU MEDICAL

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD.
ADD: No.1, Shangxia North Road, Dongjiang Hi-tech Industrial Park, Huizhou, Guangdong, China
TEL: +86-752-5302185 FAX: +86-752-5302088 E-MAIL: medical2@foryougroup.com
en.foryoumedical.com

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life

LUOFUCON®

Skumbandasje




FORYOU MEDICAL

for you, for us, for life



LUOFUCON® Skumbandasje

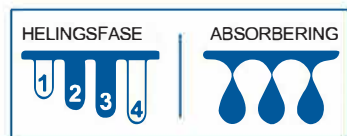


- Rødt sår
- Gult sår
- Oransje sår
- M: Fuktighetsbalanse

Meget fleksibel bandasje for bruk på sterkt væskende sår.

LUOFUCON® Skumbandasje, som er EO-sterilisert, er satt sammen av myk og høyabsorberende polyuretan, og er både dusjtett og pustende. Den absorberer væske og opprettholder et fuktig miljø, noe som forbedrer sårtilhelingsprosessen.

Fordeler

- Forskjellige former og størrelser
- Egner seg for moderat til kraftig væskende sår
- Puster og er vanntett
- Sørger for et fuktig miljø for sårtilheling.
- Bakteriebeskyttende
- Komfortabel og fleksibel

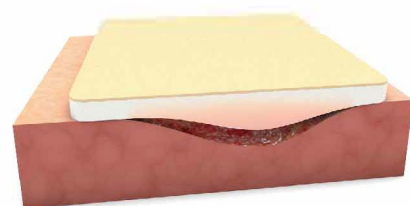

Asorbrende og beskyttende

Fleksibel og komfortabel for å sørge for beskyttelse mot trykk, samt sørger for å ha et fuktig sårtilhelingsmiljø.

Absorberende PU-skum

God væskehåndteringskapasitet
Gir ekstra komfort og beskyttelse

Beskyttende

Vanntett og bakteriebeskyttende.
Høy MVTR

Symptomer

For væskende sår:

- Venøse leggsår
- Trykksår (II-IV)
- Diabetiske fotsår
- Donorhudområde
- Skrubbsår
- Operative inngrep


Kontraindikasjon

Bruk ikke på pasienter som er sensitive mot polyakrylat eller polyuretan.






1 Velg riktig størrelse på bandasjen etter rensing.

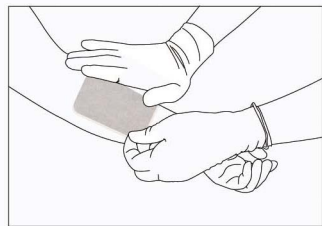

2 Legg bandasjen direkte på såret

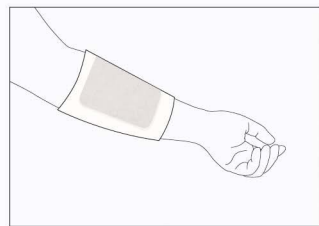

3 Sikre bandasjen med passende bandasje eller tape om nødvendig.



Type	REF-kode	Str (cm)	Str (in)
Sheet	GF050050	5 x 5	2" x 2"
	GF100100	10 x 10	4" x 4"
	GF100125	10 x 12.5	4" x 5"
	GF150150	15 x 15	6" x 6"
	GF200200	20 x 20	8" x 8"
	GF400200	40 x 20	16" x 8"
	GF600400	60 x 40	24" x 16"
	GF100045	10 x 4.5	4" x 1.8"
	GF200045	20 x 4.5	8" x 1.8"
	GF300045	30 x 4.5	12" x 1.8"
	GF450020	45 x 2	18" x 0.8"

Merk: Spesielle spesifikasjoner i forhold til sårets form og legningsprosess.


FORYOU MEDICAL
HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD.
ADD: No.1, Shangxia North Road, Dongjiang Hi-tech Industrial Park, Huizhou, Guangdong, China
TEL: +86-752-5302185 FAX: +86-752-5302088 E-MAIL: medical2@foryougroup.com
en.foryoumedical.com


FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life

LUOFUCON®

Gelling Fiber Dressing

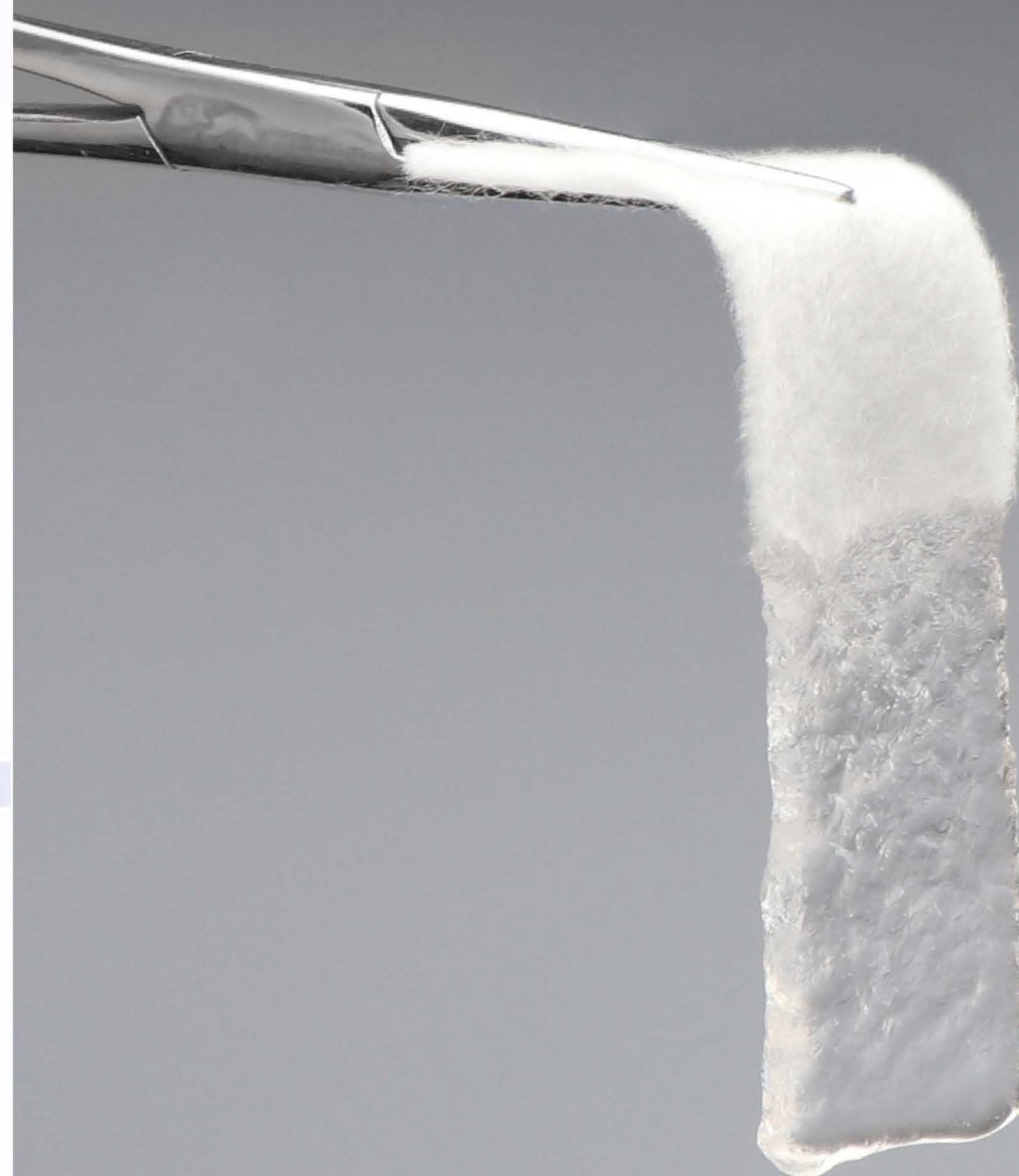


FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life

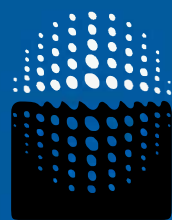

LUOFUCON®

Gelfiberbandasje

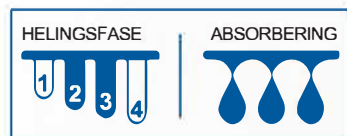

- Rødt sår
- Gult sår
- M: Fuktighetsbalanse

Perfekt balanse mellom absorbering og våtstyrke.


LUOFUCON® Gelfiberbandasje er forskjellig fra andre typer fiberbandasjer. Den har en perfekt balanse mellom absorbering og våtstyrke. Etter absorbering av sårvæsken sveller bandasjen hurtig og former en transparent gel, noe som forebygger lekkasjer og skaper et optimalt, fuktig sårtilhelingsmiljø. Høy våtstyrke gjør at bandasjen kan fjernes i sin helhet og sørger for at pleiere kan tilpasse bandasjens plassering dersom nødvendig. Den er også fleksibel til å fylle hulromssår med enkel applikering og fjerning.

Indikasjoner

LUOFUCON® Gelfiberbandasje brukes til å behandle moderat til høyt væskende akutte eller kroniske sår. Produktet kan også fuktes for effektiv bruk på tørre eller lite væskende sår, inkludert leggsår, trykksår (II–IV), diabetiske sår, kirurgiske sår, brannsår, akutte sår, onkologiske sår, smertefulle sår.

Palisade Plus+

Patentert teknologi som gjør at bandasjen absorberer både horisontalt og vertikalt samtidig som den bevarer styrken og motvirker krymping.

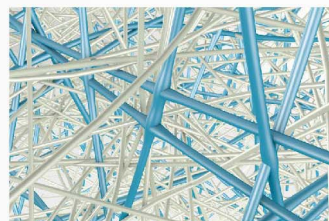

Geldannelse



Etter at fiberne absorberer sårvæsken, gelaterer den hurtig og blir gjennomsiktig.



Effektiv behandling av sårvæske

Høyabsorberende og kan absorbere sårvæske under kompresjonsbandasje.

Imponerende retensjonskapasitet, låser væsken og skadelige bakterier, hindrer risikoen for krosskontaminering ved fjerning. Minimerer maserasjon av omkringliggende hud.

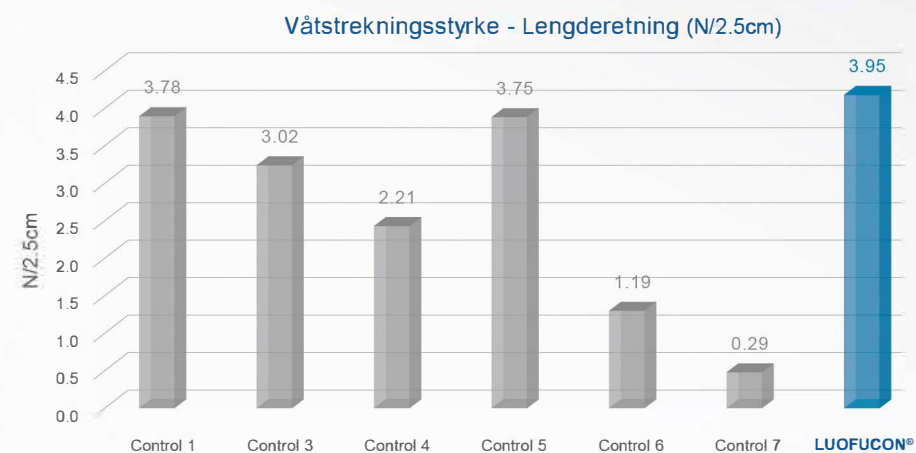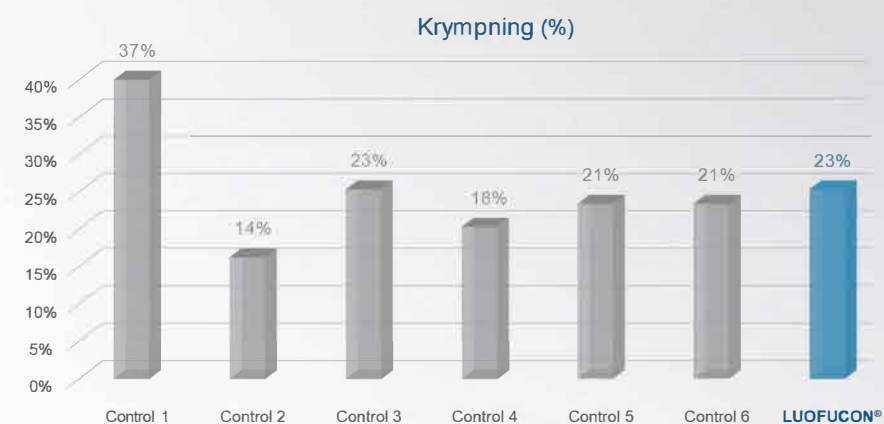


Antikrympende


Unike antikrympende egenskaper bidrar til å holde sterk beskyttelse av sår, myk og fleksibel på sårstedet slik at en unngår strukturer hvor bakterier kan leve.

Helhetlig


Høy våtstyrke og strukturell konsistens. Løser seg ikke opp og fjernes helhetlig.

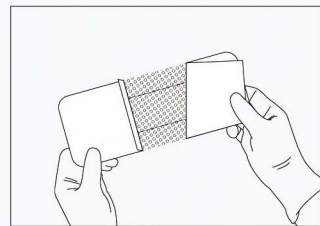

1 Velg riktig størrelse på bandasjen etter rensing.

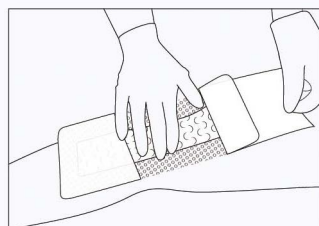

2 Legg bandasjen direkte på såret.

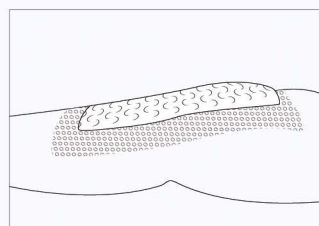

3 Sikre bandasjen med sekundærbandasje.



Type	REF-kode	Size (cm)	Size (in)
HEFTENDE	OP080060A	8 x 6 (5 x 3)	3.2" x 2.4" (2" x 1.2")
	OP100090A	10 x 9 (6 x 4.5)	4" x 3.6" (2.4" x 1.8")
	OP150090A	15 x 9 (10 x 4.5)	6" x 3.6" (4" x 1.8")
	OP100100A	10 x 10 (6 x 6)	4" x 4" (2.4" x 2.4")
	OP150100A	15 x 10 (10 x 6)	6" x 4" (4" x 2.4")
	OP200100A	20 x 10 (14.5 x 4.5)	8" x 4" (5.8" x 1.8")
	OP250100A	25 x 10 (19 x 4.5)	10" x 8" (7.6" x 1.8")
	OP300100A	30 x 10 (24 x 4.5)	12" x 8" (9.6" x 1.8")
	OP350100A	35 x 10 (29 x 4.5)	14" x 8" (11.6" x 1.8")
	OP175150A	17.5 x 15 (12.5 x 10)	7" x 6" (5" x 8")
	OP250200A	25 x 20 (19 x 14.5)	10" x 8" (7.6" x 5.8")
	OP500200A	50 x 20 (43 x 14.5)	20" x 8" (17.2" x 5.8")

Merk: Spesielle spesifikasjoner i forhold til sårets form og helningsprosess.

FORYOU MEDICAL
HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD.
ADD: No.1, Shangxia North Road, Dongjiang Hi-tech Industrial Park, Huizhou, Guangdong, China TEL:
+86-752-5302185 FAX: +86-752-5302088 E-MAIL: medical2@foryougroup.com
en.foryoumedical.com

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life

LUOFUCON®

Post-Op silikonbandasje




FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life



LUOFU CON®

Post-Op silikonbandasje

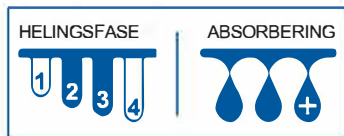

- Rødt sår
- Gult sår
- Rosa sår
- M: Fuktighetsbalanse

Fleksibel komfort for sårstell etter kirurgiske inngrep.

LUOFU CON® Post-Operativ silikonbandasje er en soft, meget fleksibel og absorberende bandasje. Den brukes til å absorbere og fange blod og sårvæske fra kirurgiske sår. Den er satt sammen av et skånsomt silikonsårkontaktlag, non-woven-lag, en høyabsorberende pad og er pustende og vanntett. Silikonsårkontaktlaget er hypoallergisk og fester seg ikke til såret. Det er enkelt å legge på og fremkaller ikke smerte ved bytte av bandasje.

Fleksibel

Beveger seg ikke, selv på utfordrende områder. Høy fleksibilitet gir god komfort og tilpasning.



Buet tekstur

Med god tilpasning, buet perforert mønster i den superabsorberende paden får du en dynamisk fleksibilitet som sørger for at bandasjen ligger stabilt. Horisontal og vertikal absorpsjon er også nyttig fra denne åpen-topp-strukturen.



Beskyttende støtte

Høy MVTR
Behagelig og fleksibel
Vanntett og bakteriebeskyttende

Superabsorberende kjeme

Eksepsjonelt absorberende
Bidrar til å minimere masjerasjon
Spesielt buedesign gjør produktet fleksibilitet

Non-woven lag

Fordeler væsken over hele overflaten
Høyner absorpsjonen

OptiSil Silikon sårkontaktlag

Selvutviklet silikongel og perforeringsteknologi
Frakter sårvæsken hurtig og jevnt inn i bandasjen
Skånsom og sikker
Ingen smerte ved fjerning
River ikke opp hudcellene i såret ved fjerning

OptiSil

Selvutviklet silikongel og perforeringsteknologi, gir ikke bare behagelig pleie av såret, men bidrar også til at sårvæsken ledes inn i bandasjen imponerende kjapt. Etterlater ikke rester etter fjerning.

Indikasjoner

LUOFU CON® Post-operativ silikonbandasje brukes ved leggsår, trykksår, diabetiske fotsår. Produktet fungerer godt til behandling av både generelle og mer utfordrende kirurgiske sår.


Fordeler

- Eksepsjonell behandling av post-operative sår
- Fleksibel og komfortabel for sprekker/rifter
- Ingen smerte ved bandasjebytte
- Fester seg ikke til såret eller suturer
- Enkelt for personell å gjøre sårinspeksjon, ettersom produktet enkelt kan løftes opp og legges på igjen.


Kontraindikasjoner

Ikke bruk produktet på tørre eller lavt væskende sår, øyne, slimhinner eller i sårgrøper, ettersom bandasjen sveller under absorpsjonen. Brukes ikke på tredjegradsforbrenninger.


Skal ikke brukes på personer med kjent allergi eller hypersensitivitet til bandasjen eller dens komponenter.

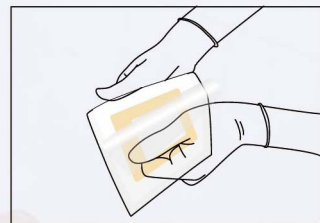

1 Velg riktig størrelse på bandasjen etter rensing.

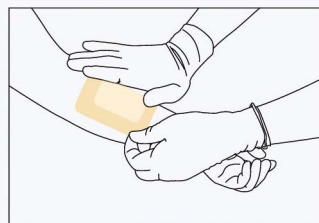

2 Legg bandasjen direkte på såret.

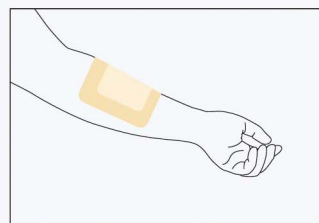

3 Sikre bandasjen med sekundærbandasje.



Type	REF Code	Str (cm)	Str (in)
Non-Border	SF050050N	5 x 5	2" x 2"
	SF075075N	7.5 x 7.5	3" x 3"
	SF100100N	10 x 10	4" x 4"
	SF150150N	15 x 15	6" x 6"
	SF200130NH	20 x 13 (Heel)	8" x 5.2" (Heel)
	SF076076NX	Φ7.6 (TracheostomyΦ0.8)	Φ3.04" (TracheostomyΦ0.32")
	SF100090NX	10 x 9 (TracheostomyΦ1.2)	4" x 3.6" (TracheostomyΦ0.48")
With-Border	SF050050F	5 x 5 (2.5 x 2.5)	2" x 2" (1" x 1")
	SF100100F	10 x 10 (6.2 x 6.2)	4" x 4" (2.48" x 2.48")
	SF150150F	15 x 15 (10.5 x 10.5)	6" x 6" (4.2" x 4.2")
	SF200100F	20 x 10 (15 x 5)	8" x 4" (6" x 2")
	SF175170FS	17.5 x 17 (12.5 x 12) (Sacrum)	7" x 6.8" (5" x 4.8") (Sacrum)
	SF230230FS	23 x 23 (17 x 16.5) (Sacrum)	9.2" x 9.2" (6.8" x 6.6") (Sacrum)
	SF210210FH	21 x 21 (16.5 x 15.5) (Sacrum)	8.4" x 8.4" (6.6" x 6.2") (Sacrum)
Lite-Border	SF250235FH	25 x 23.5 (19 x 17.5) (Heel)	10" x 9.2" (7.6" x 7") (Heel)
	SF075075L3	7.5 x 7.5 (4.5 x 4.5)	3" x 3" (1.8" x 1.8")
	SF100100L3	10 x 10 (6.2 x 6.2)	4" x 4" (2.48" x 2.48")
	SF200100L3	20 x 10 (15 x 5)	8" x 4" (6" x 2")

Merk: Spesielle spesifikasjoner i forhold til sårets form og helningsprosess.

FORYOU MEDICAL
HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD.
ADD: No.1, Shangxia North Road, Dongjiang Hi-tech Industrial Park, Huizhou, Guangdong, China TEL:
+86-752-5302185 FAX: +86-752-5302088 E-MAIL: medical2@foryougroup.com
en.foryoumedical.com

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life

LUOFUCON®




Silikon skumbandasje

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life



LUOFU CON®

Silikon skumbandasje

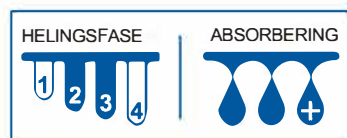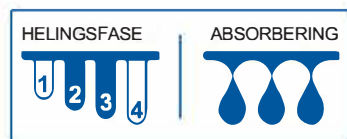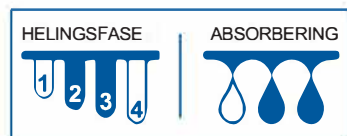

● Rødt sår

● Gult sår

M: Fuktighetsbalanse

Høykvalitetsbandasje for bruk på moderat til høyt væskende sår.

Med OptiSil-teknologi, LUOFU CON® Silikonskumbandasje, som består av et silikonsårkontaktlag, et superabsorberende padlag, og en pustende og vanntett film, er en ideell bandasje for å behandle avanserte sterkt væskende sår. Flerlagskonstruksjonen bidrar til å optimere transport av sårvæske, samt beholde et fuktig miljø for optimal sårtilhelings, minimerer traumer og reduserer smerte ved bytte av bandasjer.

Fordeler

- Selvutviklet, ny teknologi som gjør at produktet er mild mot sensitiv hud.
- Meget god absorbering av sårvæske. Reduserer faren for lekkasjer og maserasjon av hud.
- Smertefri fjerning og endring av plassering. Ingen sekundærbandasje er nødvendig.
- Holder formen under bruk

Indikasjoner

- Trykksår
- Legg- og fotsår
- Traumatiske sår
- Kirurgiske sår
- Donorhudområde
- Hudrifter
- Brannsår (1. og 2. grad)

Skumbandasjen kan også brukes på tørre/nekrotiske sår i kombinasjon med gel.

Kontraindikasjoner

Ikke bruk LUOFU CON® Silikon skumbandasje på pasienter med kjent sensitivitet til skumbandasje.

Beskyttende lag

Høy MVTR
Behagelig og fleksibel
Vanntett og bakteriebeskyttende

Superabsorberende kjerne

Eksepsjonell absorberende
Bidrar til å minimere maserasjon av huden

Non-woven-lag

Fordeler sårvæsken over hele overflaten
Forsterker absorpsjonen

Absorberende PU-skum

Meget god væskehåndteringskapasitet
Gir ekstra komfort og beskyttelse


OptiSil Silkon sårkontaktlag

Selvutviklet silikongel og perforeringsteknologi
Frakter sårvæske kjapt og jevnt.
Skånsom og sikker
Uten smerte ved fjerning
River ikke opp hudcellene i såret ved fjerning




Myk & klebrig


Har evnen til å skape flere kontaktpunkter mellom bandasjen og hudens ujevne overflater og sår, noe som bidrar til å hindre lekkasje av sårvæske og dermed maserasjon av hud.

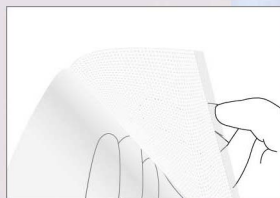

1 Velg riktig størrelse, eller klipp til etter at såret er renset.

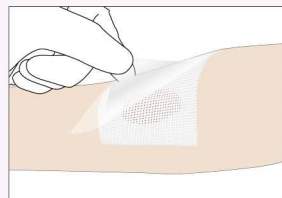

2 Legg bandasjen direkte på såret og fjern beskyttelsesfilmen.

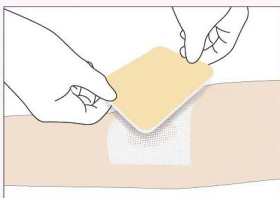

3 Legg en absorberende bandasje over og fest denne.



Type	REF Code	Size (cm)	Size (in)
Enkeltsidig Heftende	SC070050S	7 x 5	2.8" x 2"
	SC100075S	10 x 7.5	4" x 3"
	SC160080S	16 x 8	6.4" x 3.2"
	SC100100S	10 x 10	4" x 4"
	SC150120S	15 x 12	6" x 4.8"
	SC175100S	17.5 x 10	7" x 4"
	SC150150S	15 x 15	6" x 6"
	SC320200S	32 x 20	12.8" x 8"
Enkeltsidig Ikke-heftende	SC070050N	7 x 5	2.8" x 2"
	SC100075N	10 x 7.5	4" x 3"
	SC160080N	16 x 8	6.4" x 3.2"
	SC100100N	10 x 10	4" x 4"


Merk: Spesielle spesifikasjoner i forhold til sårets form og helningsprosess.

FORYOU MEDICAL
HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD.
ADD: No.1, Shangxia North Road, Dongjiang Hi-tech Industrial Park, Huizhou, Guangdong, China TEL:
+86-752-5302185 FAX: +86-752-5302088 E-MAIL: medical2@foryougroup.com
en.foryoumedical.com

LUOFU CON®

Sårkontaktlag silikon

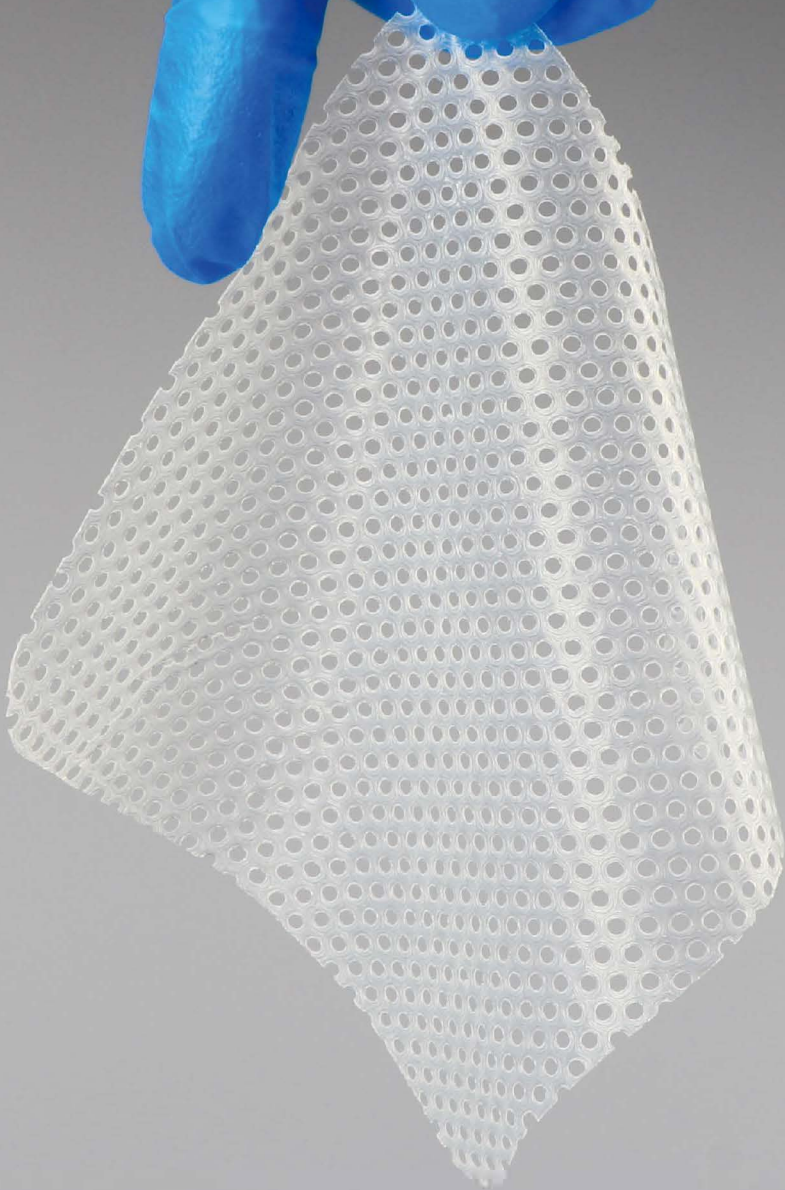

Smertefri

Komfortabel og smertefri ved fjerning.

FORYOU MEDICAL for you, for us, for life

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life



LUOFUCON®

Sårkontaktlag silikon



- Rødt sår
 - Gult sår
- S:** Support & Service


Grundig og behagelig applikering gjør at pasienten ikke påføres smerte ved bytte eller fjerning av bandasje.

LUOFUCON® Sårkontaktlag silikon er et mykt silikon sårkontaktlag som tillater at sårvæske transporteres videre til den overliggende bandasjen. Produktet er designet for bruk på alt fra tørre til sterkt væskende sår.



Fleksibel & myk

Kan kuttes i forskjellige størrelser og former for å passe forskjellige sårområder.

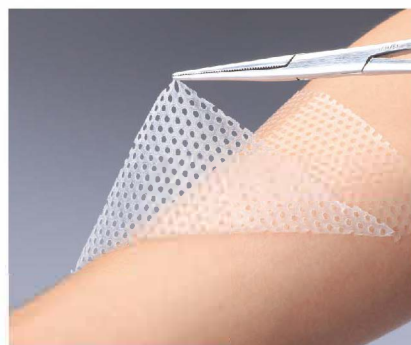

100% åpen passasje

Nettfunksjonen gjør at moderate til høyvolum av sårvæske kan passere inn til den overliggende bandasjen.

Beskyttende lag

Holder bandasjen i riktig posisjon under applikering. Sørger for at bandasjen ikke fester seg til hansker/hender.

Silikon sårkontaktbandasje

- 100% åpent nett
- Distribuerer sårvæske kjapt og jevnt
- Behagelig og trygg med smertefri fjerning
- River ikke med seg hudceller fra såret ved fjerning

For å sikre at bandasjen sitter godt på huden, kan den festes med enkle bandasjer eller tape. Dette kan gjøres på forhånd eller etter at bandasjen er på plass.

For å sikre at bandasjen sitter godt på huden, kan den festes med enkle bandasjer eller tape. Dette kan gjøres på forhånd eller etter at bandasjen er på plass.

Indikasjoner

LUOFUCON® Sårkontaktlag silikon passer til et bredt spekter av sår:

- Trykksår
- Legg- og fotsår
- Traumatiske sår
- Kirurgiske sår
- Donorhudområde
- Hudrifter
- Brannsår (1. og 2. grad)


Bandasjen kan også brukes i kombinasjon med lokalbehandling / hydrogel og i forbindelse med NPWT.


Kontraindikasjoner

Ikke bruk dersom allergi mot silikongummi.


Fordeler

- Godt feste som gjør at bandasjen sitter som den skal.
- Tilpasser seg til såret og ligger stødig.
- Forebygger smerte ved bytte og fjerning av bandasje.
- Gir fri passasje for sårvæske gjennom nettet
- Komfortabel og allergifri

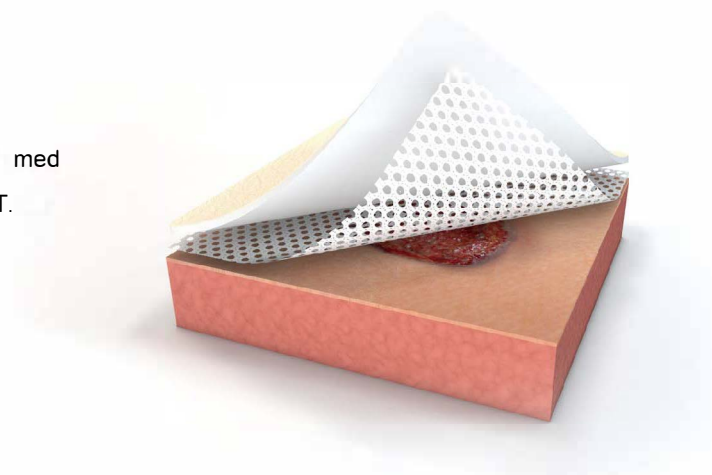


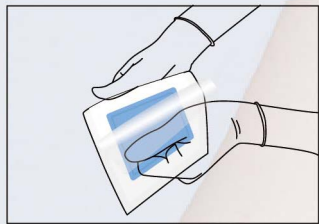

1 Velg riktig størrelse på bandasjen etter rensing.

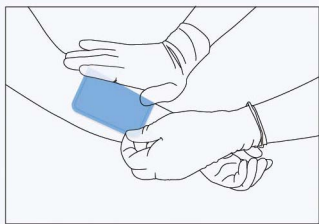

2 Legg bandasjen direkte på såret.

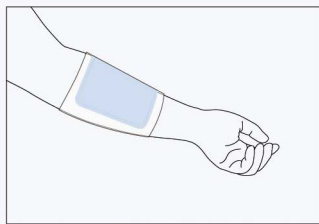

3 Sikre bandasjen med passende bandasje eller teip om nødvendig.



Type	REF Code	Str (cm)	Str (in)
Vanlig	SP050050	5 x 5 (3 x 3)	2" x 2" (1.2" x 1.2")
	SP075075	7.5 x 7.5 (5 x 5)	3" x 3" (2" x 2")
	SP100100	10 x 10 (7.5 x 7.5)	4" x 4" (3" x 3")
	SP200100	20 x 10 (17 x 7.5)	8" x 4" (6.8" x 3")
	SP150150	15 x 15 (12 x 12)	6" x 6" (4.8" x 4.8")
	SP200150	20 x 15 (17 x 12)	8" x 6" (6.8" x 4.8")
	SP250150	25 x 15 (22 x 12)	10" x 6" (8.8" x 4.8")
	SP200200	20 x 20 (17 x 17)	8" x 8" (6.8" x 6.8")
	SP250200	25 x 20 (22 x 17)	10" x 8" (8.8" x 6.8")
	SP300200	30 x 20 (27 x 17)	12" x 8" (10.8" x 6.8")
	SP400200	40 x 20 (37 x 17)	16" x 8" (14.8" x 6.8")
	SP600400	60 x 40 (57 x 37)	24" x 16" (22.8" x 14.8")
Heftende	SP050050A	5 x 5 (3 x 3)	2" x 2" (1.2" x 1.2")
	SP075075A	7.5 x 7.5 (5 x 5)	3" x 3" (2" x 2")
	SP100100A	10 x 10 (7.5 x 7.5)	4" x 4" (3" x 3")
	SP200100A	20 x 10 (17 x 7.5)	8" x 4" (6.8" x 3")
	SP150150A	15 x 15 (12 x 12)	6" x 6" (4.8" x 4.8")
	SP200150A	20 x 15 (17 x 12)	8" x 6" (6.8" x 4.8")
	SP250150A	25 x 15 (22 x 12)	10" x 6" (8.8" x 4.8")
	SP200200A	20 x 20 (17 x 17)	8" x 8" (6.8" x 6.8")
	SP250200A	25 x 20 (22 x 17)	10" x 8" (8.8" x 6.8")
	SP300200A	30 x 20 (27 x 17)	12" x 8" (10.8" x 6.8")
	SP400200A	40 x 20 x (37 x 17)	16" x 8" (14.8" x 6.8")
	SP600400A	60 x 40 (57 x 37)	24" x 16" (22.8" x 14.8")

Merk: Spesielle spesifikasjoner i forhold til sårets form og legningsprosess.

FORYOU MEDICAL
HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD.
ADD: No. 1, Shangxia North Road, Dongjiang Hi-tech Industrial Park, Huizhou, Guangdong, China TEL:
+86-752-5302185 FAX: +86-752-5302088 E-MAIL: medical2@foryougroup.com
en.foryoumedical.com

LUOFUCON® Superabsorberende bandasje



Smertefri

Komfortabel og smertefri ved fjerning.

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life


FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life



LUOFUCON®

Superabsorberende bandasje

Suparbsorberende silikonbandasje

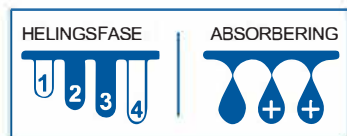

- Rødt sår
- Gult sår
- M: Fuktighetsbalanse

Superabsorberende bandasje for bruk på moderat til sterkt væskende sår

LUOFUCON® Superabsorberende bandasje er en høykapasitetsbandasje for bruk på moderat til sterkt væskende sår. Produktet består av pustende og vanntett non-woven backing, en superabsorberende pad og et hydropenetrerende non-woven-lag. Denne multilagskonstruksjonen er designet for å optimere prosessen og gi hurtigere sårtilheling.

Den superabsorberende paden bygger et fuktig låsesystem som har en heftig absorpsjon og lukker sårvæsken inne i bandasjen.

Med OptiSil-teknologien, som er en selvutviklet silikongel- og perforeringsteknologi, tar produktet sårtilhelingsprosessen til et nytt nivå. Dette produktet gir ikke kun behagelig pleie av sårområdet, men tillater også at sårvæsken oppstas hurtig i bandasjen.

180g / 100cm²

Produktet tar opp 180g væske / 100cm². Dette gir mulighet for lengre perioder mellom hvert sårskift.

OptiSil

OptiSil-teknologien gir smertefri tilpasning og fjerning.



Beskyttende lag

Vanntett og bakterieavvisende

Superabsorberende kjerne

Eksepsjonelt absorberende

Bidrar til å minimere maserasjon av omkringliggende hud

Spesielt buedesign gjør produktet dynamisk og fleksibelt

Mellomlag

Absorberer sårvæsken hurtig

Forsterker bandasjen og hindrer friksjon mellom øvrige lag

Gir pasienten god komfort

Kleber ikke til såret

OptiSil Silikon sårkontaktlag

Selvutviklet silikongel og perforeringsteknologi

Transporterer sårvæsken kjapt og jevnt inn i bandasjen

Skånsom og sikker

Uten smerte ved fjerning

River ikke med seg hudceller ved fjerning



Fordeler

- Imponerende absorpsjon av sårvæske
- Høyabsorpsjonskapasitet med 180g/100cm²;
- Minimerer risikoen for maserasjon av omkringliggende hud
- Lukker væsken og dens komponenter inn i bandasjen
- Kan brukes under kompresjonsterapi
- Overflaten er bakterietett
- Kosteffektiv og miljøvennlig

Indikasjoner

LUOFUCON® Silikon Post-operativ bandasje brukes ved moderate til sterkt væskende sår, eksempelvis leggsår, trykksår, diabetiske fotsår og utfordrende kirurgiske sår.

Kontraindikasjoner

Ikke bruk produktet på tørre eller lavt væskende sår, øyne, slimhinner eller i sårhuler, ettersom bandasjen sveller under absorpsjonen. Brukes ikke på tredjegradsforbrenninger.

Skal ikke brukes på personer med kjent allergi eller hypersensitivitet til bandasjen eller dens komponenter.